


## Desengate do apoio das costas para RCP



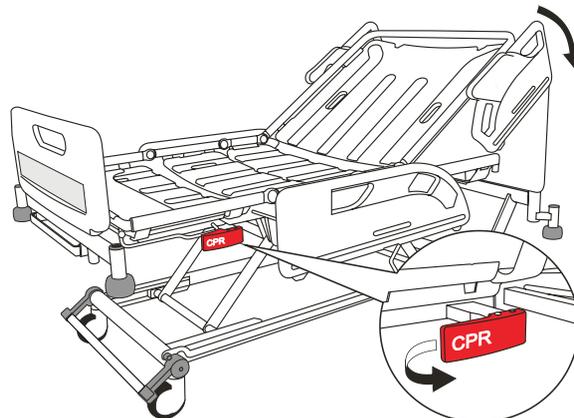


Puxe a pega para RCP vermelha situada em cada lado da cama para baixar rapidamente o apoio das costas.


## Grades laterais - Elevar



Não deixe as grades laterais na posição subida se o parafuso de bloqueio estiver visível por trás do manípulo de operação azul.

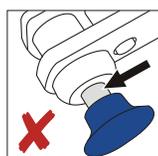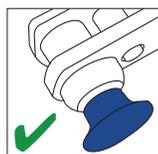
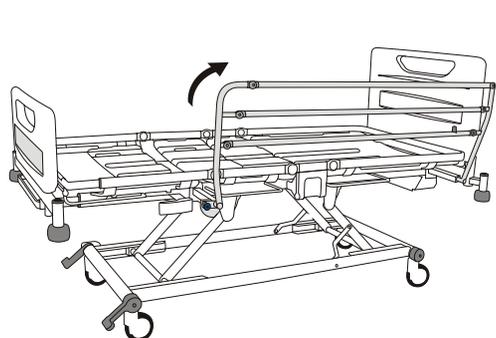


Certifique-se de que a grade lateral está bloqueada com segurança quando estiver na posição subida.

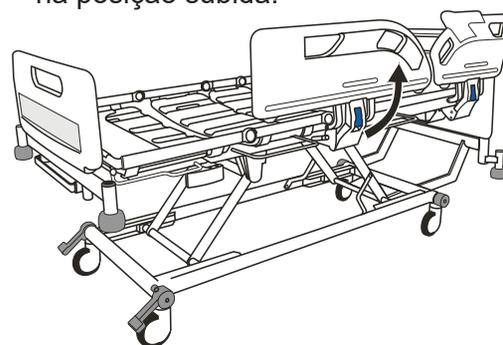


Segure a grade de segurança. Puxe a grade lateral para cima até trancar na posição subida.

## Grades laterais - Baixar

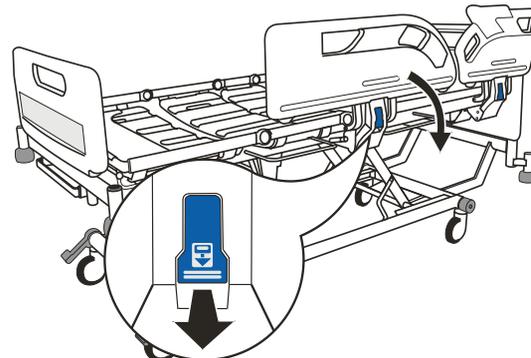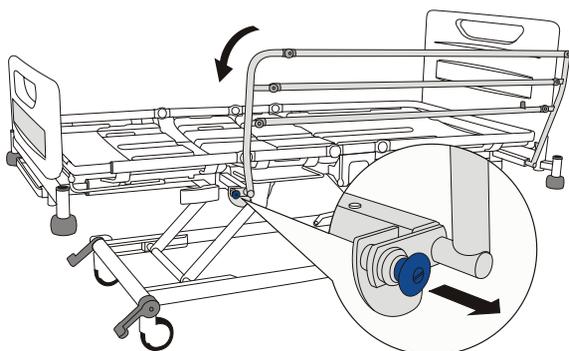



Segure a grade de segurança. Puxe o manípulo de operação azul ou a alavanca de libertação azul e baixe a grade lateral.

## Travões e direção

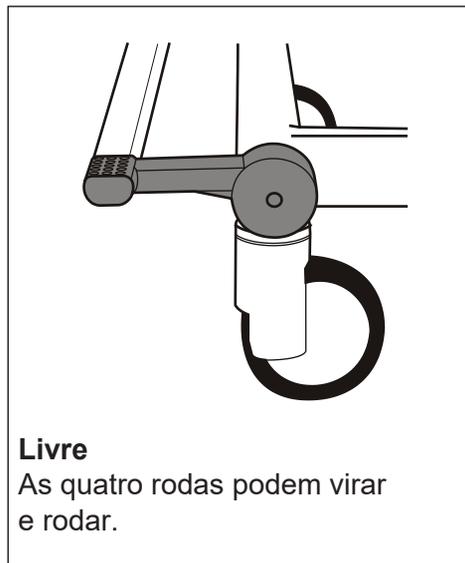

Os travões devem ser sempre acionados quando a cama estiver estacionária.

## Ajuste do comprimento da cama (três posições definidas)

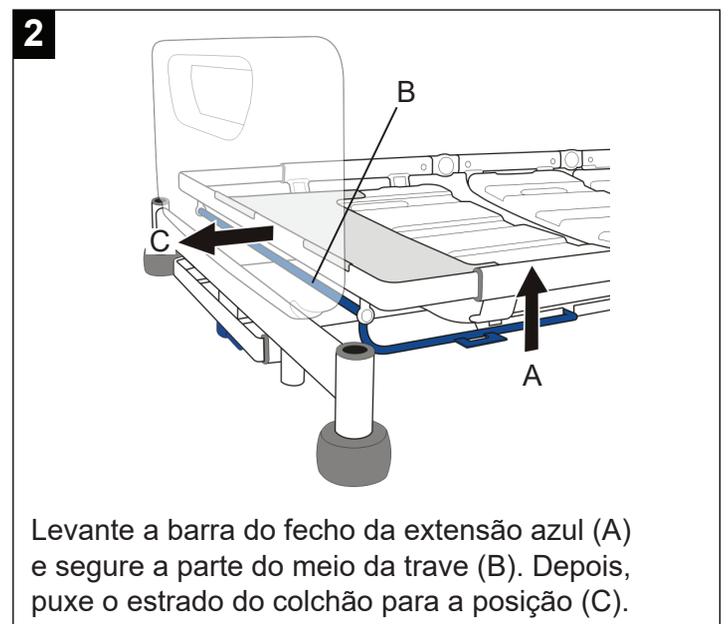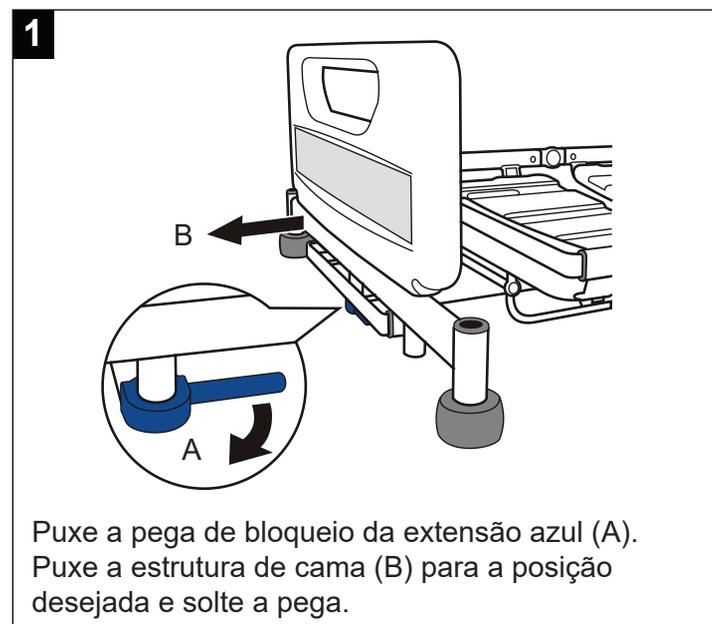

## Ajuste da secção dos gêmeos

