

## Aus dem Stuhl zum Stuhl

**1**




Gurt um den Patienten legen.  
Bein-Befestigungsbänder auf die Innenseite der Oberschenkel legen. Sicherstellen, dass der Gurt weder gefaltet noch verdreht ist.

**2**




Lifter vor dem Pflegebedürftigen positionieren.  
Ggf. dem Pflegebedürftigen helfen, seine Beine auf das Fahrgestell zu stellen oder darüber zu bringen.  
Aufhängung auf Schulterhöhe einstellen.

**3**

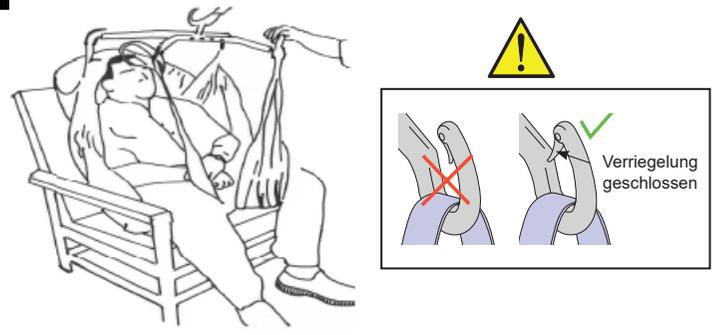


Gurtschlaufen an der Aufhängung ordnungsgemäß befestigen.  
Vor dem Anheben des Pflegebedürftigen sicherstellen, dass der Gurt in den Haken gesichert ist.

**4**

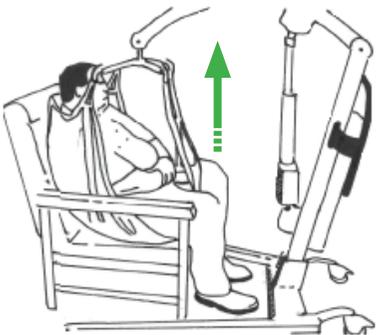


Pflegebedürftigen anheben.

**5**

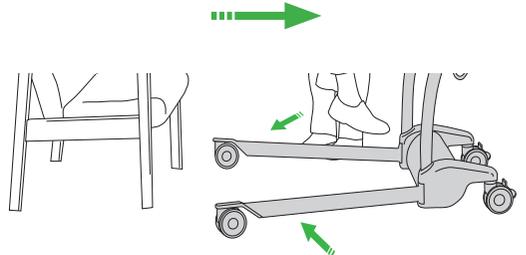

Lifter vom Stuhl wegziehen.  
Ggf. das Fahrgestell schließen.  
Pflegebedürftigen transferieren.

**6**

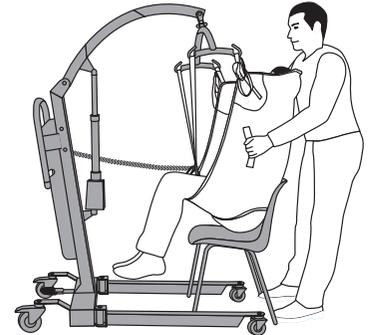

Pflegebedürftigen über den Stuhl positionieren. Vorsichtig in die Sitzposition absenken. Gurt vom Lifter lösen. Lifter vom Pflegebedürftigen wegbewegen. Dem Pflegebedürftigen den Gurt abnehmen.