


Flowtron Excel

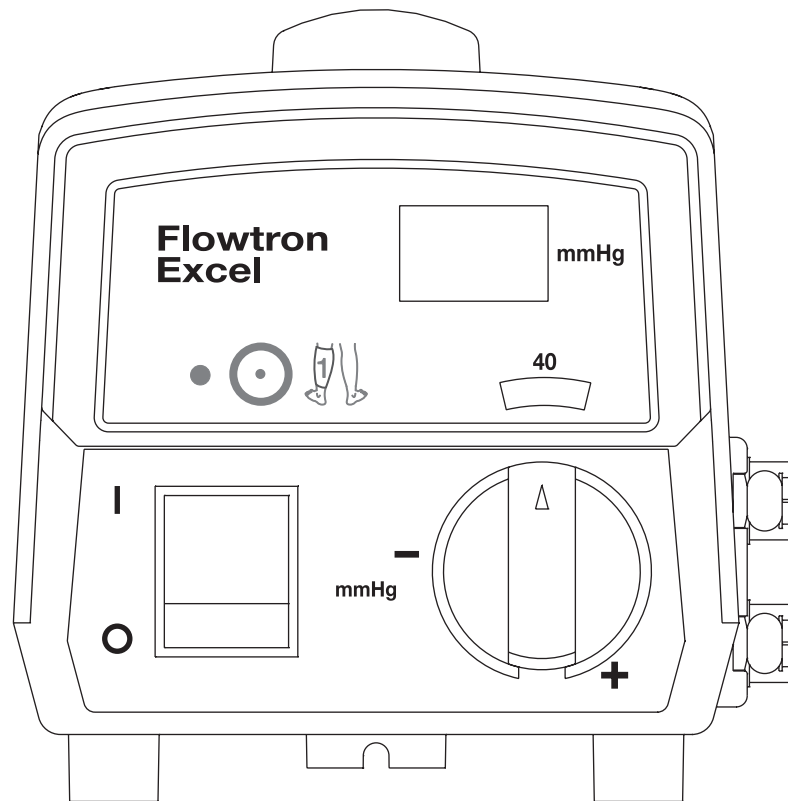


Single leg-knapp och indikator

Om en enskild manschett är fäst:
Tryck på knappen för att förhindra
att larmsystemet indikerar ett fel.
Ett pip hörs och den gula
indikatorlampan tänds.



Display för manschettryck


Indikerar det faktiska tryck som
levereras till manschetterna.

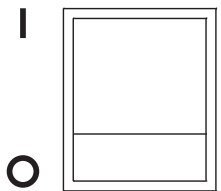

Strömbrytare

På = I (lyser grönt)
Av = O

Vid start utför pumpen ett
två sekunders självtest där
tryckdisplayen, indikatorerna
och larmet testas.

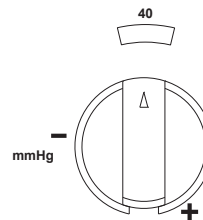

Tryckreglering

Öka trycket = vrid medurs
Minska trycket = vrid moturs
Tryckomfång: 30 till 60 mmHg.