

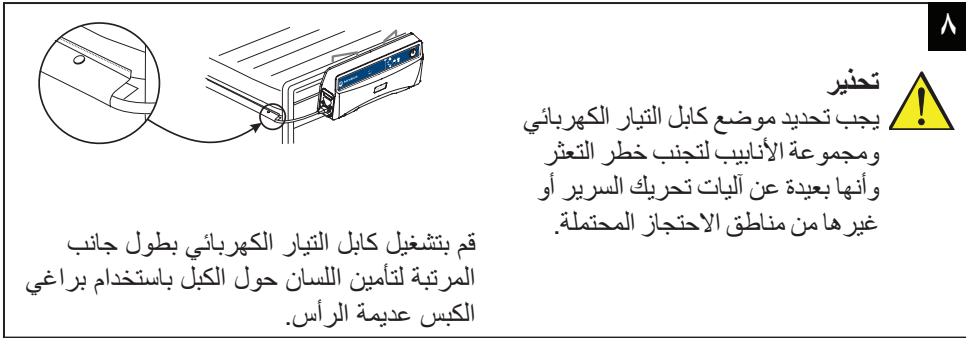
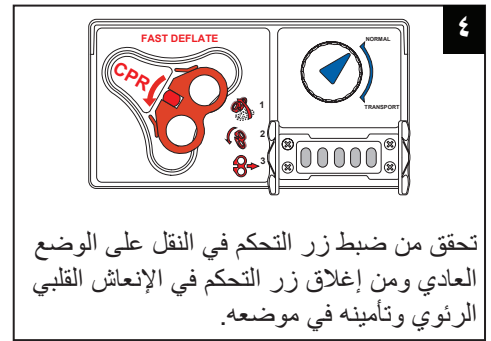
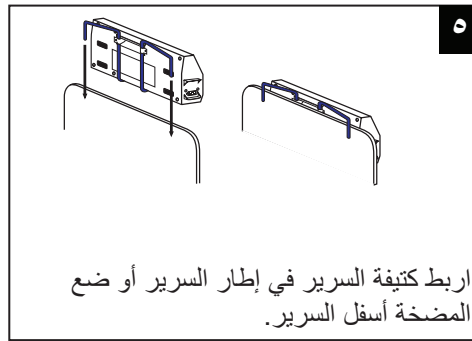
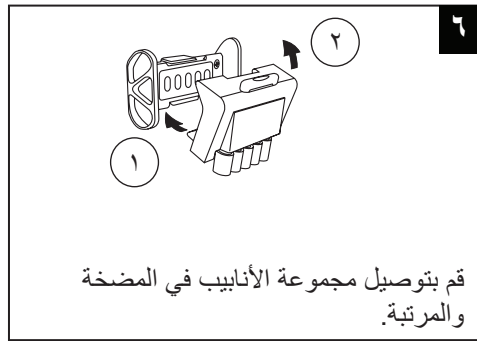
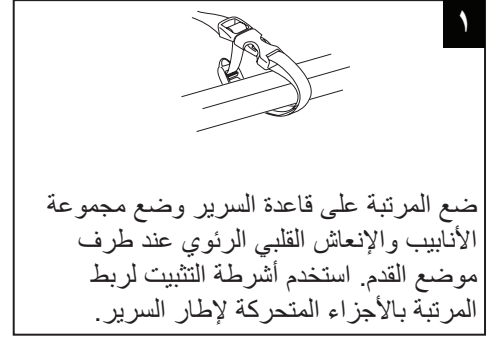






Nimbus 4 & Nimbus Professional

تركيب المرتبة والمضخة


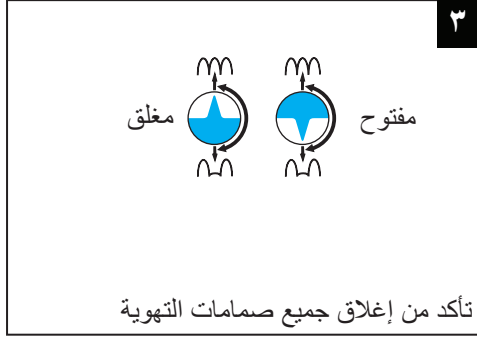


نفخ المرتبة



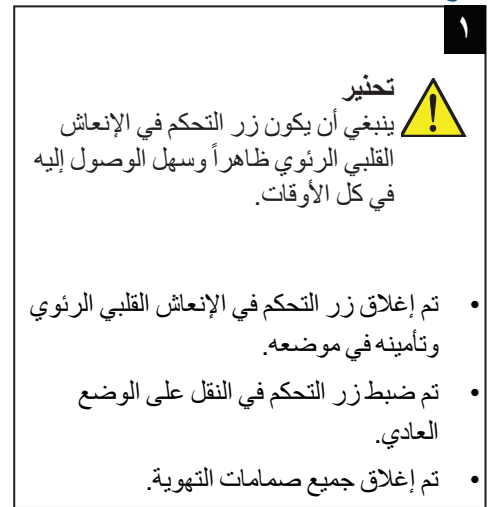


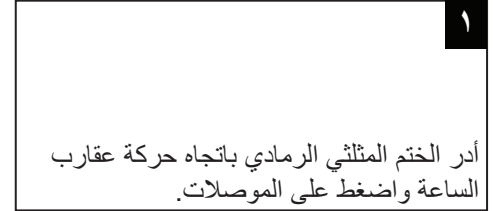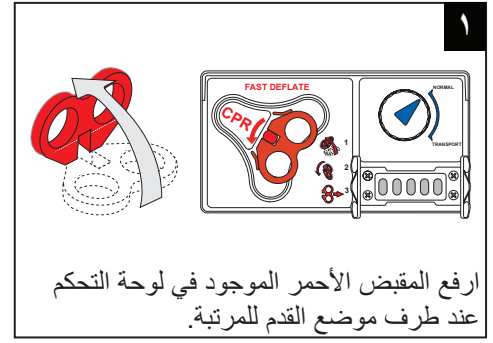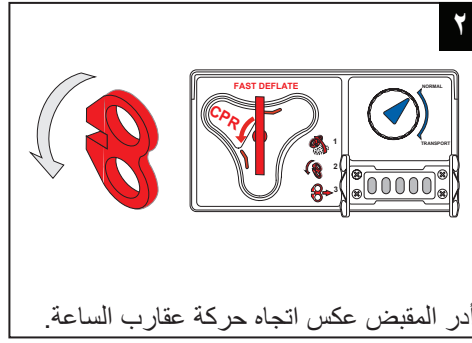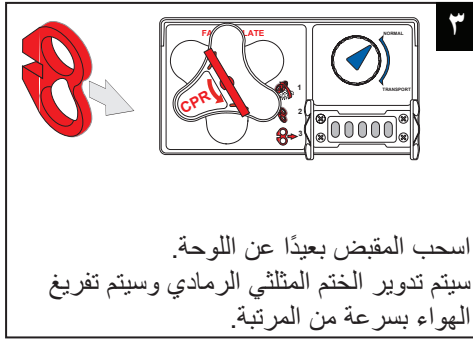

إعادة ضبط الإنعاش القلبي الرئوي

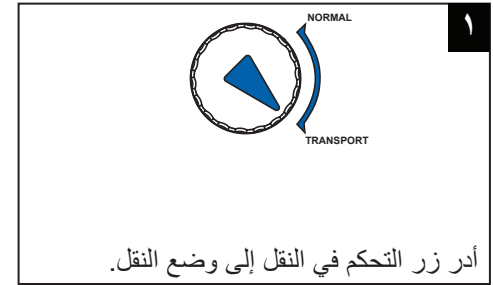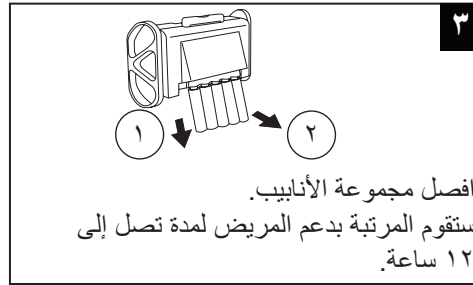

ضبط وضع النقل

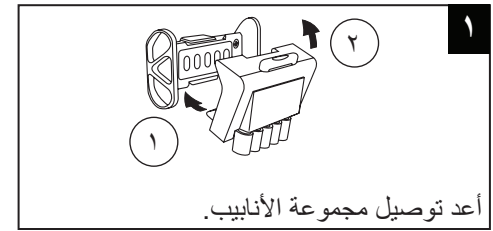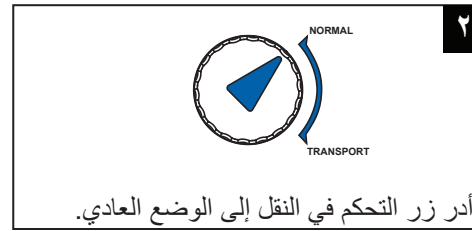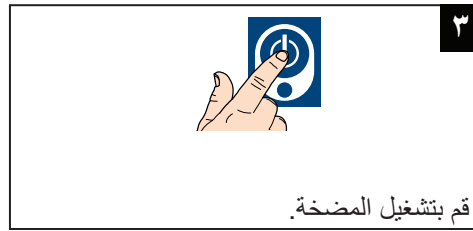

استئناف التشغيل العادي

التطهير الكيميائي

استخدم منظفات تتكون من الكلور مثل هيبوكلوريت الصوديوم، بقوة تُقدر بـ ١٠٠٠ جزء في المليون من الكلور المتاح (قد يتفاوت ذلك من ٢٥٠ جزءاً في المليون إلى ١٠ آلاف جزء في المليون حسب السياسة المحلية وحالة التلوث).

يُمكن استخدام مواد التعقيم المعتمدة على الكحول (بقوة تصل إلى ٧٠٪) بوصفها بديلاً.

في حالة اختيار مطهر بديل، فارجع قبل الاستخدام إلى مورد المواد الكيميائية للتأكد من أن المطهر مناسب للاستخدام.

١. امسح جميع الأسطح التي تم تنظيفها بالمحلول.
٢. امسح باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء.
٣. قم بتجفيفها تماماً.

التطهير الحراري

لتنظيف الغطاء العلوي للمرتبة، راجع الملصق.

التنظيف والتطهير

قم بالتنظيف والتطهير عند الاستخدام بين المرضى على فترات زمنية منتظمة أثناء الاستخدام.

تحذير



قم بإزالة مصدر إمداد الكهرباء الخاص بالمضخة من خلال فصل كابل مصدر التيار الكهربائي من مصدر إمداد طاقة الموصلات الرئيسية قبل التنظيف.

ينبغي دائماً ارتداء الملابس الواقية عند تنفيذ إزالة التلوث.

التنظيف

١. قم بتنظيف جميع الأسطح المكشوفة وإزالة أية شوائب عن طريق المسح باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والمنظفات المحايدة.
٢. قم بتجفيفها تماماً. لا تسمح بتجمع المياه أو محاليل التنظيف على سطح المضخة.