


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Monter madras og pumpe

1

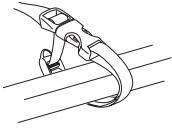


Placer madras på sengebunden, slangesæt og CPR-kontrolenhed i fodenden. Brug fastgørelsesstropperne til at fastgøre madrassen til sengerammens bevægelige dele.

2

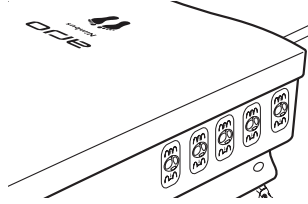


Lyn beskyttelsesbetrækket over madrassen med Arjo-logoet synligt og placeret i fodenden.

3

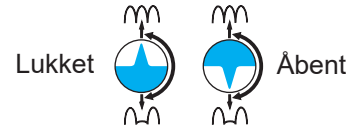


Sørg for, at alle udluftningsventiler er lukkede.

4

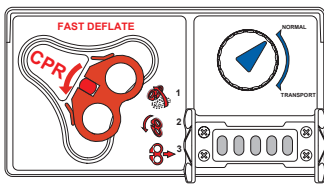


Kontrollér, at betjeningselementet Transport er indstillet til Normal, og at CPR-betjeningselementet er lukket og låst.

5

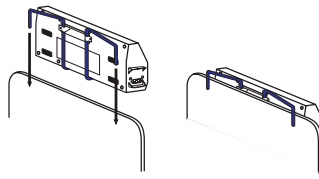


Fastgør sengebeslaget til sengerammen, eller placer pumpen under sengen.

6

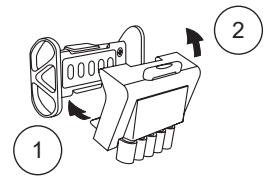

Slut slangesættet til pumpen og madrassen.

7

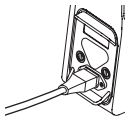


Slut stikket i den anden ende af netledningen til pumpen og til en egnet stikkontakt.

8



ADVARSEL

Netledningen og slangesættet skal placeres, så de ikke kan forårsage fald og er fri af bevægelige sengemekanismer eller andre mulige steder, hvor de kan blive klemte.

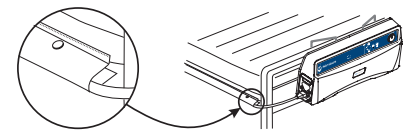

Før strømkablet langs madrassens side, og fastgør holderen rundt om kablet ved hjælp af trykknapperne.

Pump madrassen op

1




ADVARSEL

CPR-betjeningselementet skal altid være synligt og tilgængeligt.


- CPR-kontrolenhed i lukket og låst position.
- Transport-kontrolenhed indstillet til Normal.
- Alle udluftningsventiler lukket.

2

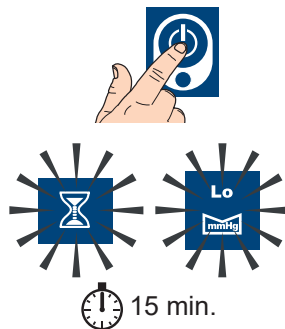

Tryk på Tænd/Standby-knappen. Vent, indtil madrassen er fyldt med luft.


3

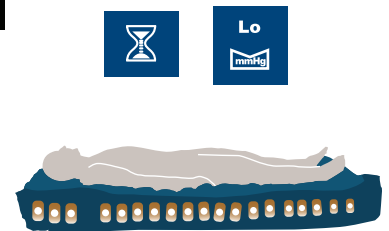

Når Vent-indikatoren og Lavt tryk-indikatoren slukker, lægges plejemodtageren på ryggen på madrassen. Standardindstillingen er driftsfunktionen Dynamisk (vekslende tryk).


Aktivér CPR-enhed

1

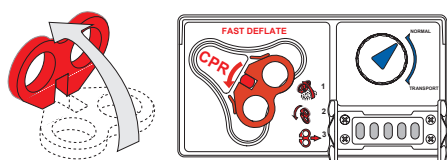


Løft det røde håndtag i betjeningspanelet i fodenden af madrassen opad.

2

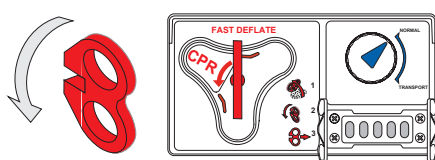

Drej håndtaget imod urets retning.

3

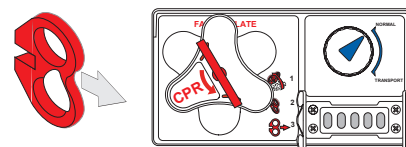

Træk håndtaget væk fra panelet. Den grå trekantsforsegling drejer, og luften tømmes ud af madrassen.

Nulstilling af CPR-enhed

1

Drej den grå trekantsforsegling i urets retning, og tryk den ind i styrene.

2



Drej det røde håndtag i urets retning.


3



Klap håndtaget ind, så det låses på plads.

Indstilling af funktionen Transport

1

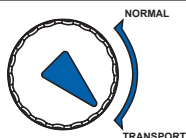


Drej transport-kontrolenheden til Transport.

2



Sluk for pumpen.


3

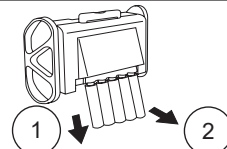

Frakobl slangesættet. Madrassen trykafaster plejemodtageren i op til 12 timer.


Genoptagelse af normal drift

1

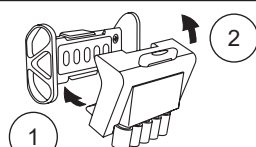

Tilslut slangesættet igen.

2

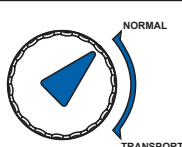

Drej transport-kontrolenheden til Normal.

3



Tænd for pumpen.

Rengøring og desinfektion

Rengør og desinficer mellem hver plejemodtager og med regelmæssige mellemrum under brug.



ADVARSEL

Fjern strømmen til pumpen ved at frakoble strømkablet fra strømforsyningen før rengøring.

Bær beskyttelsestøj ved udførelse af dekontaminering.

Rengøring

1. Rengør alle udsatte overflader, og fjern alle efterladenskaber ved at tørre af med en klud, der er fugtet i en blanding af vand og neutralt rengøringsmiddel.
2. Tør grundigt efter. Vand eller rengøringsopløsninger må ikke kunne samle sig på pumpens overflade.

Kemisk desinfektion

Anvend et klorinfrigørende stof, såsom natriumhypochlorit, fortyndet op til 1.000 ppm klorin (fra 250 til 10.000 ppm alt afhængig af lokal praksis og kontamineringsgraden).

Alkoholbaserede desinfektionsmidler (styrke 70 %) kan bruges som et alternativ.

Såfremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel, skal producenten bekræfte, at det er egnet til den pågældende brug, inden det anvendes.

1. Tør alle rengjorte overflader af med opløsningen.
2. Aftør med en klud, der er fugtet med vand.
3. Tør grundigt efter.

Termisk desinfektion

For vask af madrassens overbetræk, se mærkat.