


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Εγκατάσταση στρώματος και αντλίας

1

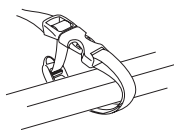


Τοποθετήστε το στρώμα στη βάση κλίνης, με το σύστημα σωλήνων και το CPR (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) στα πόδια της κλίνης. Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες πρόσδεσης για να στερεώσετε το στρώμα στα κινούμενα εξαρτήματα του πλαισίου κλίνης.

2

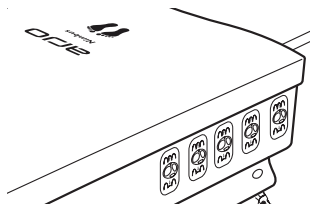


Κλείστε το φερμουάρ του προστατευτικού καλύμματος πάνω από το στρώμα, με το λογότυπο Aijo ορατό, στα πόδια της κλίνης.

3

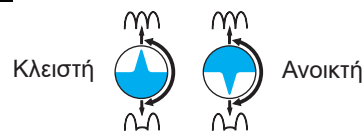


Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες εξαέρωσης είναι κλειστές.

4

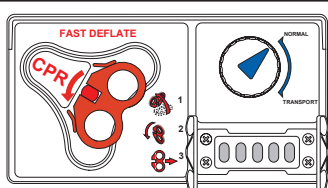


Ελέγξτε ότι το χειριστήριο μεταφοράς έχει ρυθμιστεί στη θέση Κανονικό και ότι το χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) είναι κλειστό και κλειδωμένο στη θέση του.

5

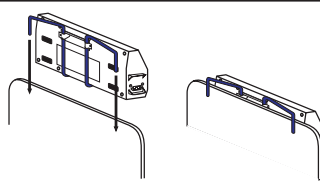


Συνδέστε τον βραχίονα κλίνης στο πλαίσιο κλίνης ή τοποθετήστε την αντλία κάτω από την κλίνη.

6

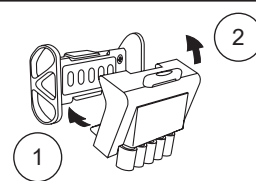

Συνδέστε το σύστημα σωλήνων στην αντλία και το στρώμα.

7

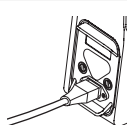


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αντλία και στην πρίζα.

8



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το καλώδιο τροφοδοσίας και το σύστημα σωλήνων πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που δεν προκαλεί κίνδυνο ολίσθησης και μακριά από τους μηχανισμούς κίνησης της κλίνης ή άλλους χώρους παγίδευσης.

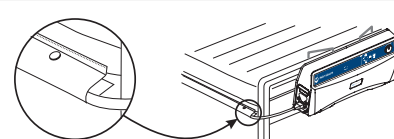

Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά μήκος του στρώματος στερεώνοντας τη θυρίδα γύρω από το καλώδιο με τα κουμπωτά κλιπ.

Φουσκώστε το στρώμα

1




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) πρέπει να είναι συνεχώς ορατό και προσβάσιμο.

- Το χειριστήριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) είναι κλειστό και κλειδωμένο στη θέση του.
- Το χειριστήριο μεταφοράς βρίσκεται στην Κανονική θέση.
- Όλες οι βαλβίδες εξαέρωσης είναι κλειστές.

2

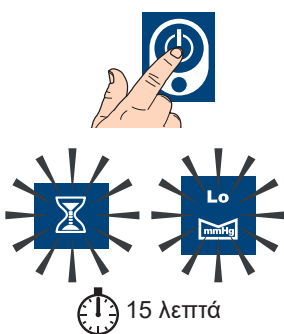

Πατήστε το πλήκτρο Λειτουργίας/ Αναμονής.
Περιμένετε μέχρι το στρώμα να φουσκώσει πλήρως.

3



Όταν οι ενδείξεις Αναμονής και Χαμηλής πίεσης απενεργοποιηθούν, τοποθετήστε τον ασθενή στο στρώμα σε ύπτια (στραμμένο προς τα επάνω) θέση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η Δυναμική λειτουργία (εναλλασσόμενη πίεση).

Ενεργοποιήστε τη μονάδα CPR

1




Ανασηκώστε την κόκκινη λαβή στον πίνακα ελέγχου στο άκρο ποδιών του στρώματος.

2



Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα.

3

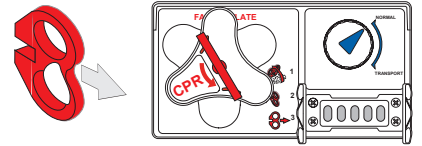

Τραβήξτε τη λαβή μακριά από το πλαίσιο. Η γκρι τριγωνική σφραγίδα περιστρέφεται και ο αέρας εξέρχεται από το στρώμα.

Επαναφορά CPR

1

Γυρίστε την γκρι τριγωνική σφραγίδα δεξιόστροφα και ωθήστε τη στους συνδέσμους.

2



Γυρίστε την κόκκινη λαβή δεξιόστροφα.


3



Διπλώστε τη λαβή για να ασφαλίσει στη θέση της.

Ρύθμιση λειτουργίας μεταφοράς

1

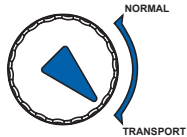


Γυρίστε το χειριστήριο Μεταφοράς στη θέση Μεταφοράς.

2



Απενεργοποιήστε την αντλία.


3

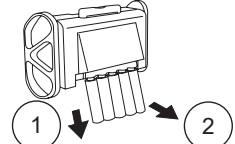

Αποσυνδέστε το σύστημα σωλήνων. Το στρώμα στηρίζει τον ασθενή για μέχρι και 12 ώρες.


Αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας

1

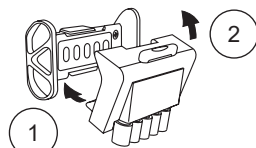

Επανασυνδέστε το σύστημα σωλήνων.

2

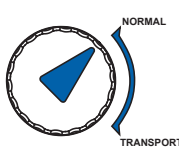

Γυρίστε το χειριστήριο Μεταφοράς στην Κανονική θέση.

3



Ενεργοποιήστε την αντλία.

Καθαρισμός και απολύμανση

Πραγματοποιήστε καθαρισμό και απολύμανση μεταξύ των ασθενών και σε τακτικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της αντλίας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό.

Πρέπει να φοράτε πάντοτε προστατευτικό ρουχισμό κατά την πραγματοποίηση απολύμανσης.

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες και απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα σκουπίζοντας με πανί βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό.
- Στεγνώστε σχολαστικά. Μην αφήνετε νερό ή καθαριστικά διαλύματα να συσσωρεύονται στην επιφάνεια της αντλίας.

Χημική απολύμανση

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό με χλώριο, όπως το υποχλωριώδες νάτριο, δραστηριότητας 1.000 ppm διαθέσιμου χλωρίου (από 250 ppm έως 10.000 ppm ανάλογα με την τοπική πολιτική και την κατάσταση της μόλυνσης).

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά με βάση την αλκοόλη (δραστηριότητα 70%).

Εάν επιλεγθεί εναλλακτικό απολυμαντικό, επιβεβαιώστε την καταλληλότητα χρήσης με τον προμηθευτή του χημικού, πριν από τη χρήση.

- Σκουπίστε όλες τις καθαρισμένες επιφάνειες με το διάλυμα.
- Σκουπίστε με ένα πανί το οποίο έχετε βρέξει με νερό.
- Στεγνώστε σχολαστικά.

Θερμική απολύμανση

Για τον καθαρισμό του άνω καλύμματος του στρώματος, ανατρέξτε στην ετικέτα.