


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Pasang kasur dan pompa

1

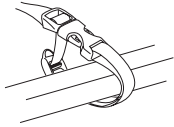


Tempatkan kasur di atas rangka ranjang, rangkaian selang, dan CPR pada bagian ujung kaki. Gunakan sabuk pengencang untuk memasang kasur ke bagian rangka ranjang yang bergerak.

2

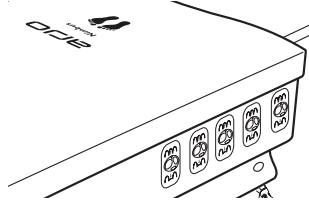


Rapatkan penutup pelindung di atas kasur, pastikan logo Arjo terlihat dan terletak pada bagian ujung kaki.

3

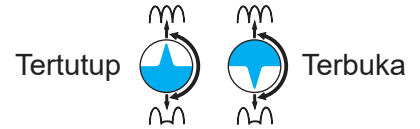


Pastikan semua Katup Ventilasi dalam keadaan tertutup

4

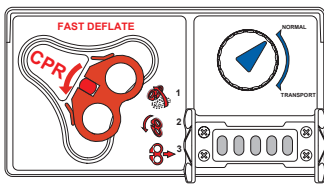


Pastikan bahwa kontrol angkut ditetapkan ke Normal dan kontrol CPR tertutup dan terkunci pada posisinya.

5

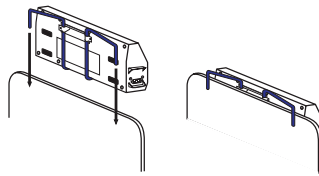


Pasangkan braket ranjang ke bingkai ranjang, atau letakkan pompa di bawah ranjang.

6

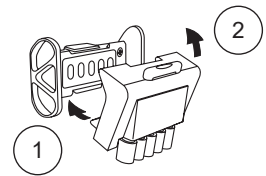

Hubungkan rangkaian selang ke pompa dan kasur.

7

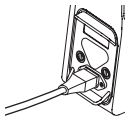


Hubungkan kabel daya listrik ke pompa dan ke stopkontak listrik.

8



PERINGATAN

Kabel daya listrik dan rangkaian selang harus diposisikan sedemikian rupa untuk menghindari risiko bahaya tersandung, dan dijauhkan dari mekanisme pergerakan ranjang atau area lainnya yang bisa menjepit kabel.

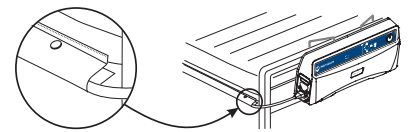

Atur kabel daya listrik sepanjang sisi kasur dengan mengamankan flap di sekitar kabel menggunakan kancing tekan.

Pompa dan kembangkan kasur

1




PERINGATAN

Kontrol CPR harus bisa terlihat dan mudah diakses setiap saat.


- Kontrol CPR tertutup dan terkunci pada posisinya.
- Kontrol angkut ditetapkan ke Normal.
- Semua Katup Ventilasi tertutup.

2

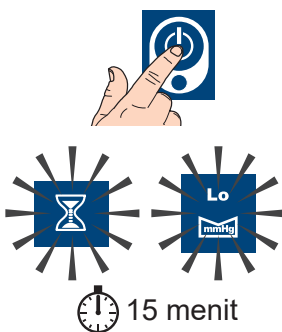

Tekan tombol Operasi/Siaga. Tunggu hingga kasur terpompa penuh.


3

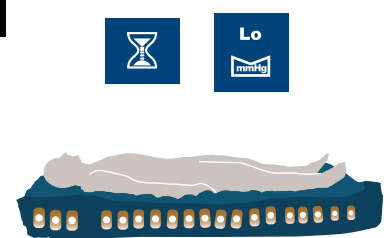

Setelah indikator Tunggu dan Tekanan Rendah mati, letakkan pasien di atas kasur dalam posisi telentang (menghadap ke atas). Pengaturan default-nya adalah mode Dinamis (tekanan bergantian).


Aktifkan CPR

1

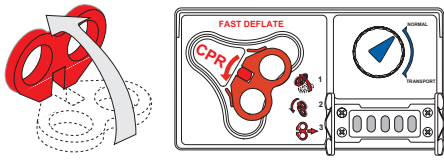


Angkat tangkai merah pada panel kontrol di ujung kaki kasur.

2

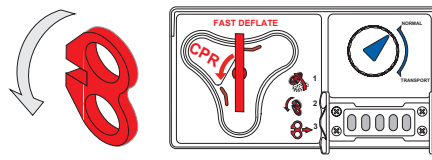

Putar tangkai berlawanan arah jarum jam.

3

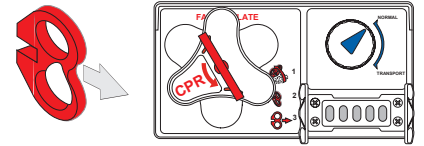

Tarik tangkai menjauhi panel. Segel segitiga abu-abu berputar dan udara dikeluarkan dari kasur.

Atur Ulang CPR

1

Putar segel segitiga abu-abu searah jarum jam dan dorong ke konektor.

2



Putar tangkai merah searah jarum jam.


3



Lipat tangkai rata hingga terkunci pada posisinya.

Tetapkan mode angkut

1

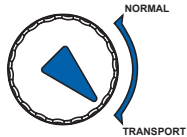


Putar kontrol Angkut ke Angkut.

2



Matikan pompa.


3

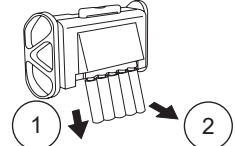

Melepas rangkaian selang. Kasur bisa menyangga pasien hingga 12 jam.


Lanjutkan pengoperasian normal

1

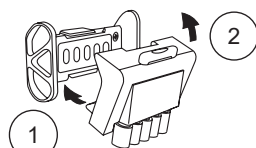

Hubungkan kembali rangkaian selang.

2

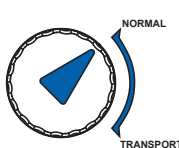

Putar kontrol Angkut ke Normal.

3



Nyalakan pompa.

Pembersihan dan desinfeksi

Bersihkan dan lakukan desinfeksi saat jeda penggunaan oleh pasien dan secara berkala.



PERINGATAN

Putuskan pasokan listrik ke pompa dengan melepas kabel sumber listrik dari catu daya sumber listrik sebelum membersihkan sistem. Pakaian pelindung harus selalu dikenakan pada saat melakukan dekontaminasi.

Pembersihan

1. Bersihkan semua permukaan yang terpapar dan hilangkan kotoran dengan menyekanya menggunakan kain yang dibasahi dengan detergen netral dan air.
2. Keringkan secara menyeluruh. Jangan biarkan air atau cairan pembersih menumpuk pada permukaan pompa.

Desinfeksi kimia

Gunakan bahan yang melepaskan klorin, seperti natrium hipoklorit, dengan kekuatan 1.000 ppm klorin yang tersedia (dari 250 ppm hingga 10.000 ppm, tergantung pada kebijakan setempat dan status kontaminasi). Disinfektan berbasis alkohol (kekuatan maksimum 70%) dapat digunakan sebagai alternatif.

Jika suatu disinfektan alternatif dipilih, konfirmasi kesesuaian penggunaannya dengan pemasok bahan kimia sebelum menggunakannya.

1. Seka semua permukaan yang telah dibersihkan dengan larutan tersebut.
2. Seka dengan kain yang dilembapkan dengan air.
3. Keringkan secara menyeluruh.

Desinfeksi termal

Untuk mencuci penutup atas kasur, lihat label.