


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Het matras en de pomp plaatsen

1

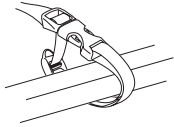


Plaats het matras op het bed, met de slangenset en CPR aan het voeteneinde. Gebruik de fixatiebanden om het matras aan de bewegende delen van het bedkader vast te maken.

2

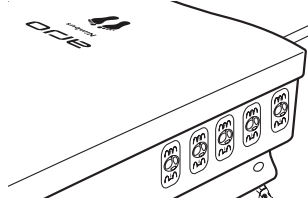


Rits de beschermhoes over het matras met het Arjo-logo naar boven en aan het voeteneinde.

3

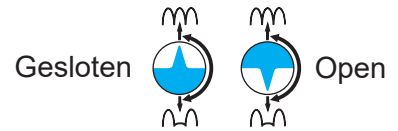


Zorg ervoor dat alle ontluuchtingsventielen gesloten zijn.

4

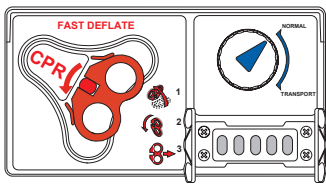


Controleer of de transportknop op Normaal staat en de CPR-bediening gesloten is en in die positie is vergrendeld.

5

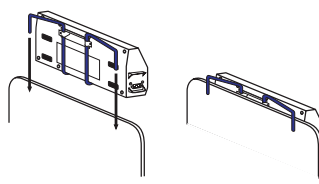


Bevestig het bedhek aan het bedkader, of zet de pomp onder het bed.

6

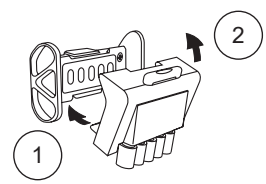

Sluit de slangenset aan op de pomp en het matras.

7

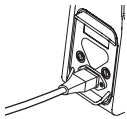


Sluit het netsnoer aan op de pomp en een stopcontact.

8



WAARSCHUWING

Het netsnoer en de slangenset moeten zo worden geplaatst dat struikelgevaar wordt vermeden en dat ze niet in de buurt komen van bewegende bedmechanismen of andere plaatsen waar ze kunnen vast komen te zitten.

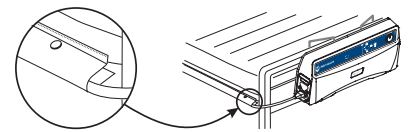

Leid het netsnoer langs het matras en bevestig de flap rond de kabel met behulp van de drukknopjes.

Het matras opblazen

1




WAARSCHUWING

De CPR-bediening moet te allen tijde zichtbaar en toegankelijk zijn.


- CPR-bediening gesloten en in positie vergrendeld.
- Transportknop op Normaal.
- Alle ontluuchtingsventielen gesloten.

2

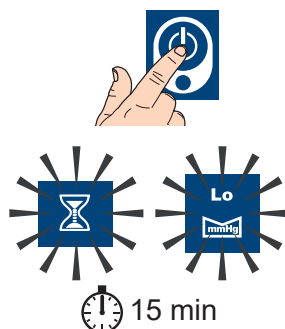

Druk op de knop Aan/Stand-by. Wacht tot het matras volledig opgeblazen is.


3

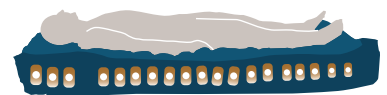

Plaats de zorgvrager in rugligging (gezicht naar boven) op het matras zodra het Wacht- en Lage druk-indicatielampje niet meer branden. De standaardinstelling is Dynamische stand (alternerende druk).


De CPR activeren

1

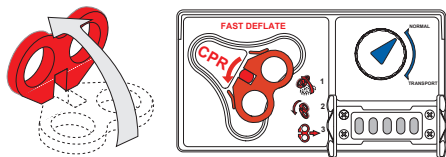


Til de rode hendel op het bedieningspaneel aan het voeteneinde van het matras omhoog.

2

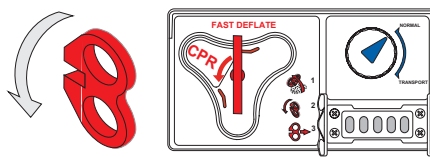

Draai de hendel tegen de klok in.

3

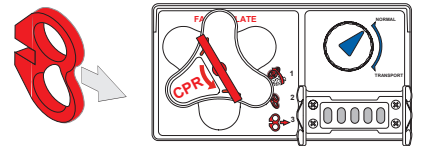

Trek de hendel weg van het paneel. De grijze driehoekige afsluiting gaat draaien en de lucht ontsnapt uit het matras.

De CPR opnieuw instellen

1

Draai de grijze driehoekige afsluiting met de klok mee en druk op de verbindingen.

2



Draai de rode hendel met de klok mee.


3



Vouw de hendel plat tegen de vergrendelingspositie.

De transportstand inschakelen

1

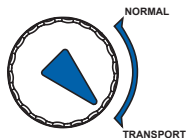


Draai de Transport-knop naar de stand Transport.

2



Zet de pomp uit.


3

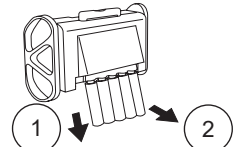

Koppel de slangenset los. Het matras ondersteunt de zorgvrager tot 12 uur lang.


De normale werking weer hervatten

1

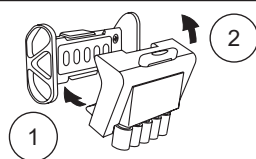

Sluit de slangenset opnieuw aan.

2

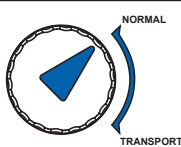

Draai de Transport-knop naar de stand Normaal.

3



Zet de pomp aan.

Reinigen en desinfectie

Reinig en desinfecteer tussen zorgvragers en op regelmatige intervallen tijdens het gebruik.



WAARSCHUWING

Voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet u de netvoeding naar de pomp onderbreken door de netvoedingskabel uit het stopcontact te halen.

Draag altijd beschermende kleding als u desinfecteerwerkzaamheden uitvoert.

Reinigen

1. Reinig alle blootgestelde oppervlakken en verwijder eventueel vuil met een doek bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel en water.
2. Goed laten drogen. Laat geen water of reinigingsmiddelen achter op de behuizing van de pomp.

Chemische desinfectie

Gebruik een chloorhoudend middel, zoals natriumhypochloriet, met een sterkte van 1.000 ppm beschikbaar chloor (van 250 ppm tot 10.000 ppm, afhankelijk van het interne beleid en de mate van besmetting).

Als alternatief kunnen desinfectiemiddelen op basis van alcohol (sterkte 70%) worden gebruikt.

Bevestig de geschiktheid voor gebruik bij de leverancier van het middel als een alternatief desinfectiemiddel is geselecteerd.

1. Neem alle schoongemaakte oppervlakken af met de oplossing.
2. Neem af met een met water bevochtigde doek.
3. Goed laten drogen.

Thermische desinfectie

Raadpleeg het etiket voor het wassen van de bovenhoes van het matras.