


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Instalar o colchão e a bomba

1

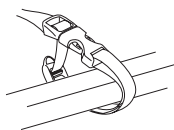


Coloque o colchão na base da cama e o conjunto de tubos e o RCP no lado dos pés. Use as correias de fixação para prender o colchão às partes móveis da estrutura de cama.

2

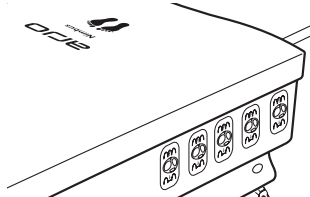


Feche a cobertura de proteção sobre o colchão com o logótipo da Arjo visível e localizado no lado dos pés.

3

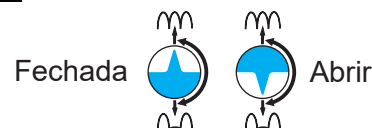


Certifique-se de que todas as válvulas de ventilação estão fechadas.

4

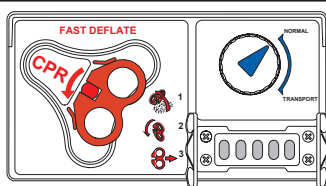


Verifique se o Controlo para o transporte está na posição Normal e se o Controlo de RCP está fechado e trancado na posição.

5

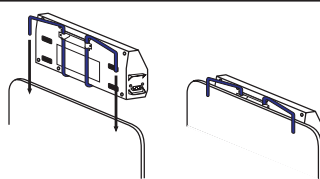


Prenda o suporte da cama à estrutura de cama, ou coloque a bomba debaixo da cama.

6

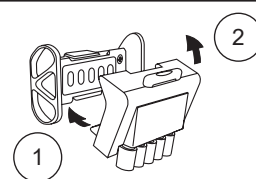

Ligue o conjunto de tubos à bomba e ao colchão.

7

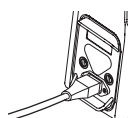


Ligue o cabo elétrico à bomba e à tomada.

8



AVISO

O cabo elétrico e o conjunto de tubos devem estar posicionados de forma a evitar o perigo de tropeções e afastados de mecanismos móveis da cama ou de outras zonas de entalamento.

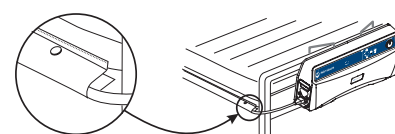

Passe o cabo elétrico ao longo do colchão, fechando a passadeira à volta do cabo, utilizando os botões de mola.

Encha o colchão

1




AVISO

O controlo RCP deve estar visível e acessível a qualquer momento.


- Controlo RCP fechado e trancado em posição.
- O Controlo para o transporte está na posição Normal.
- Todas as válvulas de ventilação fechadas.

2

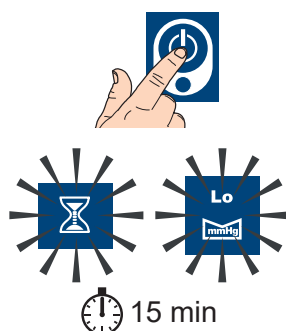

Prima o botão Executar/Em espera. Aguarde até o colchão estar completamente cheio.


3

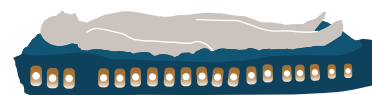

Assim que os indicadores Aguardar e Pressão baixa se apagarem, coloque o paciente no colchão na posição de decúbito dorsal (virado para cima). A predefinição é o modo Dinâmico (pressão alternada).


Ativar o RCP

1

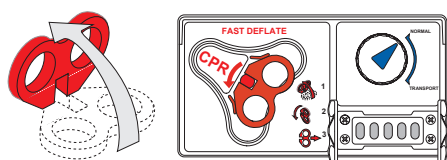


Levante o manípulo vermelho do painel de controlo, situado no lado dos pés do colchão.

2

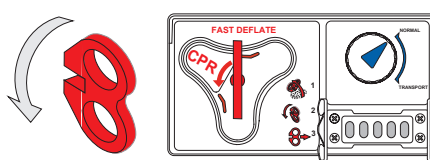

Rode o manípulo para a esquerda.

3

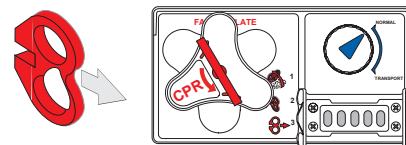

Puxe o manípulo para fora do painel.
O vedante triangular cinzento roda e o ar é expelido do colchão.

Repor o RCP

1

Rode o vedante triangular cinzento para a direita e encaixe-o nos ligadores.

2



Rode o manípulo vermelho para a direita.


3



Dobre o manípulo para baixo para o trancar na posição.

Colocar em modo de transporte

1

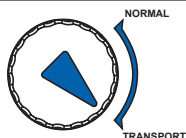


Rode o Controlo para o transporte para a posição Transporte.

2



Desligue a bomba.


3

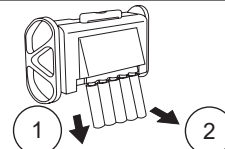

Desligue o conjunto de tubos. O colchão suporta o paciente até 12 horas.


Retomar o funcionamento normal

1

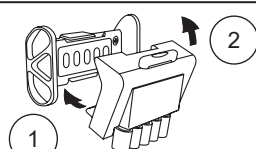

Ligue de novo o conjunto de tubos.

2

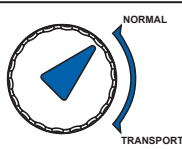

Rode o Controlo para o transporte para a posição Normal.

3



Ligue a bomba.

Limpeza e desinfeção

Limpe e desinfete entre pacientes e a intervalos regulares, enquanto estiver em uso.



AVISO

Desligue a alimentação elétrica da bomba, retirando a ficha da tomada elétrica antes de proceder à limpeza.

Deve utilizar sempre vestuário protetor quando realizar descontaminações.

Limpeza

1. Limpe todas as superfícies expostas e remova qualquer resíduo limpando com um pano humedecido com um detergente neutro e água.
2. Seque cuidadosamente. Não permita que a água ou as soluções de limpeza se acumulem na superfície da bomba.

Desinfeção química

Use um agente de cloro, tal como hipoclorito de sódio, com uma concentração de cloro disponível de 1 000 ppm (de 250 ppm a 10 000 ppm consoante a política local e o estado de contaminação).

Podem ser utilizados, em alternativa, desinfetantes à base de álcool (com uma concentração de 70 %).

Se selecionar um desinfetante alternativo, antes de utilizar, confirme com o fornecedor do produto químico que é adequado para utilização.

1. Passe a solução em todas as superfícies limpas.
2. Passe com um pano humedecido em água.
3. Seque cuidadosamente.

Desinfeção térmica

Para a lavagem da cobertura de cima do colchão, veja a etiqueta.