


# Nimbus 4 & Nimbus Professional


## Instalarea saltelei și a pompei

1

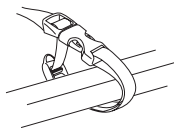


Așezați salteaua pe baza patului, cu setul de furtunuri și butonul pentru RCP la capătul pentru picioare. Folosiți curelele de fixare pentru a prinde salteaua de părțile mobile ale cadrului patului.

2

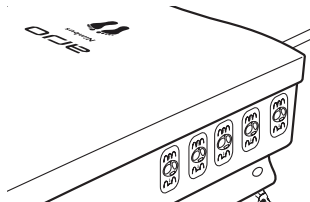


Închideți cu fermoarul husa de protecție peste saltea, cu sigla Arjo vizibilă și situată la capătul pentru picioare.

3

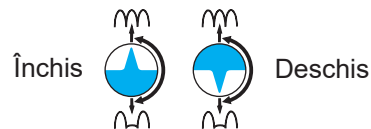


Asigurați-vă că toate supapele de evacuare sunt închise.

4

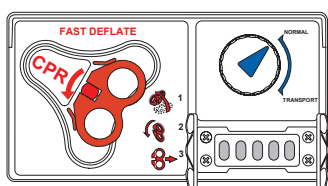


Verificați dacă butonul de comandă pentru transport este setat la Normal, iar butonul de comandă pentru RCP se află în poziție închisă și blocat.

5

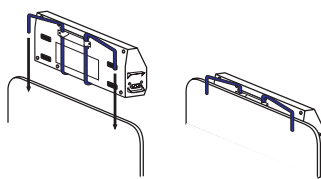


Prindeți suportul de cadrul patului sau așezați pompa sub pat.

6

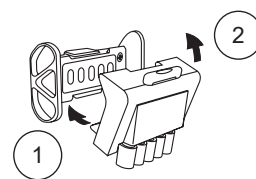

Conectați setul de furtunuri la pompa și la saltea.

7

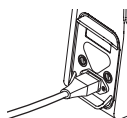


Conectați cablul de alimentare la pompă și la priza de alimentare.

8



### AVERTISMENT

Cablul de alimentare și setul de furtunuri trebuie poziționate în așa fel încât să se evite pericolul de împiedicare și să se afle la distanță față de mecanismele mobile ale patului sau de alte zone unde s-ar putea bloca.

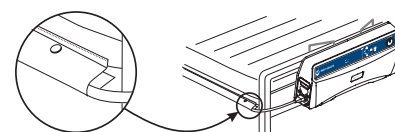

Treceți cablul de alimentare de-a lungul părții laterale a saltelei, prinzând clapeta în jurul cablului cu ajutorul capselor.

## Umflarea saltelei

1




### AVERTISMENT

Butonul de comandă pentru RCP trebuie să fie la vedere și accesibil în orice moment.


- Butonul de comandă pentru RCP este în poziție închisă și blocat.
- Butonul de comandă pentru transport este setat la Normal.
- Toate supapele de evacuare sunt închise.

2

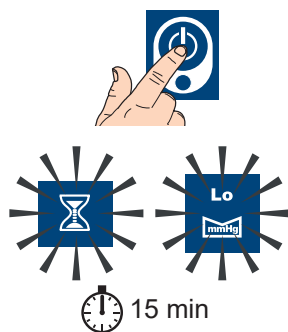

Apăsați butonul Funcționare/Standby. Așteptați ca salteaua să se umfle complet.


3

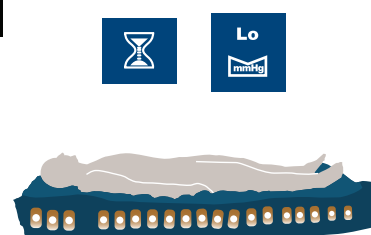

După ce se sting indicatorii pentru Așteptare și Presiune scăzută, așezați pacientul pe saltea în poziția culcat pe spate (cu fața în sus). Setarea implicită este în modul Dinamic (presiune alternantă).


## Activarea unității RCP

1

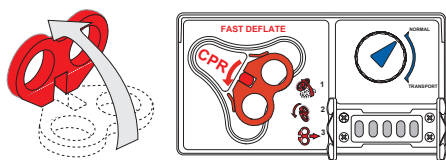


Ridicați maneta roșie de pe panoul de comandă de la capătul pentru picioare al saltei.

2

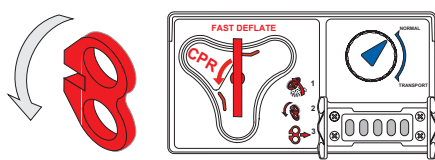

Rotiți maneta în sensul invers acelor de ceasornic.

3

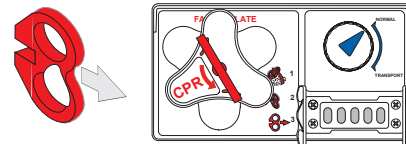

Trageți maneta din panou. Garnitura triunghiulară gri se va roti, iar aerul va ieși din saltea.

## Resetarea unității RCP

1

Rotiți garnitura gri triunghiulară în sensul acelor de ceasornic și apăsați-o pe conectori.

2



Rotiți maneta roșie în sensul acelor de ceasornic.


3



Plișați maneta pentru a o bloca în poziție.

## Setarea în modul Transport

1

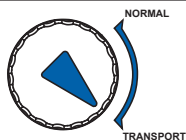


Rotiți butonul de comandă pentru transport la Transport.

2



Oprii pompa.


3

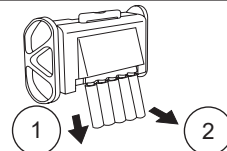

Deconectați setul de furtunuri. Salteaua susține pacientul timp de maximum 12 ore.


## Reluarea funcționării normale

1

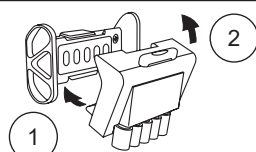

Reconectați setul de furtunuri.

2

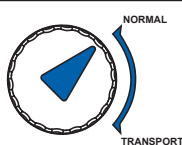

Rotiți butonul de comandă pentru transport la Normal.

3



Porniți pompa.

## Curățarea și dezinfectarea

Curățați și dezinfectați după fiecare pacient și periodic pe durata utilizării.



### AVERTISMENT

Înainte de curățare, întrerupeți alimentarea electrică a pompei, decuplând cablul de alimentare de la rețeaua de alimentare.

Pe durata procedurii de decontaminare trebuie purtată întotdeauna îmbrăcăminte de protecție.

### Curățarea

1. Curățați toate suprafețele expuse și îndepărtați orice resturi folosind o lavetă înmuiată în soluție cu detergent neutru și apă.
2. Uscați bine. Nu lăsați apa ori soluțiile de curățare să se adune pe suprafața pompei.

### Dezinfectarea chimică

Folosiți un agent pe bază de clor, precum hipocloritul de sodiu, în concentrație de 1.000 ppm clor activ (între 250 ppm și 10.000 ppm, în funcție de politica locală și starea de contaminare).

Se pot folosi ca soluție alternativă dezinfectanți pe bază de alcool (70% concentrație).

În cazul alegerii unui dezinfectant alternativ, înainte de a-l utiliza, contactați furnizorul produsului pentru a verifica dacă este adecvat pentru a fi folosit.

1. Ștergeți toate suprafețele curățate cu această soluție.
2. Ștergeți cu o lavetă înmuiată în apă.
3. Uscați bine.

### Dezinfectarea termică

Consultați eticheta pentru instrucțiuni referitoare la spălarea husei saltelei în mașina de spălat.