


Nimbus 4 & Nimbus Professional


Inštalácia matraca a pumpy

1

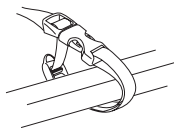


Matrac položte na základňu lôžka tak, aby boli súprava hadičiek a CPR na nožnom konci. Pomocou upevňovacích popruhov matrac pripevnite k pohyblivým častiam rámu lôžka.

2

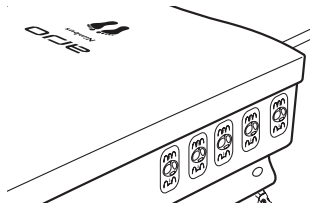

K matracu zipsom upevnite ochranný poťah tak, aby bolo logo Arjo viditeľné a na nožnom konci.

3

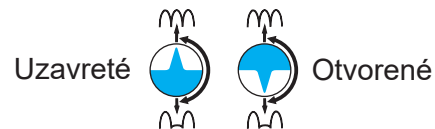


Uzavreté

Otvorené


Uistite sa, že sú všetky vetracie ventily uzavreté.

4

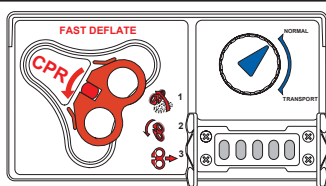


Skontrolujte, či je ovládač transportu nastavený v polohe Normal a ovládač CPR je uzavretý a v zaistenej polohe.

5

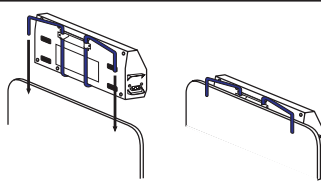


K rámu lôžka pripevnite konzolu lôžka alebo pumpu položte pod lôžko.

6

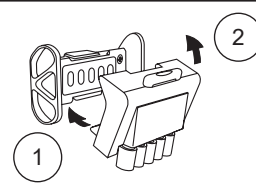

K pumpe a k matracu pripojte súpravu hadičiek.

7

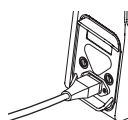


Napájací kábel pripojte k pumpe a k elektrickej zásuvke.

8



VAROVANIE

Napájací kábel a súprava hadičiek musia byť umiestnené tak, aby ste zabránili riziku zakopnutia a aby boli v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých mechanizmov lôžka či iných oblastí, kde by mohlo dôjsť k ich zachyteniu.

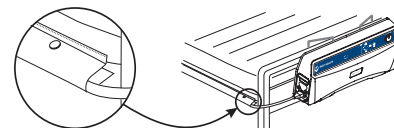

Napájací kábel vedte pozdĺž bočnej strany matraca, pričom zaistíte príklop okolo kábla pomocou tlakových čapov.

Nafúknutie matraca

1




VAROVANIE

Ovládač CPR musí byť vždy viditeľný a prístupný.

- Ovládač CPR je uzavretý a v zaistenej polohe.
- Ovládač transportu je nastavený v polohe Normal.
- Všetky vetracie ventily sú uzavreté.

2

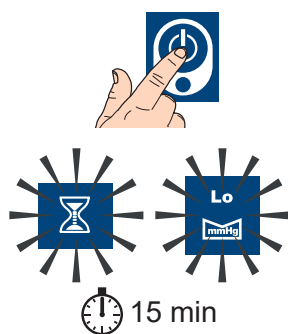

15 min

Stlačte tlačidlo spustenia/pohotovostného režimu. Počkajte, kým sa matrac úplne nenafúkne.


3



Keď zhasnú indikátory čakania a nízkeho tlaku, pacienta/klienta umiestnite na matrac v polohe poležiačky (tvárou nahor). Predvolene je nastavený dynamický režim (striedavý tlak).


Aktivácia CPR

1

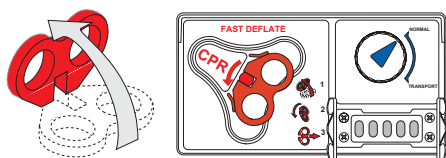


Zdvihnite červenú rukoväť na ovládacom paneli na nožnom konci matraca.

2

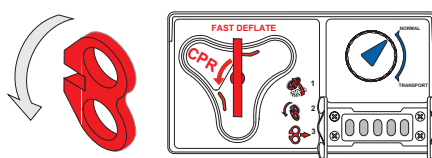

Rukoväť otáčajte proti smeru chodu hodinových ručičiek.

3

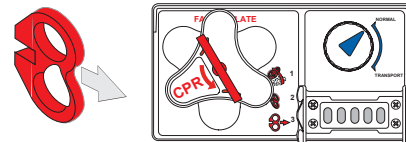

Rukoväť ťahajte smerom od panelu. Sivé trojuholníkové tesnenie sa otáča a vzduch uniká z matraca.

Resetovanie CPR

1

Sivé trojuholníkové tesnenie otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek a zatlačte ho na konektory.

2



Červenú rukoväť otáčajte v smere chodu hodinových ručičiek.


3



Rukoväť sklopte naplocho do zaistenej polohy.

Nastavenie režimu transportu

1

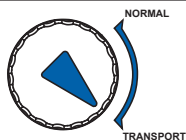


Ovládač transportu nastavte do polohy Transport.

2



Vypnite pumpu.


3

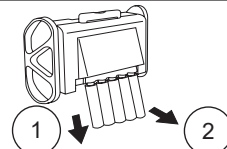

Odpojte súpravu hadičiek. Matrac bude pacientovi/klientovi poskytovať oporu 12 hodín.


Obnovenie bežnej prevádzky

1

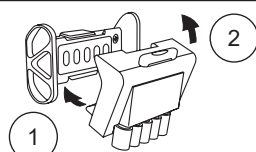

Znova pripojte súpravu hadičiek.

2

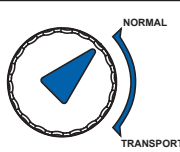

Ovládač transportu otočte do polohy Normal.

3



Zapnite pumpu.

Čistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia sa musia vykonať po každom pacientovi/klientovi a v pravidelných intervaloch počas používania.



VAROVANIE

Pred čistením odpojte napájanie pumpy odpojením napájacieho kábla od zdroja elektrickej energie.

Pri vykonávaní dekontaminácie by ste mali vždy používať ochranný odev.

Čistenie

1. Všetky vonkajšie povrchy vyčistite a odstráňte akékoľvek nečistoty tak, že ich utriete tkaninou navlhčenou vo vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
2. Dôkladne vysušte. Nedovoľte, aby sa na povrchu pumpy usadila voda alebo čistiace prostriedky.

Chemická dezinfekcia

Použite prípravok uvoľňujúci chlór, napríklad chlórnan sodný, so silou 1 000 ppm voľného chlóru (od 250 ppm do 10 000 ppm v závislosti od miestnych predpisov a stavu kontaminácie).

Alternatívne je možné použiť dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu (koncentrácia 70 %).

Ak sa rozhodnete použiť alternatívny dezinfekčný prostriedok, pred použitím si jeho vhodnosť overte s dodávateľom chemikálií.

1. Utrite všetky povrchy čistené roztokom.
2. Utrite s tkaninou navlhčenou vo vode.
3. Dôkladne vysušte.

Tepelná dezinfekcia

Pokyny na pranie vrchného poťahu matraca nájdete na štítku.