


# Nimbus 4 & Nimbus Professional



## Установка матраса и насоса

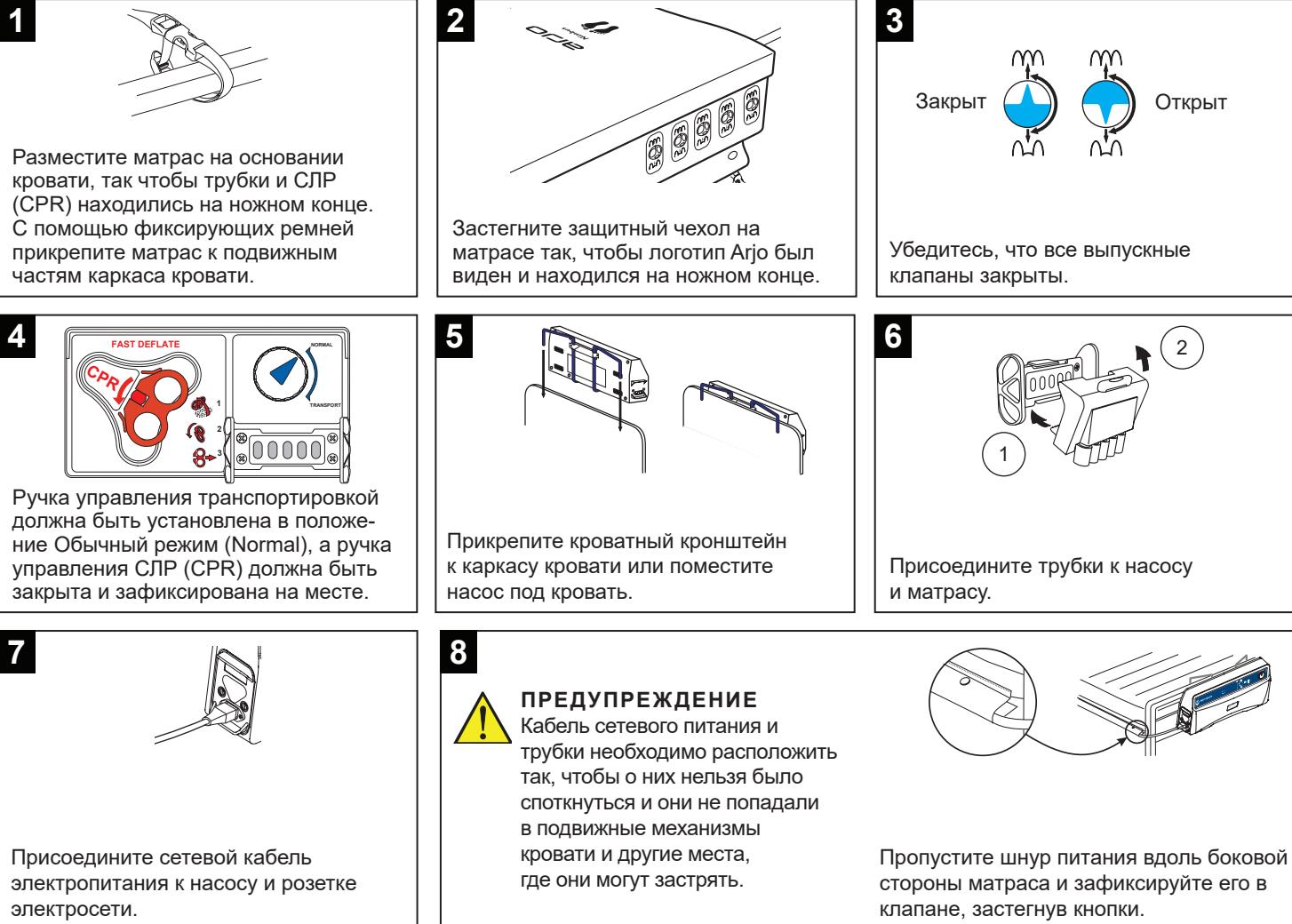


## Накачивание матраса



## Включение СЛР (CPR)

1

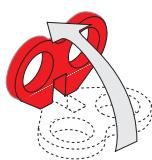

Поднимите красную ручку на панели управления в ножном конце матраса.

2



Поверните ручку против часовой стрелки.

3



Потяните ручку в противоположную от панели сторону.  
Серая треугольная заслонка повернется, и воздух выйдет из матраса.

## Сброс СЛР (CPR)

1

Поверните серую треугольную заслонку по часовой стрелке и толкните в разъем.

2



Поверните красную ручку по часовой стрелке.


3



Зафиксируйте ручку в этом положении.

## Переключение в режим транспортировки

1

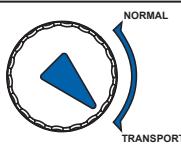


Поверните ручку управления транспортировкой в положение Транспортировка (Transport).

2



Отключите насос.


3

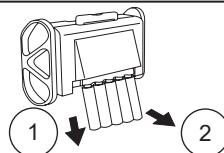

Отсоедините трубы.  
Матрас обеспечивает опору для пациента до 12 часов.


## Восстановление обычного режима работы

1

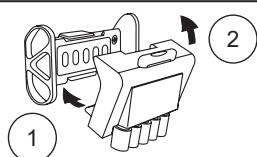

Снова подключите трубы.

2

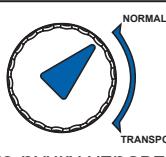

Поверните ручку управления транспортировкой в положение Обычный режим (Normal).

3



Включите насос.

## Очистка и дезинфекция

В процессе использования проводите очистку и дезинфекцию после каждого пациента, а также с регулярными интервалами.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением очистки отключите помпу от электрической сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

При проведении дезинфекции необходимо надевать защитную одежду.

## Очистка

1. Очистите все поверхности, подверженные загрязнению, и протрите поверхность тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве и воде, чтобы удалить загрязнения.
2. Вытряните насухо. Не допускайте скопления воды или чистящего раствора на поверхности помпы.

## Химическая дезинфекция

Используйте выделяющий хлор реагент, например гипохлорит натрия с концентрацией хлора 1000 ppm (концентрация может варьироваться от 250 до 10 000 ppm в зависимости от местных норм и интенсивности загрязнения).

В качестве альтернативного варианта могут быть использованы дезинфицирующие средства на основе спирта (концентрация 70 %).

При выборе альтернативного дезинфицирующего средства перед использованием следует получить подтверждение пригодности к использованию от поставщика химического средства.

1. Протрите все очищаемые поверхности раствором.
2. Протрите тряпкой, смоченной в воде.
3. Вытряните насухо.

## Термическая дезинфекция

Инструкции по стирке чехла матраса см. на этикетке.



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsensgatan 10  
211 20 Malmö, Sweden

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)