


Maxi Move

A partir de uma cadeira

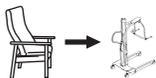

1

Coloque a funda à volta do paciente. Coloque as extensões das pernas no lado de dentro das coxas.

2

Manípulo de posicionamento orientado para o exterior em relação ao paciente. Barra de suporte ao nível dos ombros.

3

NÃO acione o travão

4

Prenda corretamente os ganchos da extensão dos ombros à barra de suporte.

5

Pressione o manípulo de posicionamento e prenda corretamente os ganchos da extensão das pernas à barra de suporte.

6

Prenda os ganchos das pernas direitas (A). Nota! Se o paciente tiver predisposição para tentar libertar-se, prenda os ganchos das pernas cruzados (B).

7

Utilize o comando manual para elevar e ajustar o paciente.

8

Afaste o elevador da cadeira. Transfira o paciente.



1

Verifique que debaixo da cama há espaço para as pernas do chassi.

2

Coloque a funda por baixo do paciente.

3

Zona da funda para apoio da cabeça, por baixo do pescoço do paciente.

4

Aproxime-se da cama, com o lado aberto da barra de suporte virado para a cabeça do paciente. Ajuste a largura das pernas do chassi, se necessário.

5

Coloque a barra de suporte centrada sobre o paciente.

6

Utilize o manípulo de posicionamento para inclinar a barra de suporte. Prenda corretamente os ganchos da extensão dos ombros à barra de suporte.

7

Pressione o manípulo de posicionamento e prenda corretamente os ganchos da extensão das pernas por baixo das coxas à barra de suporte.

8

Eleve e transfira o paciente.