


Inserire e disinserire il freno

Inserire il freno




Solo per stoccaggio e inclinazione. Non inserire i freni quando si solleva un paziente in altro modo.

Disinserire il freno

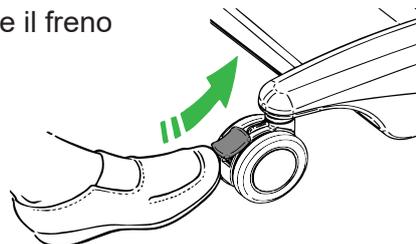


Pannello di controllo e pulsantiera di controllo

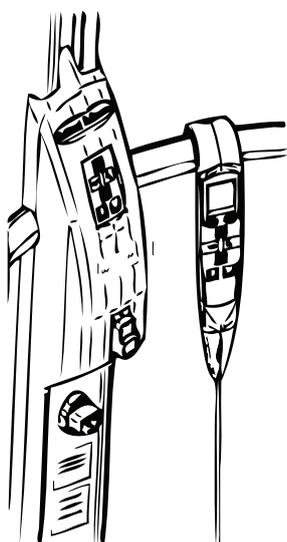

Inclinazione del Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS)

Barra di sollevamento "giù"

Gambe chiuse


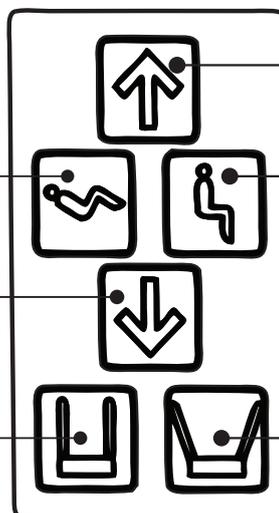


Barra di sollevamento "su"



Posizione seduta del Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS)

Gambe aperte

Attacco del corsetto ad asola

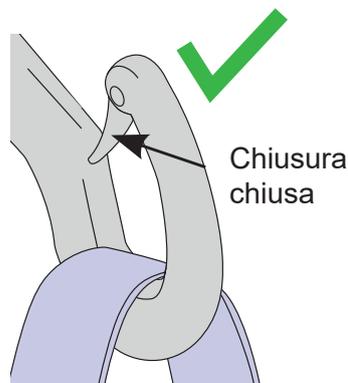
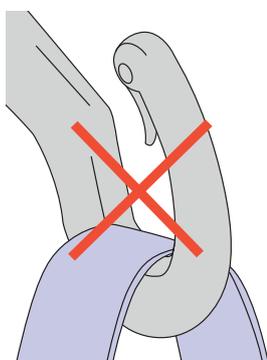


Attacco del corsetto a clip

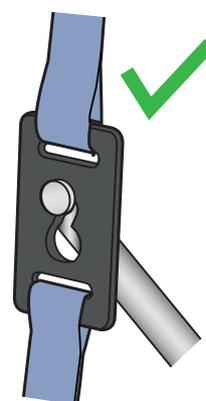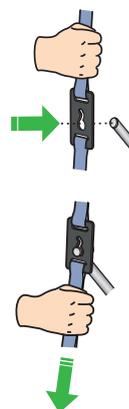


Attaccare e fissare la clip all'aletta prima di sollevare il paziente.

Rimuovere l'attacco

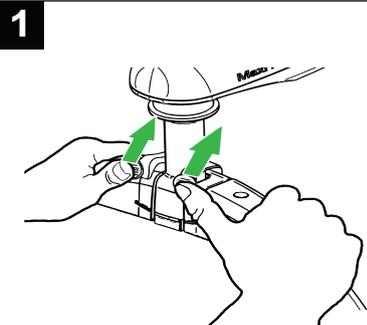
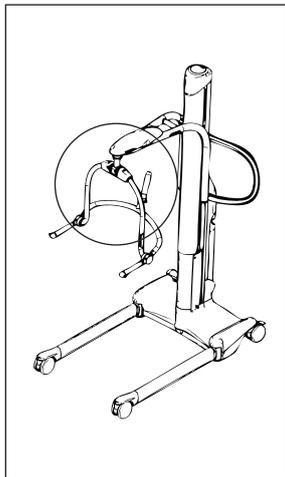


1
Premere i tamponcini dei fermagli di fissaggio.

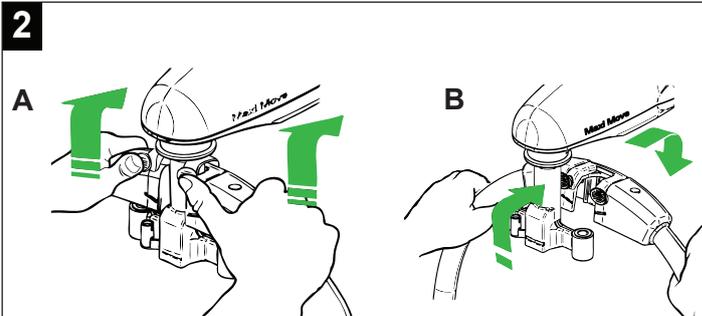


2
Sollevare l'attacco verso l'alto (A) e allontanarlo (B) dalla barra a T.

Installare l'attacco

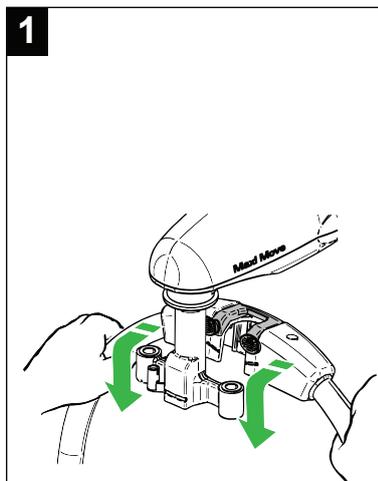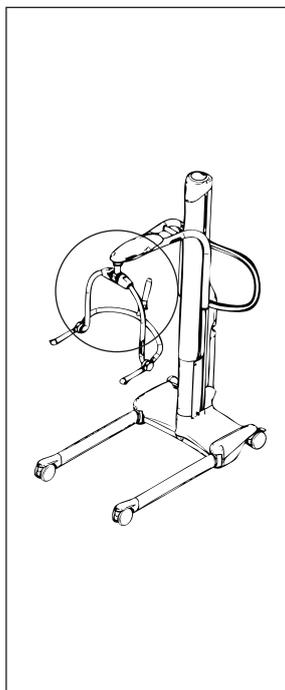



1
Montare l'attacco intorno alla barra a T, con i tamponcini rivolti in avanti.

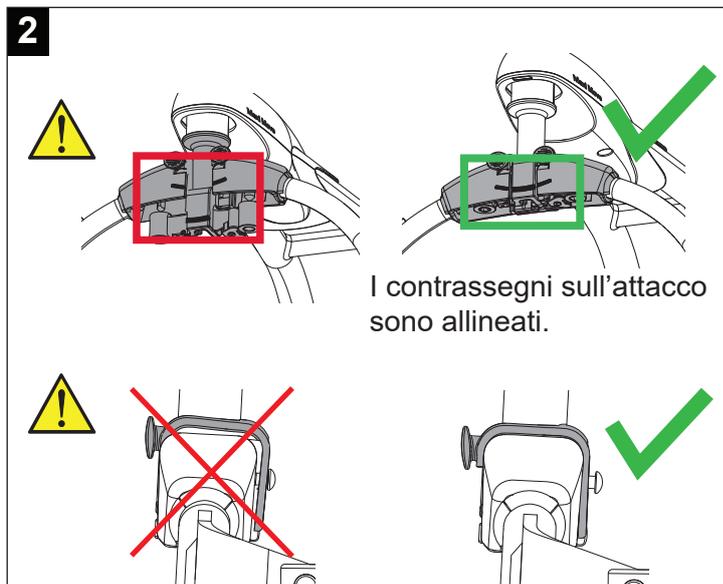


I contrassegni sull'attacco sono allineati.

Il gancio di fissaggio è completamente inserito.


Mancanza di alimentazione elettrica - abbassare il braccio

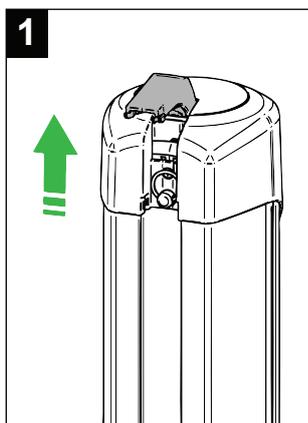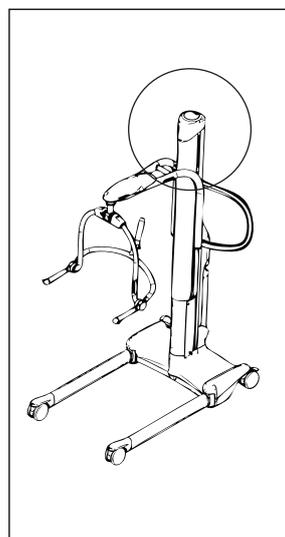

1
Sollevare la leva

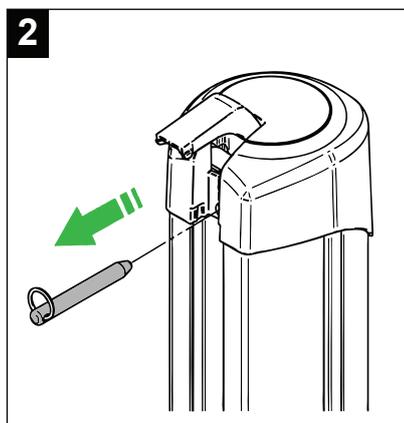

2
Togliere la spina di bloccaggio.

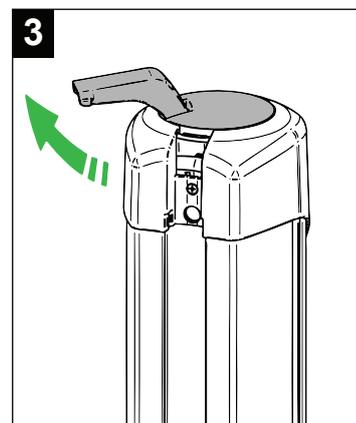

3
Usare la leva come una manovella. Ruotarla in senso orario.