


Maxi Move


Rem activeren en ontgrendelen

Rem activeren

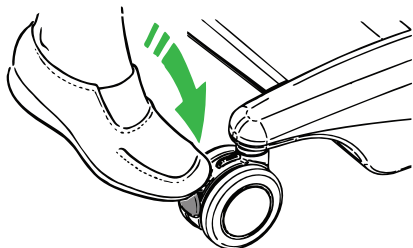


Alleen voor opslag en bij helling. Activeer de remmen niet wanneer u een patiënt op een andere manier optilt.

Rem ontgrendelen

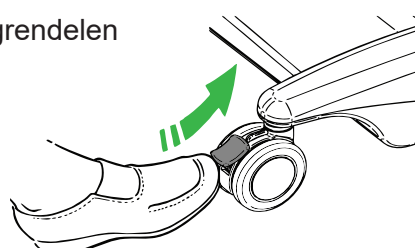


Knoppen van het bedieningspaneel en de afstandsbediening

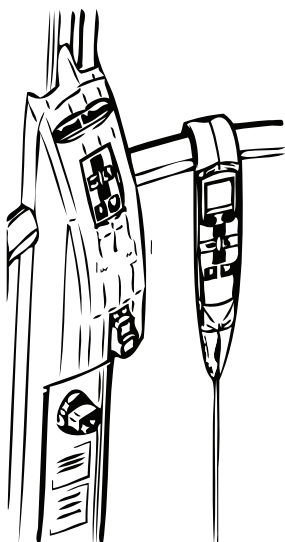

Kanteljuk achterover

Tiljuk omlaag

Poten gesloten

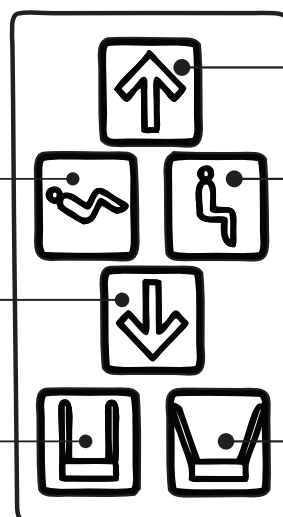


Tiljuk omhoog

Kanteljuk zitstand


Poten openen

Bevestiging voor tilband met lusbevestiging

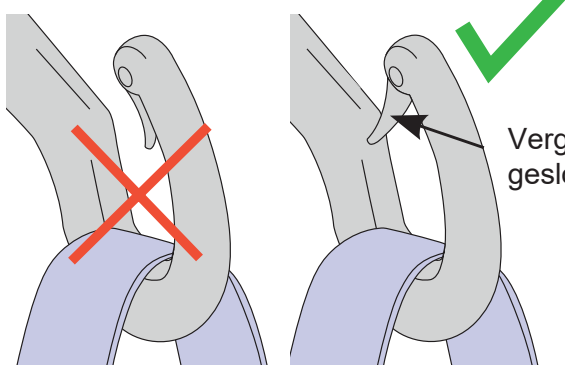


Vergrendeling gesloten

Bevestiging voor tilband met clipbevestiging

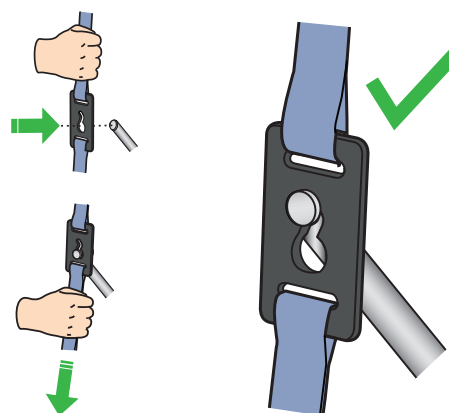


Bevestig de clip op de nok en maak hem vast voordat de patiënt wordt opgetild.

Bevestiging verwijderen


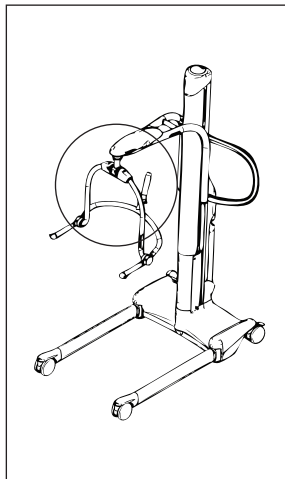


1

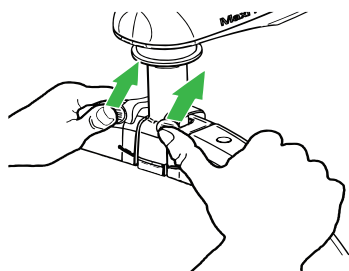


Druk op de knoppen van de sluitklem.

2

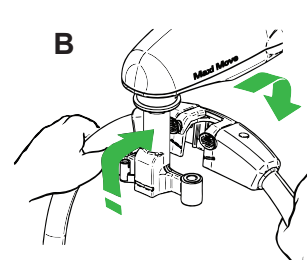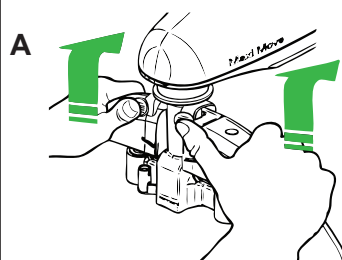


Til bevestiging op (A) en weg (B) van de T-balk.

Bevestiging installeren


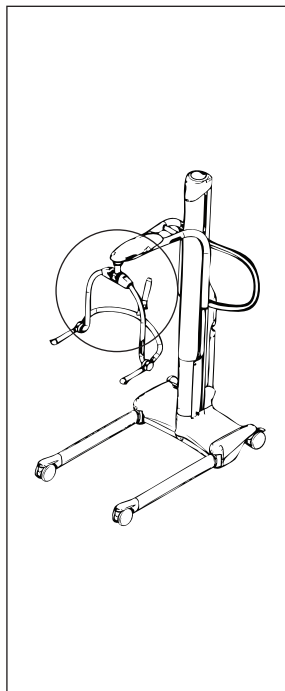


1

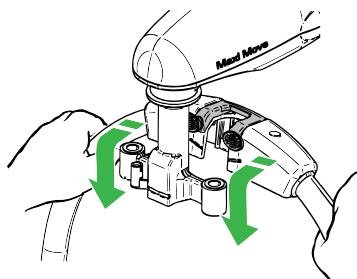


Monteer bevestiging rondom T-balk, knoppen naar voren.

2

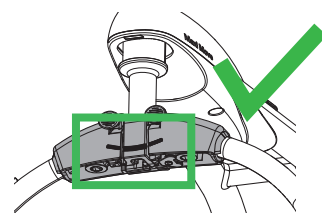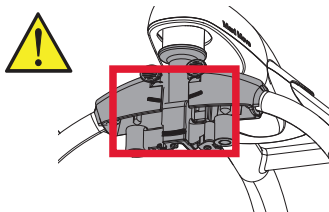


De markeringen op het hulpstuk zijn uitgelijnd.

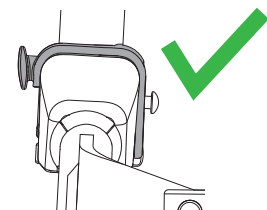


De sluitklem is volledig vastgezet.

Elektrische stroomonderbreking - laat de tilarm zakken

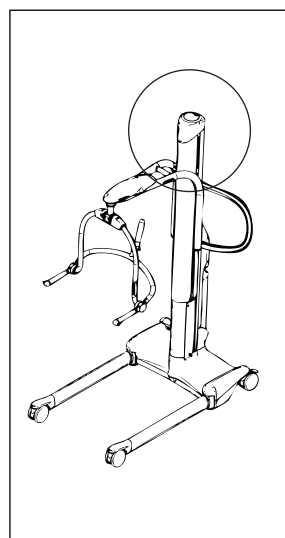


1

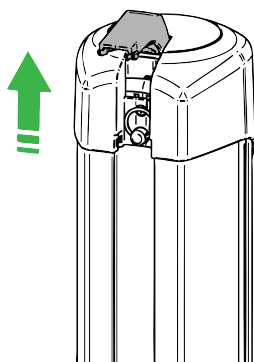


Hendel omhoog brengen

2

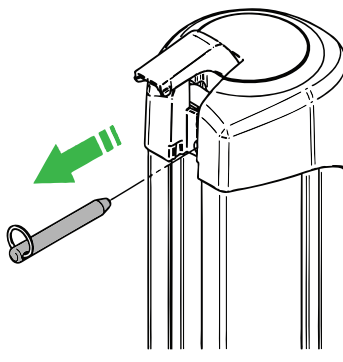

Verwijder de sluitpen.

3

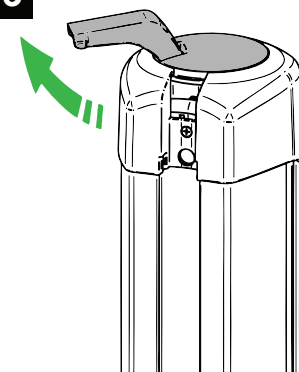

Gebruik de hendel als zwenkel. Draai hem eenmaal rechtsonder.

