

**Πλήκτρο λειτουργίας/αναμονής**

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την αντλία. Οι πράσινες ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου και το μπροστινό μέρος της αντλίας ανάβουν. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της Αναμονής. Η πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα για να υποδείξει την ενεργοποίηση της Αναμονής.

**Πλήκτρο σίγασης**

Πατήστε το για να θέσετε τον ηχητικό συναγερμό σε σίγαση. Η κίτρινη ένδειξη ανάβει όταν τίθεται σε σίγαση ένας ηχητικός συναγερμός.

**Αντιδραστική (CLP) λειτουργία**

Πατήστε για να επιλέξετε την Αντιδραστική (Σταθερή χαμηλή πίεση), μη εναλλασσόμενη λειτουργία. Η κίτρινη ένδειξη ανάβει. Πατήστε ξανά για την Ενεργή (εναλλασσόμενη) λειτουργία (προεπιλογή). Η κίτρινη ένδειξη σβήνει.

**Λειτουργία Autoconfirm**

Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της λειτουργίας AutoFirm. Δημιουργεί μια προσωρινή σταθερή επιφάνεια που επιτρέπει την εκτέλεση των νοσηλευτικών διαδικασιών. Ανάβουν οι ενδείξεις Αντιδραστικής (CLP) λειτουργίας και ελέγχου άνεσης. Μετά από 15 λεπτά, η αντλία επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση - Οι ενδείξεις άνεσης αναβοσβήνουν + εκπέμπεται μια σειρά τόνων. Για παράταση 5 λεπτών: πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο άνεσης. Η μέγιστη διάρκεια είναι 30 λεπτά.

**Έλεγχος άνεσης**

Πατήστε τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το στρώμα ή την πίεση αεροθαλάμων του καθίσματος για την άνεση του ασθενούς. Η ρύθμιση της πίεσης υποδεικνύεται από την πράσινη ένδειξη στα αριστερά.

**Ένδειξη αναμονής**

Παραμένει αναμμένη μέχρι την πλήρη πλήρωση του στρώματος/καθίσματος.

**Ένδειξη χαμηλής πίεσης**

Ανάβει, με ηχητικό συναγερμό, όταν η αντλία ανιχνεύει χαμηλή πίεση στο στρώμα/κάθισμα. Μόλις επιτευχθεί η κανονική πίεση, η ένδειξη σβήνει.

**Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας**

Ανάβει 2 ώρες πριν εξαντληθεί η μπαταρία. Η αντλία μεταβαίνει από προεπιλογή στην Αντιδραστική (CLP) λειτουργία 1 ώρα προτού εξαντληθεί η μπαταρία. Ηχεί συναγερμός και η κίτρινη ένδειξη εξακολουθεί να είναι αναμμένη. (Συστοιχία μπαταριών προαιρετική)

**Ένδειξη διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος**

Ανάβει, με ηχητικό συναγερμό, όταν ανιχνεύεται διακοπή τροφοδοσίας και δεν υπάρχει διαθέσιμη μπαταρία. Ο συναγερμός εξακολουθεί να ηχεί μέχρι να αποκατασταθεί η τροφοδοσία ή να απενεργοποιηθεί η αντλία. Αποσυνδέστε το σύστημα σωλήνων από την αντλία για να θέσετε το στρώμα σε λειτουργία μεταφοράς.

**Ένδειξη τεχνικής συντήρησης**

Ανάβει μετά από έναν καθορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι η αντλία είναι έτοιμη για σέρβις. Η αντλία εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά όταν η ένδειξη σέρβις είναι αναμμένη.