



Botón de encendido / modo de espera

Púlselo para activar la bomba; los indicadores verdes del panel de control y el frontal de la bomba se iluminarán.

Manténgalo pulsado durante 3 segundos para pasar al modo de espera.

El indicador verde parpadea 2 veces cada 2 segundos para indicar el modo de espera.



Botón silenciador

Púlselo para silenciar la alarma sonora.

El indicador amarillo se ilumina cuando se silencia la alarma sonora.



Modo reactivo (CLP)

Púlselo para pasar al modo reactivo (presión reducida constante), sin alternancia de presión. El indicador amarillo se iluminará.

Púlselo de nuevo para pasar al modo activo (presión alterna) predeterminado. El indicador amarillo se apagará.



Modo Autofirm

Manténgalo pulsado durante 2 segundos para pasar al modo Autofirm. Se mantiene temporalmente una superficie firme para facilitar los procedimientos de enfermería. Los indicadores de modo reactivo (CLP) y control de comodidad se iluminarán. Pasados 15 minutos, la bomba volverá a los ajustes que tenía previamente. El indicador de comodidad parpadea con una serie de tonos. Para prolongarlo durante 5 minutos: pulse uno de los botones de comodidad. La duración máxima es de 30 minutos.



Control de comodidad

Pulse los botones para ajustar la presión de las celdas del colchón o el asiento a conveniencia del paciente. El indicador verde de la izquierda muestra el ajuste de presión.



Indicador de espera

Se ilumina hasta que el colchón/asiento está completamente inflado.



Indicador de baja presión

Se ilumina, con una alarma sonora, cuando la bomba detecta que la presión del colchón/asiento es baja. El indicador se apaga cuando se alcanza la presión normal.



Indicador de batería baja

Se ilumina 2 horas antes de que se agote la batería.

Una hora antes de agotarse la batería, la bomba pasará al modo reactivo (CLP), se emitirá una alarma sonora y el indicador amarillo seguirá iluminado (pack de baterías opcional).



Indicador de fallo de alimentación

Se ilumina, con una alarma sonora, cuando se detecta un fallo de alimentación y no hay ninguna batería disponible. La alarma se mantendrá hasta que se restablezca la alimentación o se apague la bomba. Desconecte el juego de tubos de la bomba para poner el colchón en modo de transporte.



Indicador de mantenimiento

Se ilumina al cabo de un número predefinido de horas de funcionamiento, para indicar que la bomba está pendiente de mantenimiento. La bomba continuará funcionando normalmente con el indicador de mantenimiento encendido.