


Auto Logic

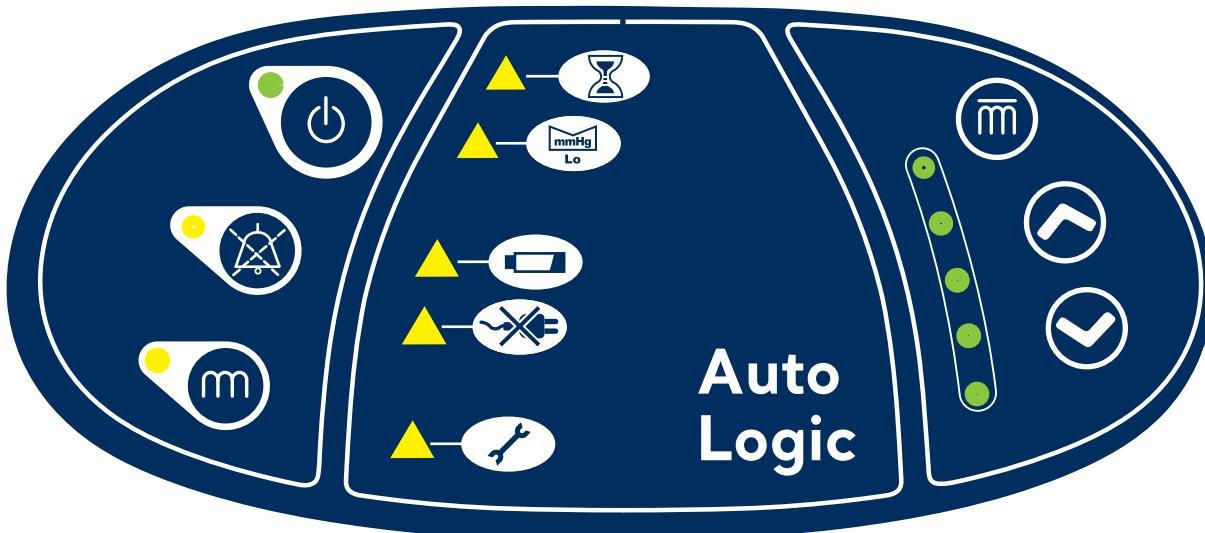

Dugme za pokretanje/pripravnost

Pritisnite da biste aktivirali pumpu; zeleni indikatori na kontrolnoj tabli sa prednje strane pumpe će zasvetleti.

Pritisnite i držite 3 sekunde za režim pripravnosti
Zeleni indikator će zasvetleti dva puta na svake 2 sekunde kako bi označio režim pripravnosti.



Dugme za isključivanje zvuka

Pritisnite da biste utišali zvučni alarm. Indikator svetli kada se isključi zvuk zvučnog alarma.



Reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska)

Pritisnite za reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska) u kojem nema promene pritiska; žuti indikator svetli.

Ponovo pritisnite za aktivni režim (režim promene pritiska) (podrazumevano); žuti indikator je isključen.



Režim automatskog učvršćivanja

Pritisnite i držite 2 sekunde za režim učvršćivanja. Obrazuje privremenu čvrstu površinu čime se omogućavaju postupci nege. Indikatori za reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska) i kontrolu udobnosti svetle. Nakon 15 minuta pumpa se vraća na prethodne postavke – trepere indikatori za udobnost + niz tonova. Da biste produžili 5 minuta: pritisnite bilo koje dugme za udobnost. Maksimalna dužina trajanja je 30 minuta.



Kontrola udobnosti

Pritisakajte dugmad kako biste podešili pritisak komora dušeka ili sedište radi udobnosti pacijenta. Zeleni indikator sa leve strane pokazuje postavku pritiska.



Indikator čekanja

Svetli sve dok se dušek/sedište ne naduvaju u potpunosti.



Indikator niskog pritiska

Počinje da svetli i oglašava se alarm kada pumpa detektuje nizak pritisak u dušeku/sedištu. Indikator se isključuje čim se dostigne normalan pritisak.



Indikator niskog nivoa baterije

Počinje da svetli 2 sata pre nego što se baterija isprazni.

Jedan sat pre nego što se baterija isprazni, pumpa će se vratiti u reaktivni režim (režim stalnog nižeg pritiska), oglasiće se alarm, a žuti indikator će i dalje svetleti. (Baterije su opcione)



Indikator prekida napajanja

Počinje da svetli i oglašava se alarm kada se otkrije nestanak mrežnog napajanja i nema dostupnog napajanja putem baterije. Alarm nastavlja da se oglašava sve dok se ponovo ne uspostavi napajanje ili dok se pumpa ne isključi. Odvojite cevi od pumpe da biste stavili dušek u režim transporta.



Indikator servisa

Počinje da svetli nakon određenog broja radnih sati i ukazuje na to da je pumpa spremna za servisiranje. Pumpa će nastaviti da funkcioniše normalno dok je servisni indikator uključen.

