



## Tænd/Standby-knap

Tryk på knappen for at aktivere pumpen: De grønne indikatorer på betjeningspanelet og foran på pumpen lyser.  
Tryk og hold den nede i tre sekunder for Standby. Grøn indikator blinker to gange hvert andet sekund for at angive Standby.



## Knap til alarmdæmpning

Tryk på denne knap for at dæmpe lydalarmen. Den gule indikator lyser, når lydalarmen er dæmpet.



## Reaktiv tilstand (CLP)

Tryk på knappen for reaktiv tilstand (konstant lavt tryk), hvor trykket ikke skifter; den gule indikator lyser.  
Tryk på knappen igen for aktiv tilstand (vekslende) (standard); gul indikator slukkes.



## Automatisk fasthed (AutoFirm)

Tryk og hold den nede i to sekunder for at vælge tilstanden Autofirm. Danner en midlertidig fast overflade, så der kan udføres plejeprocedurer. Indikatorerne for den reaktive tilstand (CLP) og komfortreguleringen lyser op.  
Efter 15 minutter vender pumpen tilbage til den forrige indstilling – indikatorerne for komfortregulering blinker + en række toner afgives. Forlæng med fem minutter ved at trykke på en af komfort-knapperne. Maksimal varighed er 30 minutter.



## Komfortstyring

Tryk på knapperne for at indstille trykket i madrassens/siddepudens celler for at gøre det så behageligt som muligt for plejemodtageren. Den grønne indikator til venstre viser trykindstillingen.



## Vent-indikator

Lyser, indtil madrassen/sædet er helt oppumpet.



## Indikator for lavt tryk

Lyser, med lydalarm, når pumpen registrerer et lavt tryk i madrassen/sædet. Indikatoren slukkes, når det normale tryk er nået.



## Indikator for lav batteriladning

Lyser i to timer, før batteriet er helt afladet. En time før batterisvigt vender pumpen tilbage til reaktiv tilstand (CLP), og der lyder en lydalarm. Den gule indikator vil stadigvæk være tændt (batteripakke – ekstraudstyr).



## Indikator for strømsvigt

Lyser, med lydalarm, når der registreres et strømsvigt i netspændingen, og der ikke er nødstrømforsyning til rådighed. Alarmen fortsætter, indtil strømmen er genoprettet, eller pumpen slukkes.  
Afmonter slangesættet fra pumpen for at sætte madrassen i transporttilstand.



## Serviceindikator

Lyser efter et indstillet antal driftstimer for at angive, at pumpen skal have et serviceeftersyn. Pumpen fortsætter med at fungere normalt, selv om Service-indikatoren er tændt.