



### Botão Ligado/Em Espera

Prima para ativar a bomba; os indicadores verdes no painel de controlo e na frente da bomba acendem-se.

Prima continuamente durante 3 segundos para aceder ao modo Em espera.

O indicador verde pisca duas vezes a cada 2 segundos para indicar o modo Em espera.



### Botão Sem som

Prima para silenciar o sinal sonoro. O indicador amarelo acende-se ao silenciar o sinal sonoro.



### Modo Reativo (CLP)

Prima para Reativo (Pressão inferior constante), modo não alternado; o indicador amarelo acende-se.

Prima novamente para o modo Ativo (alternado) (predefinido); o indicador amarelo apaga-se.



### Modo AutoFirm

Prima continuamente durante 2 segundos para aceder ao modo AutoFirm. Cria uma superfície firme temporária para permitir a realização de procedimentos de enfermagem. Os indicadores Reativo (CLP) e Controlo de conforto acendem-se. Após 15 minutos, a bomba regressa à definição anterior - os indicadores de conforto piscam + série de sinais sonoros. Para prolongar 5 minutos: prima qualquer um dos botões de conforto. A duração máxima é de 30 minutos.



### Controlo de Conforto

Prima os botões para regular a pressão das células do colchão ou do assento para promover o conforto do paciente. A regulação de pressão é apresentada pelo indicador verde à esquerda.



### Indicador de Aguardar

Aceso até que o colchão/assento esteja totalmente insuflado.



### Indicador de baixa pressão

Aceso, a emitir um sinal sonoro, quando a bomba deteta baixa pressão no colchão/assento. O indicador apaga-se ao atingir a pressão normal.



### Indicador de bateria fraca

Acende-se 2 horas antes da falha da bateria. Por predefinição, a bomba passa ao modo Reativo (CLP) 1 hora antes de acabar a bateria, é emitido um sinal sonoro e o indicador amarelo permanece aceso. (Conjunto de bateria opcional)



### Indicador de Falha de Potência

Aceso, a emitir um sinal sonoro, quando é detetada uma falha de energia e não existe uma bateria disponível. O alarme continua até que a alimentação elétrica seja retomada ou a bomba seja desligada. Desligue o conjunto de tubos da bomba para colocar o colchão no modo de transporte.



### Indicador de revisão

Acende-se após um número definido de horas de funcionamento, indicando que a bomba requer revisão. A bomba continua a funcionar normalmente enquanto o indicador de revisão estiver aceso.