

# Maxi Sky 2



## VAROVÁNÍ



Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice.  
V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře.  
Vždy si přečtěte návod k použití a materiálový bezpečnostní list k dezinfekčnímu prostředku.

Povolené dezinfekční prostředky	Kvaternární amonium ≤ 0,21% (2 100 ppm)	Isopropyl-alkohol ≤ 70%	Fenol ≤ 1,56% (15 600 ppm)	Bělidlo ≤ 1% (10 000 ppm)	Kyselina peroctová ≤ 0,25% (2 500 ppm)	Peroxid vodíku ≤ 1,5%
Modely stropního zvedáku Basic Ceiling Lifter a stropního zvedáku Maxi Sky 2 Ceiling Lifter (tkaný nylonový popruh)	X	X	X			
Model Maxi Sky 2 Infection Control (neporézní popruh)	X	X	X	X	X	X
Další příslušenství * a **	X	X	X	X	X	X
Střední 2bodové závěsné rameno (700-05461-BOX) a 4bodové závěsné rameno (700-05443)	X	X	X			
Rám lehátka (700-19522) a pitevní lehátka (700.05380, 700.05385, 700-05382 a 700-05387)	X	X	X			
Manuální otevřený DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Střední 2bodové závěsné rameno (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Malé 2bodové závěsné rameno (700-19420) a střední 2bodové závěsné rameno IC (700-19470)	X	X	X	X	X	X
4bodové závěsné rameno (700-19430) a rám lehátka (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Ruční plochý DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Manuální otevřený DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Střední PDPS (700-19350) a velký PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

\* Na kovové části konektoru WCS se po opakované expozici bělidlu a peroxidu vodíku může objevit koroze.

\*\* Kabely ručního ovladače, WCS a PDPS se mohou stát mírně lepkavými po opakovaném kontaktu s bělidlem nebo peroxidem vodíku.

\*\*\* Kryt pro tento konkrétní model může být s vinylovým polstrováním nebo z plastu. Na vinyl tyto dezinfekční prostředky nepoužívejte.

Vyčistěte a vydezinfikujte před použitím u nového pacienta/klienta.

Potřebné pomůcky:

- Ochranné brýle a rukavice
- Jednorázová utěrka

## Čištění

1. Hadříkem namočeným ve vodě odstraňte nadměrné usazeniny na zvedáku a jeho příslušenství odshora dolů.
2. Používejte vlhký hadřík namočený v teplé vodě s tekutým čisticím prostředkem.
3. Zařízení otírejte shora dolů a odstraňte všechny usazeniny.
4. Všechny skvrny od čisticího prostředku otřete čistým vlhkým hadříkem namočeným v čisté vodě.
5. Poté otřete dočista suchým hadříkem.

Věnujte pozornost níže uvedeným místům, kde je největší pravděpodobnost usazování nečistot a mikrobů:

- Hrana ručního ovladače
- Zadní část a držadlo ručního ovladače
- Spoj mezi závěsným ramenem a popruhem
- Rám a povrch závěsného ramena
- Bezpečnostní šňůra
- Popruh

## Dezinfekce

6. Otřete zvedák Maxi Sky 2 a jeho příslušenství roztokem obsahujícím některý z kompatibilních dezinfekčních prostředků.
7. V závislosti na zdravotnickém zařízení nebo zemi použití by metoda dezinfekce měla být zvolena ve shodě s místními nebo národními postupy. Pokud si nejste jisti, poraďte se s místním specialistou kontroly infekcí.

