


Maxi Sky 2




Käsijuhtimispuul

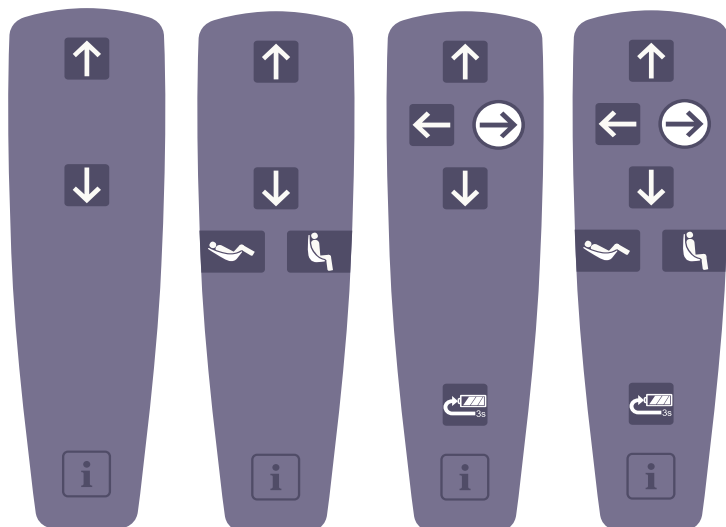

- Ülesnupp**
- Allanupp**
- Parem nupp**
- Vasak nupp**
- Langetatud asendi nupp** (ainult elektriline DPS)
- Istumisasendi nupp** (ainult elektriline DPS)
- RTC** (laadimaminek)
- RTH** (asendilähtestus) nupp
- Programmi-/teabenupp**

Juhtpaneel

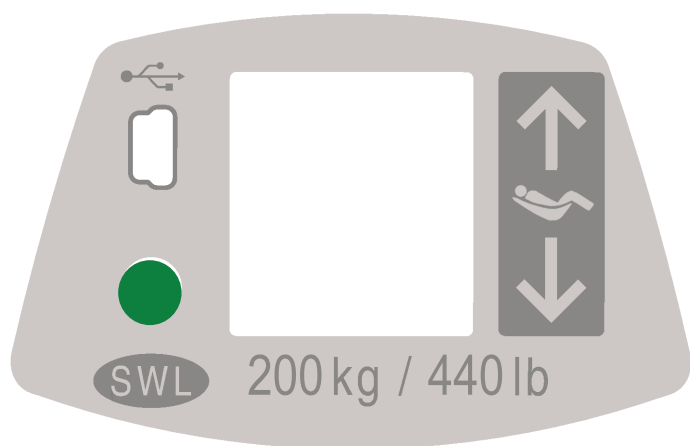

- Abi üles-allanupp**
Nuppe „üles“ ja „alla“ kasutatakse tõstmise lõpetamiseks, kui käsijuhtimise ajal tekib probleem.
- Oleku LED**
LED on ekraani täienduseks, et juhtida tähelepanu ekraanil kuvatud teatele.
- SWL**
Sildil on kirjas tõstuki maksimaalne tõstevõime.
- USB-pöörduispordiga**
USB-port on mõeldud ainult MAXISMART kasutajatele kasutamiseks.

Ekraani tingmärgid



Aku laetustase



100%



75%

Normaalne töövahemik



50%



25%

Madal

Nupu vajutamisel kostab lühike piiks.



< 5%

Kriitiline

Ikoonid vahetuvad koos kahe lühikese piiksuga iga 10 sekundi järel.



Enhanced Charging System (ECS) indikaator

Kuvatakse seadmete laadimisel TLS-iga.



Laadimaminek (RTC)

Tähendab, et RTC-funktsioon käivitatakse käsitsi.



Asendilähtestus (RTH)

Tähendab, et asendilähtestuse funktsioon käivitatakse käsitsi.

PPP



Eelprogrammeeritud asend (EPA)

Tähendab, et EPA-funktsioon käivitatakse käsitsi.



Ülekoormuse tsükkel

Vilgub, kui tõstukit on kasutatud pikka aega, ilma et sellel oleks lastud jahtuda.

Ülekuumenemise kaitse on sisse lülitatud, kui funktsioon, mis ületab oma töötsükli, on keelatud, samas kui kõik teised funktsioonid jäävad aktiivseks.

Punane tuli jääb jahtumisperioodi ajal põlema ja kuulda on ühte piiksu.

Tingmärk kaob, kui funktsioon on maha jahtunud ja jälle kasutamiseks valmis.



Üldine rike (Hoiatussümbol koos numbrilise tähemärgiga)

Vilgub tõstuki rikke korral.

Tõstukit võib uurida või parandada kvalifitseeritud tehnik.

Punane tuli jääb põlema ja kuulda on ühte piiksu.



ABC

Nõutav hooldus (täht koos mutrivõtmega)

Kuvatakse 7 sekundit (kuulda on 2 piiksu), kui tõstuk läheb unerežiimist välja ja vilgub iga 5 sekundi järel kasutaja tähelepanu juhtimiseks.

Seadet saab kasutada, kuid Arjo tehnik peab tegema hoolduse võimalikult kiiresti.



Ülekaal


Vilgub, kui üritatakse tõsta, kuid koormus ületab tõstuki tõstevõime.

Punane tuli jääb põlema (kuulda on 4 kiiret piiksu) kuni patsiendi langetamiseni.

Funktsioon on keelatud, samal ajal kui kõik teised funktsioonid jäävad aktiivseks.


Tõsteraami ja kaalu kinnitamine

1

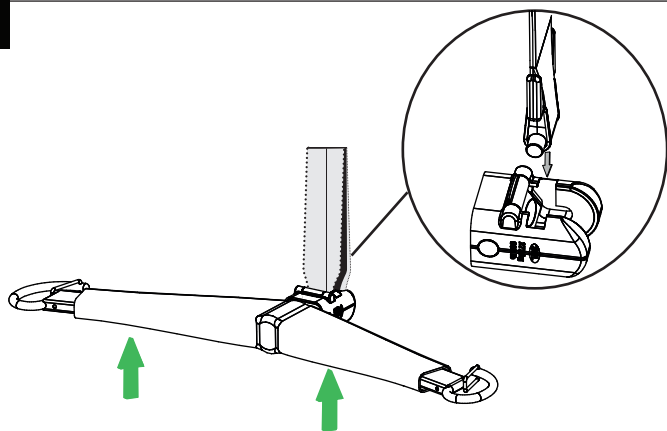

Joondage tõsteraami Quick-Connect-sulgur 90-kraadise nurga all konksuga. Sisestage konks Quick-Connecti.


2

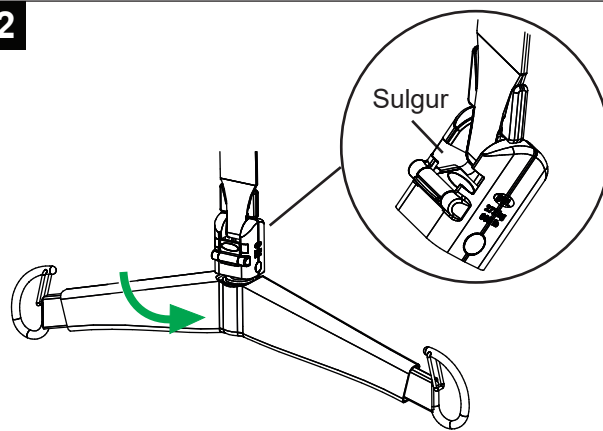

Liigutage tõsteraami nii, et konks kinnitub asendisse. Keerake tõsteraam asendisse. Veenduge, et Quick-Connect-sulgur oleks suletud.


Tõsteraami ja kaalu eemaldamine

1

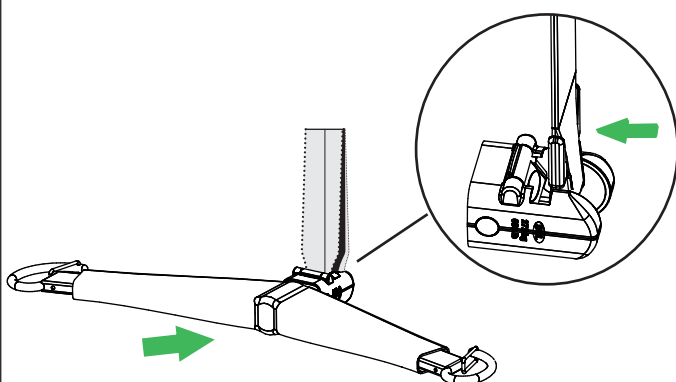

Konksu eemaldamiseks pesast liigutage tõsteraami 90-kraadise nurga all.

2

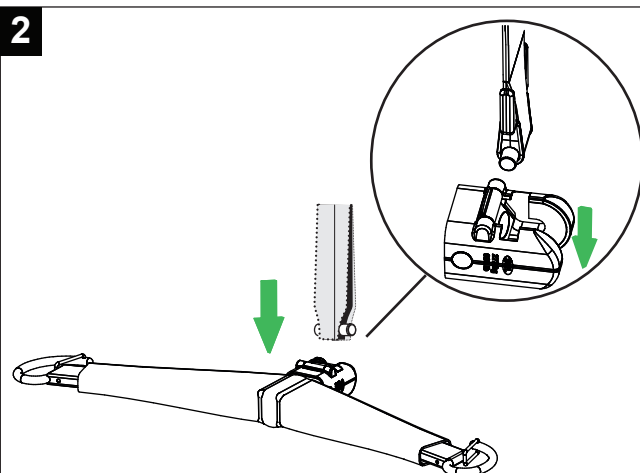

Tõmmake tõsteraam 90-kraadise nurga all allapoole, Quick-Connectist välja.


Tõsteraami ja kaalu kinnitamine või eemaldamine (ainult Basic-laetöstuki mudelil)

1



Kinnitage rihma ots tõsteraami kinnitile. Sisestage kahveltiht läbi kinniti ja aasa rihma otsas.

2

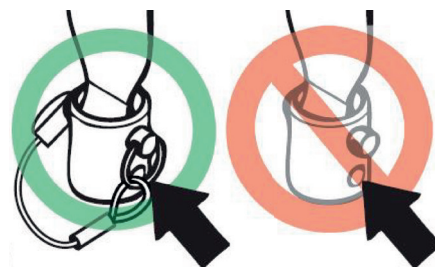

Kinnitage kahveltiht klambrirõngaga.

