


Maxi Sky 2




Rokas vadības ierīce

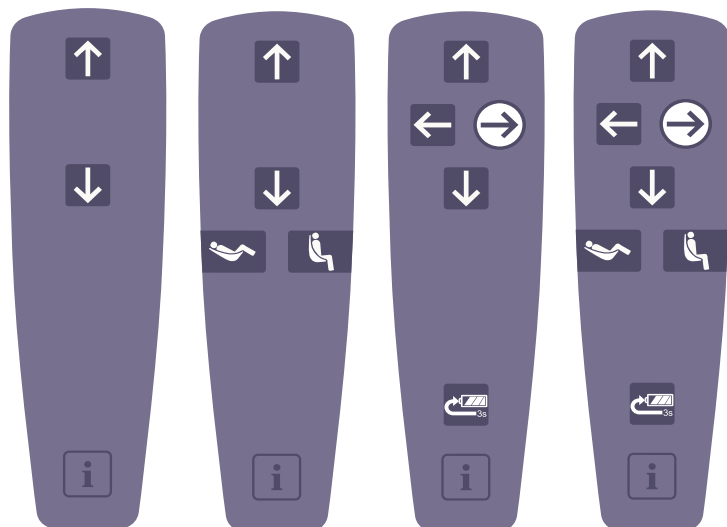

- Poga «uz augšu»
- Poga «uz leju»
- Poga «pa labi»
- Poga «pa kreisi»
- Guļus stāvokļa poga** (tikai motorizētā DPS)
- Sēdus stāvokļa poga** (tikai motorizētā DPS)
- RTC** (atgriezties uzlādes stacijā) poga
- RTH** (atgriezties sākumpunktā) poga
- Programmēšanas/informācijas poga**

Vadības panelis

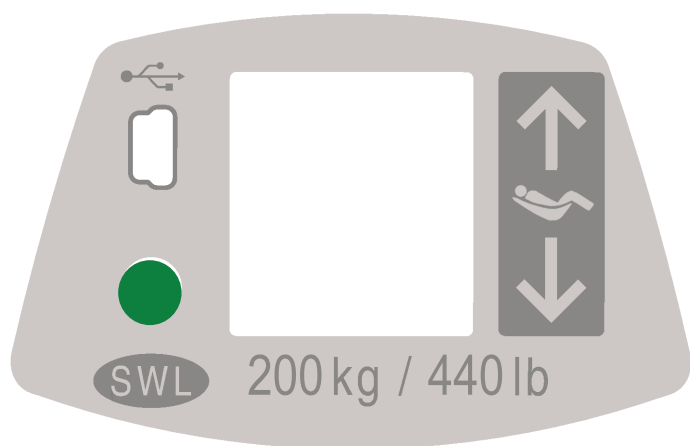

- Palīgpgoda «uz augšu»/«uz leju»**
Augšupvērstās un lejupvērstās pogas tiek izmantotas, lai pabeigtu pārsūtīšanu, ja operācijas laikā rodas problēma ar rokas vadības ierīci.
- Statusa LED indikatoru**
LED indikators ir displeja papildinājums, kas paredzēts, lai pievērstu uzmanību ekrānā parādītajam ziņojumam.
- DDS**
Šis marķējums norāda pacelāja maksimālo celjspēju.
- USB piekļuves ports**
USB ports ir paredzēts tikai «MAXISMART» lietotājiem.

Displejā redzamie simboli



Akumulatora uzlādes līmenis



100%



75%

Normāls darbības diapazons



50%



25%

Zems uzlādes līmenis

Vienlaikus atskan īss skaņas signāls, ja tiek nospiesta poga



< 5%

Kritisks

Ikonas mainās, atskanot diviem īsiem skaņas signāliem ik pēc 10 sekundēm



Uzlabotās uzlādes sistēmas (ECS) indikators

Parādās, uzlādējot iekārtas ar ECS.



Atgriezties uzlādes stacijā (RTC) poga

Norāda, ka ar rokas vadības ierīci ir aktivizēta RTC funkcija.



Atgriezties sākumpunktā (RTH)

Norāda, ka ar rokas vadības ierīci ir aktivizēta RTH funkcija.

PPP

Ieprogrammētā pozīcija (PPP)



Norāda, ka ar rokas vadības ierīci ir aktivizēta PPP funkcija.



Darba cikla pārsniegšana

Mirgo, ja pacēlājs tiek izmantots ilgstoši, neļaujot tam atdzist.

Aizsardzība pret pārkaršanu ir aktivizēta, kad funkcija pārsniedz tās darba ciklu, tā kļūst atspējota, kamēr visas pārējās funkcijas paliek aktīvas.

Sarkanais indikators atdzesēšanas laikā paliek ieslēgts, un atskan viens skaņas signāls.

Šis simbols pazūd, kad funkcija ir atdzesēta un atkal ir gatava lietošanai.



Vispārēji darbības traucējumi (līdzās brīdinājuma simbolam parādās ciparu rakstzīme)

Mirgo, kad pacēlājam rodas darbības traucējumi.

Pacēlāja pārbaude vai remonts jāveic kvalificētam servisa tehniskajam speciālistam.

Sarkanais indikators paliek ieslēgts, un atskan viens skaņas signāls.



ABC

Nepieciešama apkope (atslēgas simbols kopā ar burtu rakstzīmi)

Rādās 7 sekundes (vienlaikus atskanot 2 skaņas signāliem), kad pacēlājs mostas no miega režīma, un ik pēc 5 sekundēm mirgo, lai pievērstu lietotāja uzmanību.

Iekārtu var izmantot, bet «Arjo» tehniskajam speciālistam pēc iespējas ātrāk jāveic apkope.



Pārmērīgs svars


Mirgo, ja mēģināt pārvietot svaru, kas pārsniedz pacēlāja celtnespēju.

Sarkanais indikators paliek ieslēgts (vienlaikus atskanot 4 ātriem skaņas signāliem), līdz pacients tiek nolaists.

Funkcija tiek atspējota, kamēr pārējās funkcijas paliek aktīvas.


Sadalītājstieņa un svaru pievienošana

1

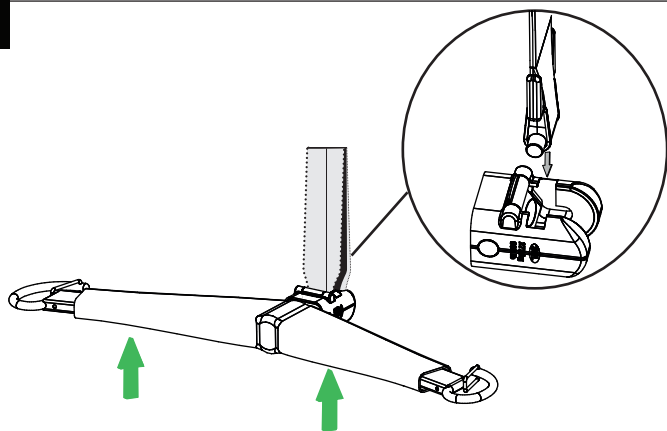

Savietojiet sadalītājstieņa «Quick-Connect» fiksatoru 90 grādu leņķī ar āķi. Ievietojiet āķi «Quick-Connect» fiksatorā.


2

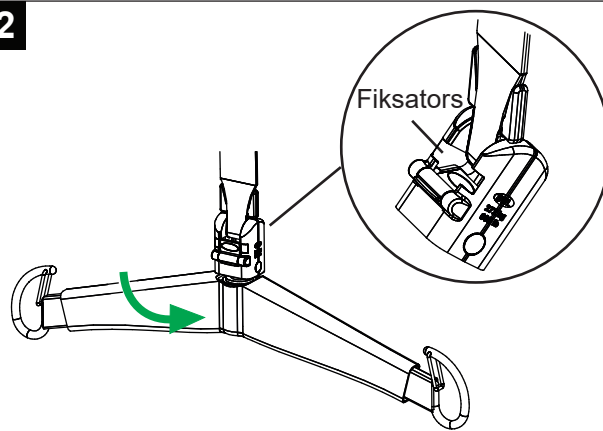

Pārvietojiet sadalītājstieni, lai nofiksētu āķi šarnīrā. Pagrieziet sadalītājstieni nepieciešamajā pozīcijā. Pārliecinieties, ka «Quick-Connect» fiksators ir aizvērts.


Sadalītājstieņa un svaru noņemšana

1

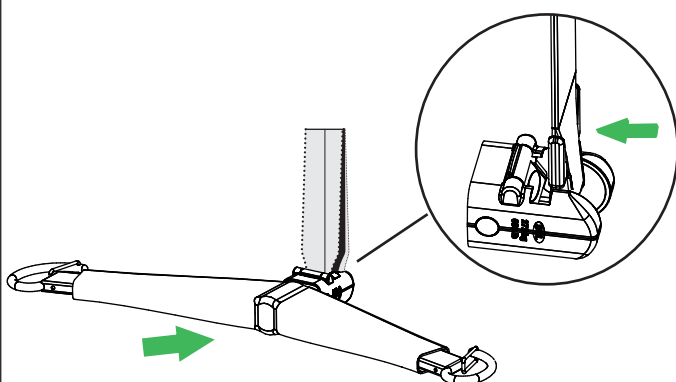

Pārvietojiet sadalītājstieni 90 grādu leņķī, lai atvienotu āķi no šarnīra.

2

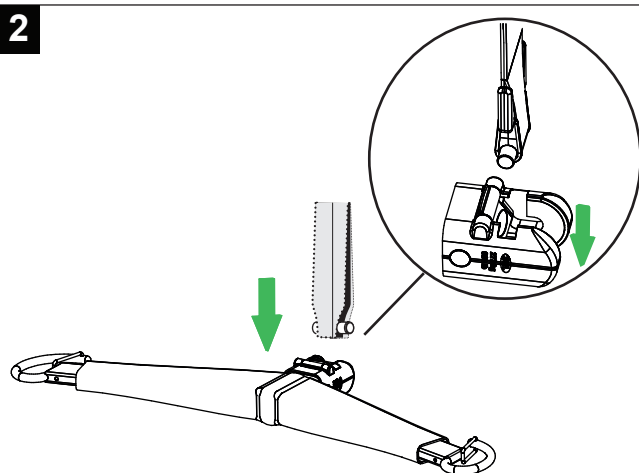

Izvelciet sadalītājstieni 90 grādu leņķī virzienā uz leju no «Quick-Connect» sistēmas.


Sadalītājstieņa un svaru pievienošana vai noņemšana (tikai «Basic» griestos iebūvētā pacēlāja modelim)

1



Ievietojiet siksnas galu sadalītājstieņa stiprinājumā. Ievietojiet skavas tapu caur stiprinājumu un cilpu siksnas galā.

2

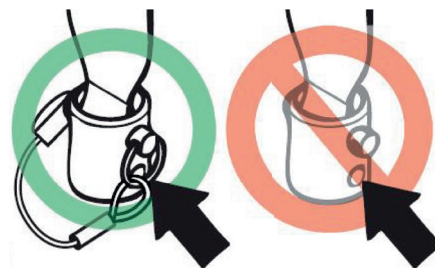

Nostipriniet skavas tapu ar blīvgredzenu.

