


Maxi Sky 2




Ruční ovladač

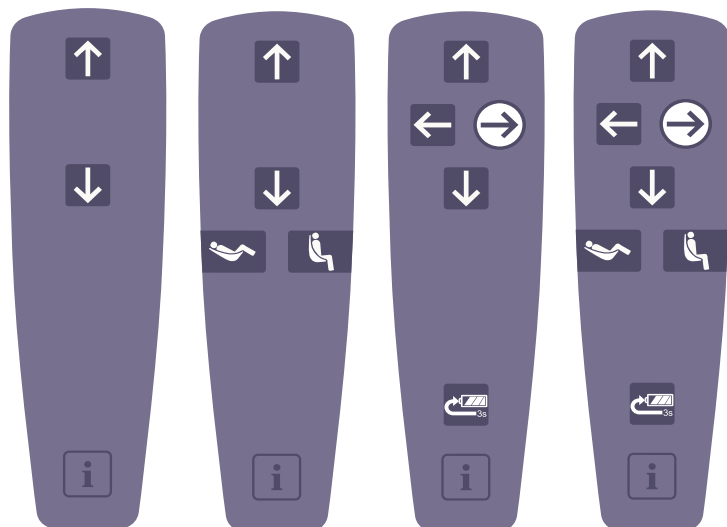

- Tlačítko nahoru**
- Tlačítko dolů**
- Tlačítko vpravo**
- Tlačítko vlevo**
- Tlačítko náklonu**
(pouze elektricky poháněný DPS)
- Tlačítko sezení**
(pouze elektricky poháněný DPS)
- Tlačítko návrat k nabíjení (RTC)**
Návrat do výchozí polohy (RTH)
- Tlačítko programování/informace**

Ovládací panel

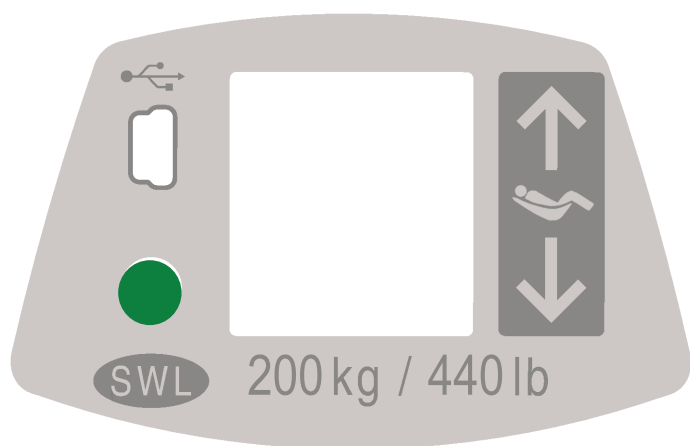

- Pomocné tlačítko nahoru – dolů**
Tlačítka nahoru a dolů se používají k provedení přesunu, pokud během provozu dojde k problému s ručním ovladačem.
- Stavová kontrolka LED**
Kontrolka LED slouží jako doplněk vizuálního zobrazení a upozorňuje obsluhu, že je na obrazovce zobrazena zpráva.
- SWL**
Štítek označuje maximální nosnost zvedáku.
- USB přístupový port**
USB port je určen pouze pro uživatele MAXISMART.

Symboly na displeji



Úroveň dobítí baterie



100 %



75 %

Normální provozní rozsah



50 %



25 %

Téměř vybitá

Provázeno krátkým pípnutím po stisknutí tlačítka



< 5 %

Kritický stav

Ikony se střídají a každých 10 sekund se ozvou dvě krátká pípnutí



Indikátor Enhanced Charging System (ECS)

Zobrazí se při nabíjení jednotek prostřednictvím ECS.



Návrat k nabíjení (RTC)

Indikuje, že funkce RTC byla aktivována na ručním ovladači.



Návrat do výchozí polohy (RTH)

Indikuje, že funkce RTH byla aktivována na ručním ovladači.



Předprogramovaná pozice (PPP)

Indikuje, že funkce PPP byla aktivována na ručním ovladači.



Překročení pracovního cyklu

Bliká, pokud je zvedák používán po dlouhou dobu, aniž by mohl vychladnout.

Ochrana proti přehřátí se aktivuje, když funkce překročí svůj pracovní cyklus a je zablokována, zatímco ostatní funkce zůstávají aktivní.

Červená kontrolka během ochlazování stále svítí a ozve se jedno pípnutí.

Symbol zmizí, jakmile došlo k ochlazení a funkce je opět připravena k použití.



Obecná porucha (varovný symbol provázený číselným znakem)

Bliká, když zvedák zaznamená poruchu.

Zvedák musí zkontrolovat nebo opravit kvalifikovaný servisní technik.

Červená kontrolka stále svítí a ozve se jedno pípnutí.



ABC

Požadována údržba (symbol klíče provázený písmenným znakem)

Symbol (provázený 2 pípnutími) se zobrazuje 7 sekund, když se zvedák přepne z režimu spánku, a bliká každých 5 sekund, aby upoutal pozornost uživatele.

Jednotku lze použít, je však zapotřebí, aby technik společnosti Arjo provedl co nejdříve údržbu.



Nadměrná váha


Bliká, když je proveden pokus o přesun se zátěží přesahující nosnost zvedáku.

Červená kontrolka (provázená 4 rychlými pípnutími) svítí až do spuštění klienta dolů.

Funkce je blokována, zatímco všechny ostatní funkce zůstávají aktivní.


Připojení závěsného ramena a vah

1

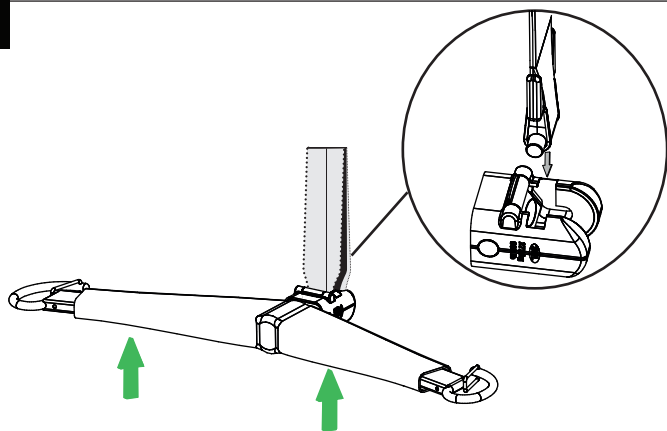

Rychlospojku Quick-Connect závěsného ramena vyrovnejte k háku v úhlu 90 stupňů. Zasuňte hák do rychlospojky Quick-Connect.


2

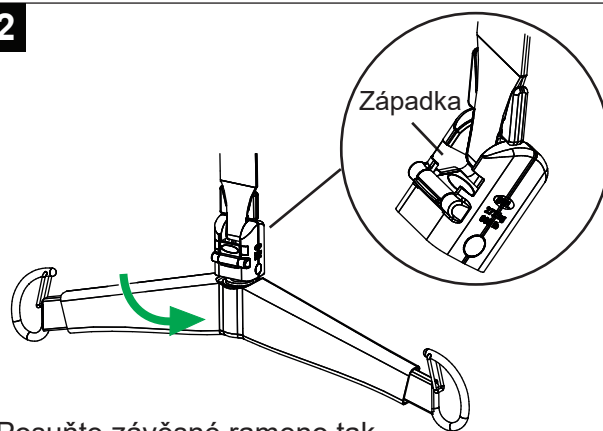

Posuňte závěsné rameno tak, aby čep zapadl do háku. Závěsné rameno otočte do správné polohy. Ujistěte se, že je západka rychlospojky Quick-Connect zajištěná.


Odpojení závěsného ramena a vah

1

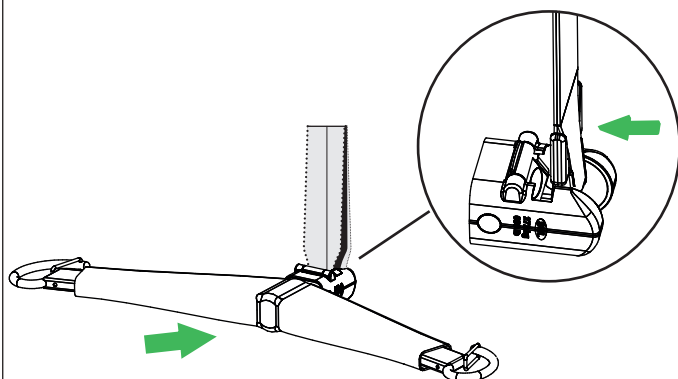

Posuňte závěsné rameno do úhlu 90 stupňů tak, aby se čep vysunul z háku.

2

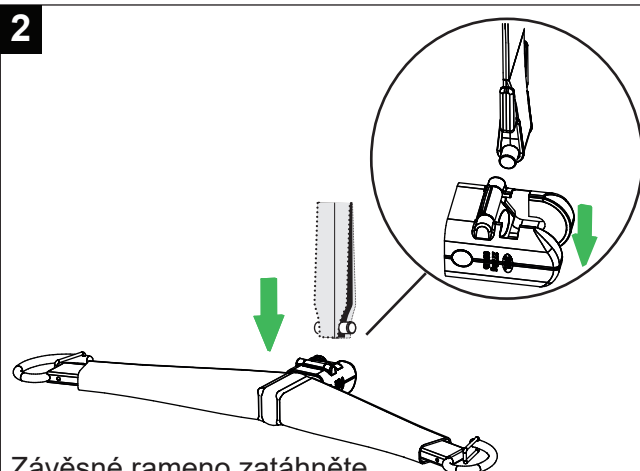

Závěsné rameno zatáhněte v úhlu 90 stupňů směrem dolů a uvolněte z rychlospojky Quick-Connect.


Připojení nebo odpojení závěsného ramena a vah (pouze model stropního zvedáku Basic Ceiling Lifter)

1



Vložte konec popruhu do přípojky závěsného ramena. Protáhněte sponu přípojkou a smyčkou na konci popruhu.

2

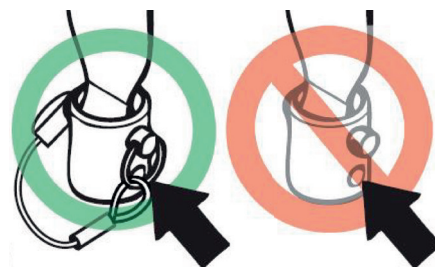

Zajistěte přípojku děleným kroužkem.

