

Maxi Sky 2

Transfer aus der Sitzposition



1




Legen Sie den Gurt um den Patienten. Stellen Sie bei Gurten mit Kopfstütze sicher, dass diese bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2



Bringen Sie den Lifter an den Pflegebedürftigen heran. Dabei sollte die Aufhängung sich auf dessen Schulterhöhe und nahe genug am Körper befinden, um die Befestigungsbänder für die Schulter anzubringen.

3

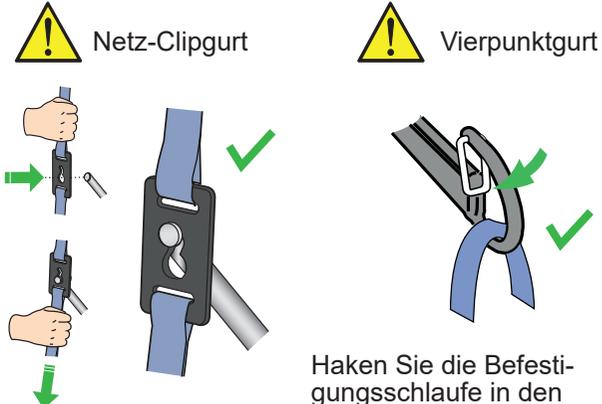

Den Clip an der Öse anbringen und sichern, bevor der Patient/Bewohner gehoben wird.

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.

4




Bringen Sie die Gurtschleifen an der Aufhängung an.

5



Neigen Sie bei der DPS-Aufhängung und dem Netz-Clipgurt die Aufhängung zum Anbringen der Beinclips.

6

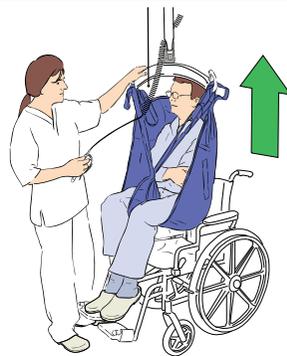


Heben Sie den Pflegebedürftigen an.

7



Bewegen Sie den Pflegebedürftigen.

8

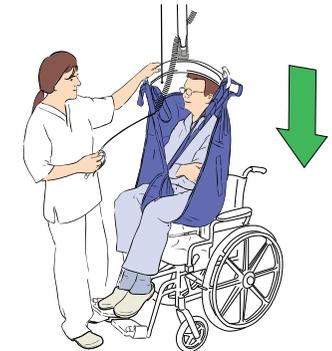

Senken Sie den Pflegebedürftigen ab, bis keine Spannung mehr auf dem Gurt ist. Lösen Sie die Schleifen bzw. Clips.

Transfer aus der Rückenlage

1



Führen Sie den Gurt mittig unter den Pflegebedürftigen. Stellen Sie bei Gurten mit Kopfstütze sicher, dass diese bis über den Kopf des Pflegebedürftigen reicht.

2




Positionieren Sie den Lifter über dem Patienten.

3




Netz-Clipgurt

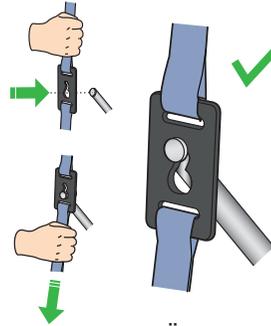

Den Clip an der Öse anbringen und sichern, bevor der Patient/Bewohner gehoben wird.



Vierpunktgurt

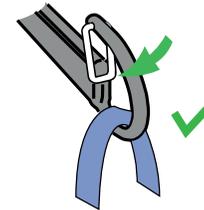

Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.

4



Bringen Sie die Gurtschlaufen an der Aufhängung an. Befestigen Sie die Befestigungsbänder: erst für die Schulter, dann für die Beine.

5



Heben Sie den Pflegebedürftigen an.

6




Bewegen Sie den Pflegebedürftigen.

7



Senken Sie den Pflegebedürftigen auf den gewünschten Zielort ab.

8

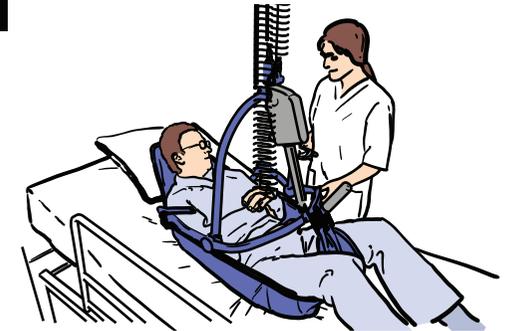

Wenn der Pflegebedürftige mit seinem ganzen Körpergewicht aufliegt, hängen Sie die Befestigungsschleifen bzw. -clips aus.


Umlagerung – im Bett nach oben




Platzieren Sie den Gurt unter dem Pflegebedürftigen und positionieren Sie den Lifter über dem Pflegebedürftigen.




Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.

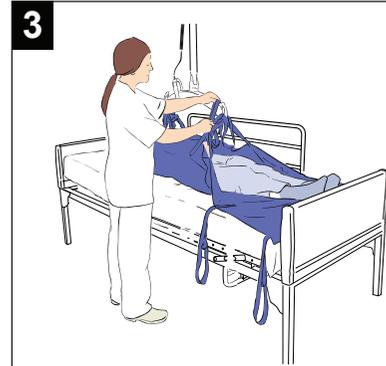

Befestigen Sie möglichst viele Gurtschlaufen an der Aufhängung. Beginnen Sie dabei mit den Schlaufen am Kopfende.

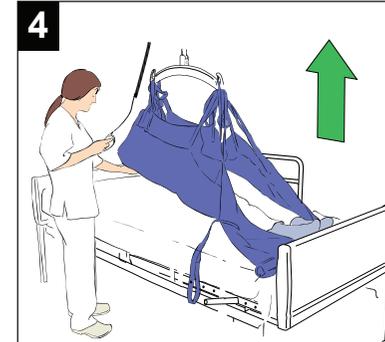


Heben Sie den Pflegebedürftigen so weit an, bis dessen Hüften getragen werden, und bewegen Sie ihn nach oben.

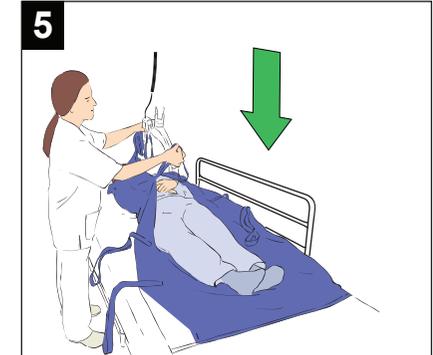

Senken Sie den Patienten auf den gewünschten Zielort ab und lösen Sie alle Schlaufen.


Umlagerung – im Bett drehen

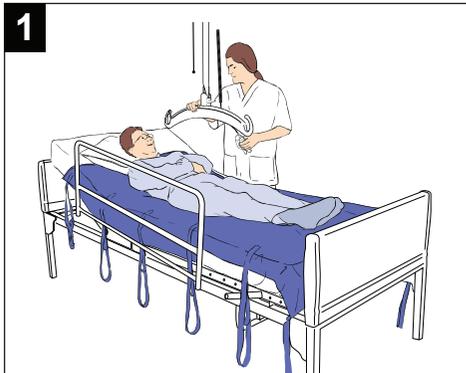


Platzieren Sie den Gurt unter dem Pflegebedürftigen und positionieren Sie den Lifter über dem Pflegebedürftigen.




Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.

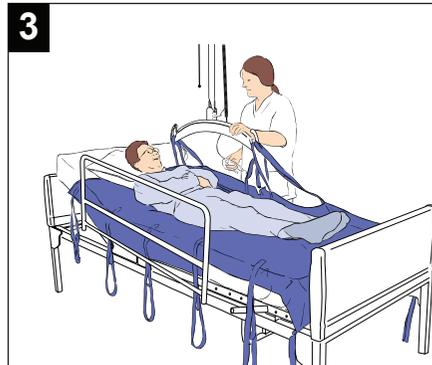

Befestigen Sie auf jeder Seite möglichst viele Gurtschlaufen an der Aufhängung. Beginnen Sie dabei mit den Schlaufen am Kopfende.

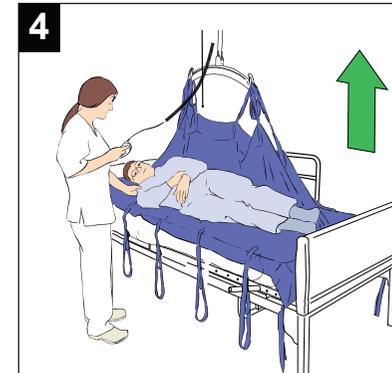

Heben Sie die Aufhängung so weit an, bis der Pflegebedürftige in die gewünschte Position gedreht wurde.

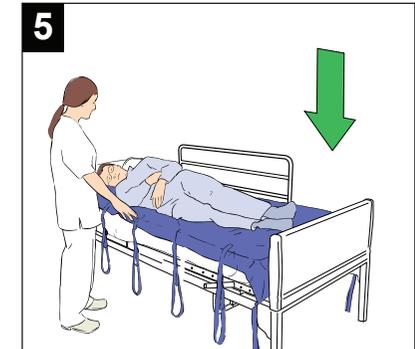

Senken Sie den Pflegebedürftigen ab, bis keine Spannung mehr auf dem Gurt ist, und lösen Sie alle Schlaufen.


Transfer des Pflegebedürftigen in Rückenlage

1



Legen Sie den Gurt unter den Pflegebedürftigen und achten Sie darauf, dass das Kopfende des Gurts sich ordnungsgemäß am Kopf befindet.

2

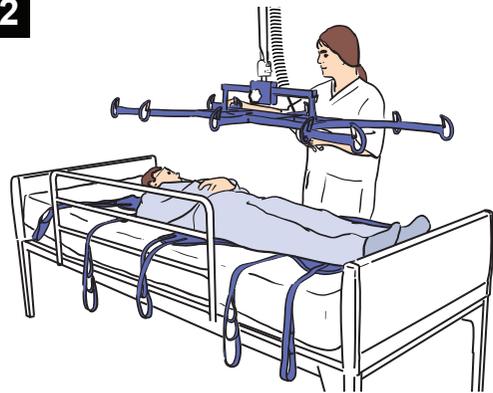

Positionieren Sie den Lifter über dem Patienten.


3



! Vierpunktgurt


Haken Sie die Befestigungsschleife in den Aufnahmehaken ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.

4

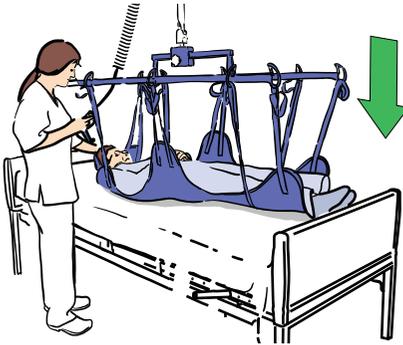


Senken Sie die Liegendaufhängung vorsichtig ab und positionieren Sie die Mitte der Aufhängung über dem Bauchnabel des Pflegebedürftigen. Befestigen Sie alle Gurtschlaufen.

5

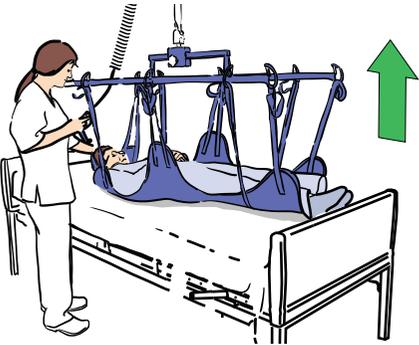


Heben Sie den Bewohner/Patienten an und fahren Sie den Lifter vom Bett weg.

6

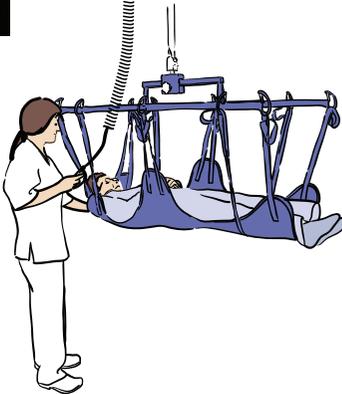


Patienten transferieren.

7

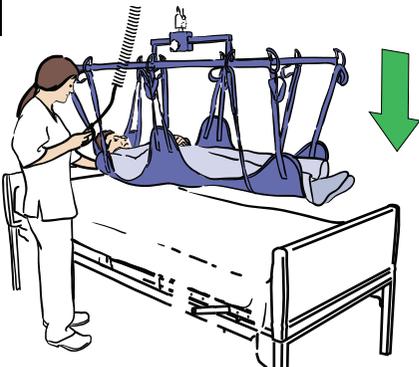

Senken Sie den Patienten auf den gewünschten Zielort ab und lösen Sie alle Schlaufen.

8

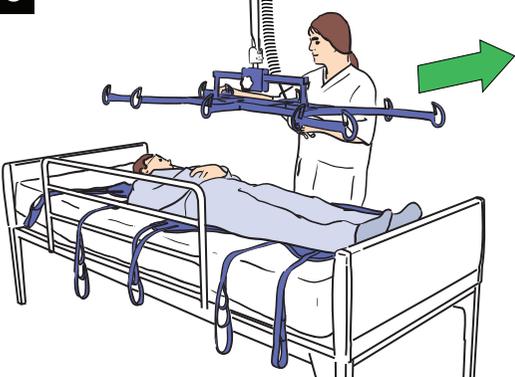

Ziehen Sie die Aufhängung vom Bewohner/Patienten weg.