


Maxi Sky 2

Переміщення із сидячого положення

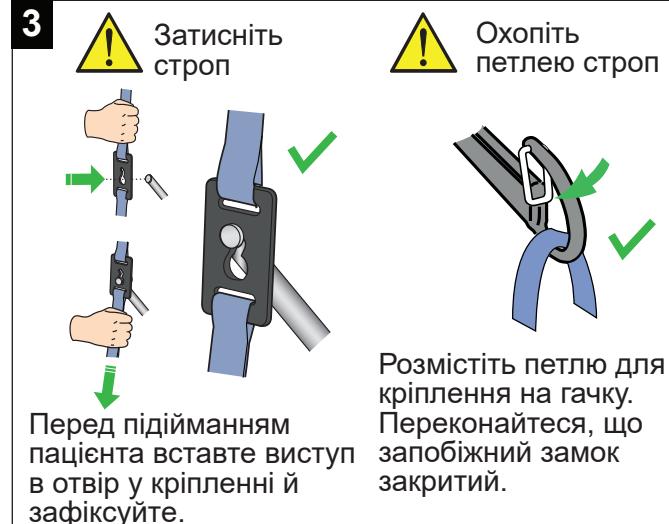

Переміщення із положення лежачи на спині

1




Розмістіть і відцентруйте строп під пацієнтом. Переконайтесь, що строп з опорою голови проходить до верхньої частини голови пацієнта.

2



Розташуйте підйомник над пацієнтом.

3

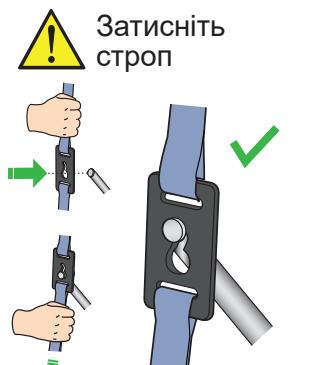

Затисніть строп



Охопіть петлею строп

Перед підійманням пацієнта вставте виступ в отвір у кріпленні й зафіксуйте.

Розмістіть петлю для кріплення на гачку. Переконайтесь, що запобіжний замок закритий.

4



Приєднайте петлі або затискачі стропа до траверси. Прикріпіть плечові ремінці, потім ремінці для ніг.

5



Підніміть пацієнта.

6




Перемістіть пацієнта.

7



Опустіть пацієнта на нове місце.

8

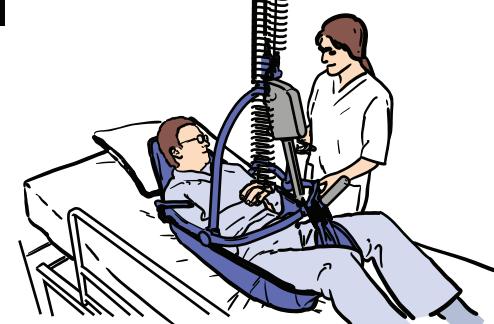

Після того як вага пацієнта повністю переміститься з підйомника на нове місце, від'єднайте петлі або затискачі.

Зміна положення — піднімання в ліжку



Розмістіть строп під пацієнтом і розташуйте підйомник над пацієнтом.



Охопіть петлею строп
Розмістіть петлю для кріплення на гачку. Переконайтесь, що запобіжний замок закритий.



Прикріпіть до траверси якомога більше петель стропа. Почніть з петель з боку голови.



Піднімайте, поки не підтримуватимуться стегна, а потім переміщуйте вгору.



Опустіть пацієнта на нове місце і від'єднайте всі петлі.

Зміна положення — повертання в ліжку



Розмістіть строп під пацієнтом і розташуйте підйомник над пацієнтом.



Охопіть петлею строп
Розмістіть петлю для кріплення на гачку. Переконайтесь, що запобіжний замок закритий.



Прикріпіть з одного боку до траверси якомога більше петель стропа. Почніть з петель з боку голови.



Піднімайте, поки не стане можливим перевернути пацієнта в потрібне положення.



Опускайте, поки не зникне натяг, і від'єднайте всі петлі.


Переміщення в положенні лежачи на спині

1



Помістіть строп під пацієнта, переконайтесь, що правильно визначений бік голови стропа.

2

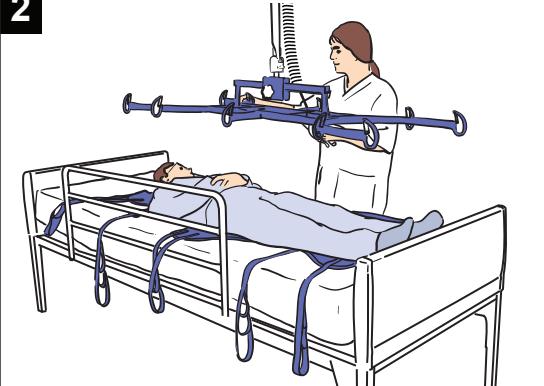


Розташуйте підйомник над пацієнтом.

3




Охопіть петлею строп
Розмістіть петлю для кріплення на гачку. Переконайтесь, що запобіжний замок закритий.

4

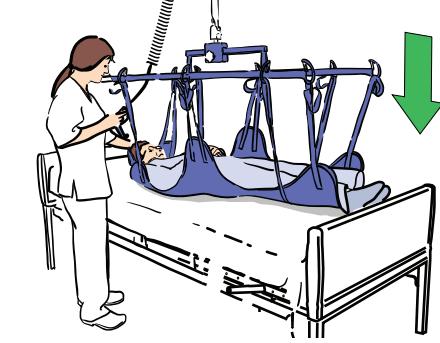


Обережно опустіть раму нош і вирівняйте центр рами з пупком пацієнта. Прикріпіть всі петлі стропа.

5

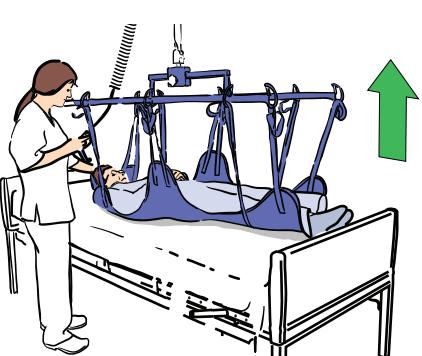


Підніміть і перемістіть пацієнта з ліжка.

6

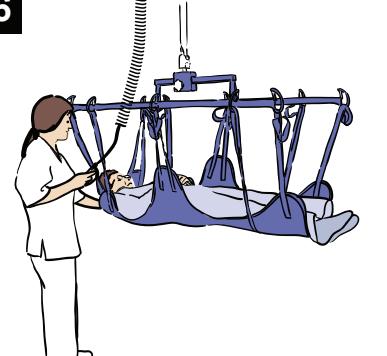


Перемістіть пацієнта.

7

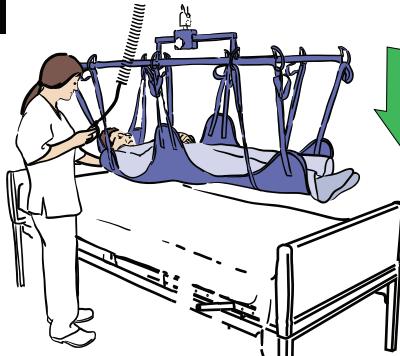

Опустіть пацієнта на нове місце і від'єднайте всі петлі.

8

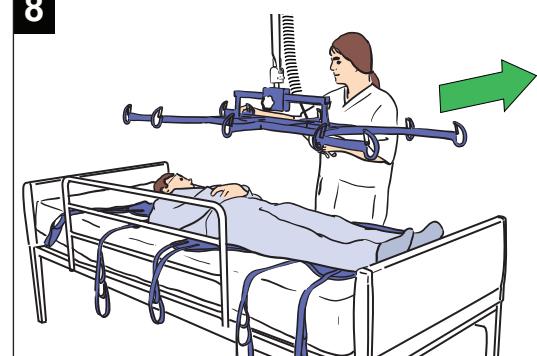

Перемістіть раму від пацієнта.

