


# Citadel Bettrahmen-System/ Patienten-Therapiesystem

## CPR-Notfallauslösung




Die belastete Rückenlehne kann schnell nach unten fallen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände einklemmen und verletzen.

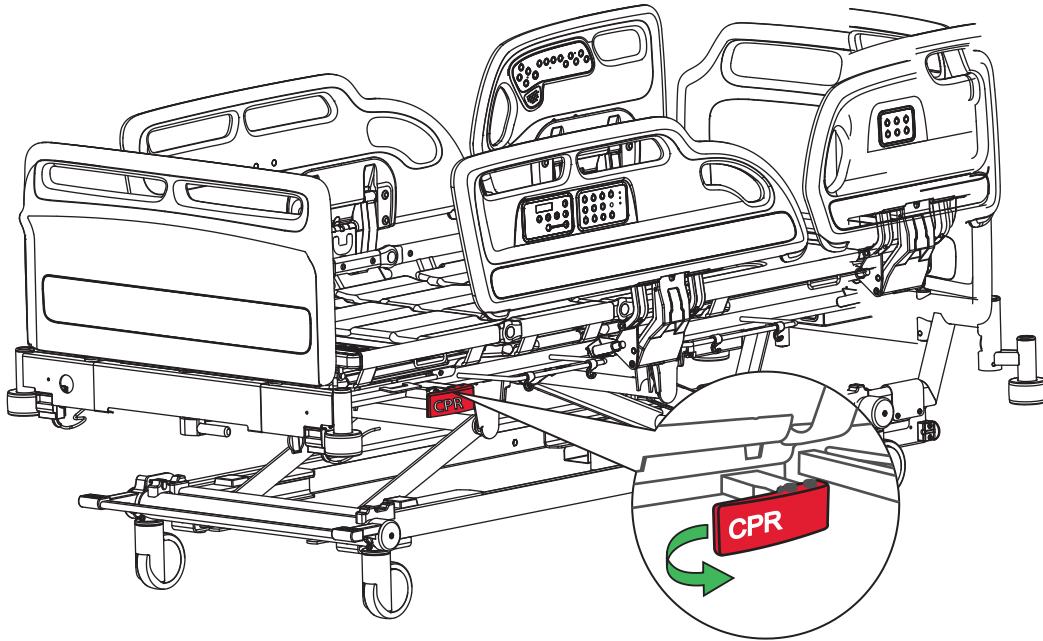


Ziehen Sie an dem roten CPR-Griff an einer der beiden Bettseiten, um die Rückenlehne schnell abzusenken.

## Bremsen und Lenken

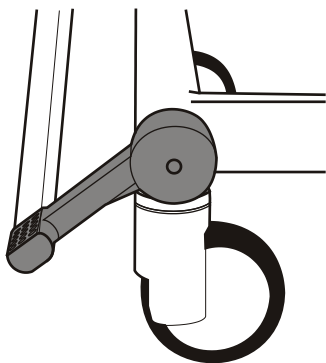


### Bremse

Bremsen an allen vier Lenkrollen festgestellt.

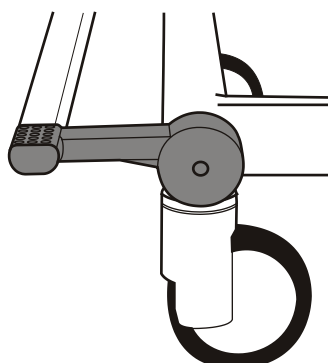

### Frei

Alle vier Lenkrollen können sich frei drehen und schwenken.

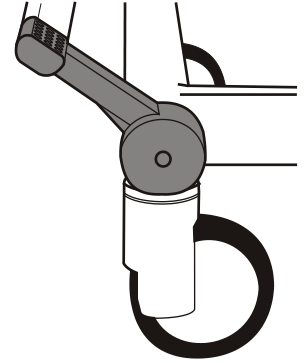


### Lenken

Alle vier Lenkrollen können sich drehen, aber die Richtungsrolle kann nicht geschwenkt werden.

Die Bremsen sollten stets arretiert sein, wenn das Bett steht.

## Sicherheitsseiten

1

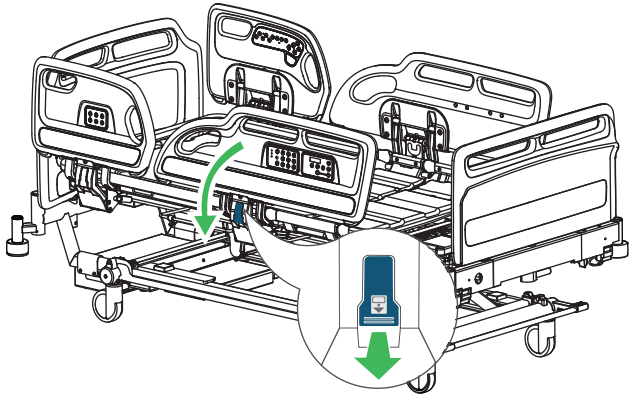


Ziehen Sie an dem blauen Lösehebel, um die Sicherheitsseite abzusenken.

2




Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsseiten in der hochgeklappten Position richtig eingerastet sind.

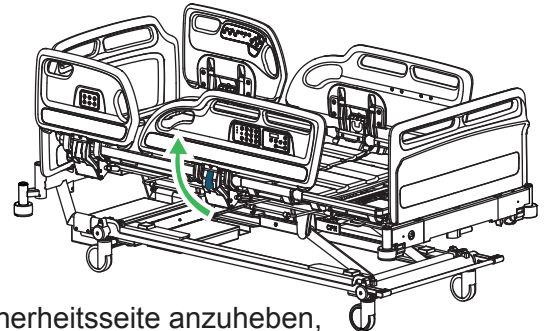

Um die Sicherheitsseite anzuheben, halten Sie den Griff der Sicherheitsseite fest und ziehen Sie die Sicherheitsseite nach oben vom Bett weg, bis sie in der hochgeklappten Position einrastet.


## Anpassung der Bettlänge (zwei Positionen)

1

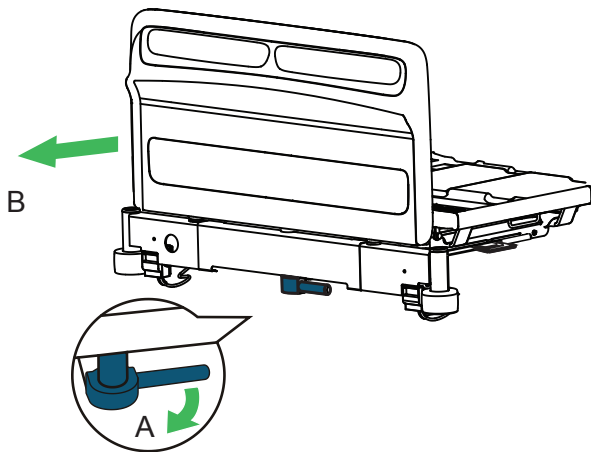


Den blauen Verriegelungshebel (A) ziehen. Den Bettrahmen (B) in die gewünschte Position ausziehen und den Hebel loslassen.

2

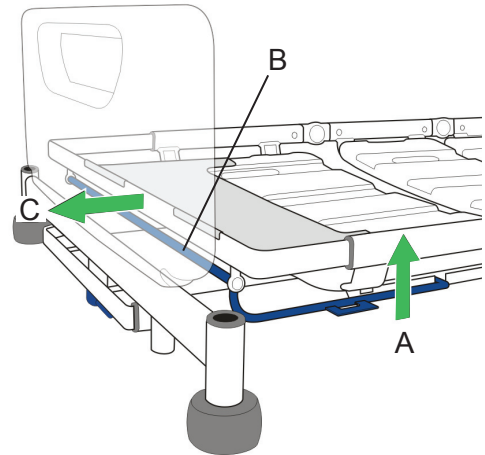

Den blauen Verriegelungshebel nach oben ziehen (A) und die Querstange (B) in der Mitte festhalten, dann die Matratzen-Liegefläche in die gewünschte Position ausziehen (C).

## Verlängerung der Luftdruckmatratze

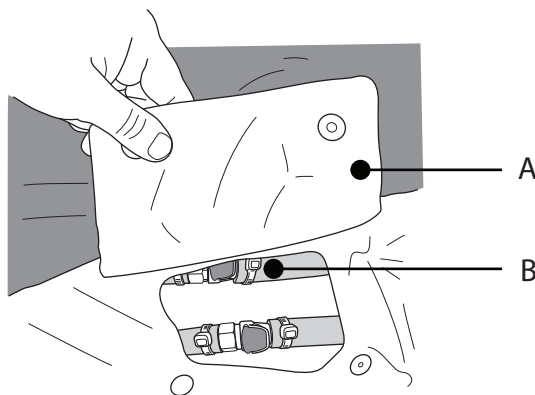

Am Fußende befindet sich die Verlängerungslasche. Die Lasche (A) anheben, um Zugang zu den zwei Sets von Verbindungselementen (B) zu erhalten. Die Verbindungselemente anschließen, um das Verlängerungspolster des Beinbereichs mit Luft zu füllen.