


# Σύστημα πλαισίου κλίνης/ Σύστημα θεραπείας ασθενών Citadel

## Λαβή απελευθέρωσης πλάτης για Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (CPR)




Η πλάτη μπορεί να πέσει απότομα. Μην πλησιάζετε τα χέρια σας για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

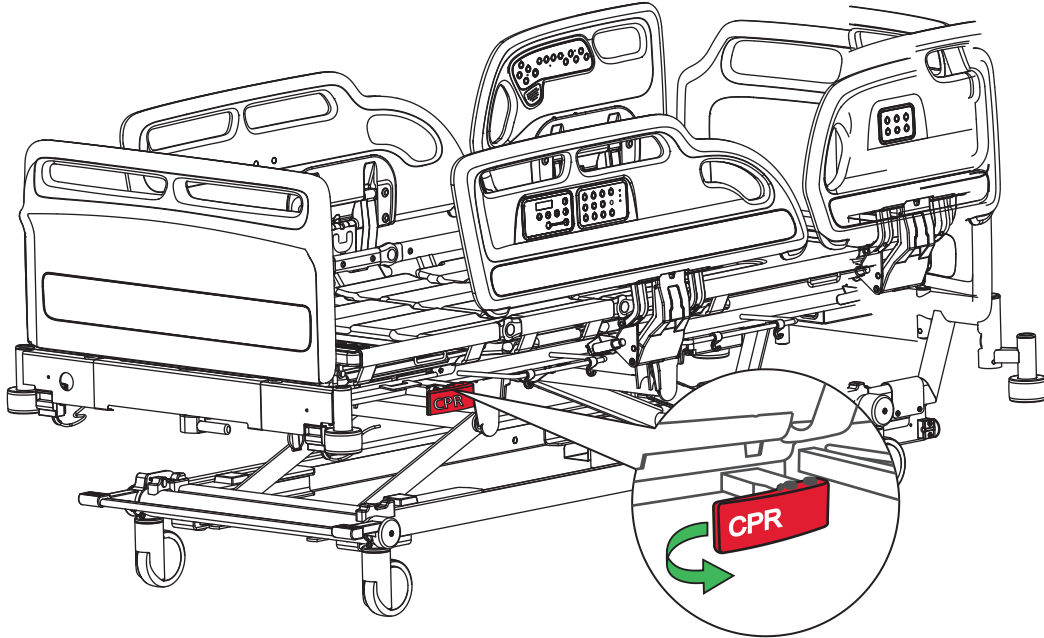


Τραβήξτε τις κόκκινες λαβές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της κλίνης για να χαμηλώσετε γρήγορα την πλάτη.

## Φρένα και αλλαγή κατεύθυνσης

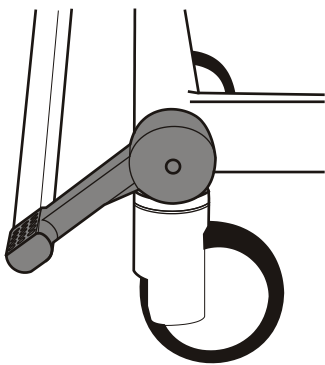


### Φρένα

Τα φρένα είναι ενεργοποιημένα και στους τέσσερις τροχούς.

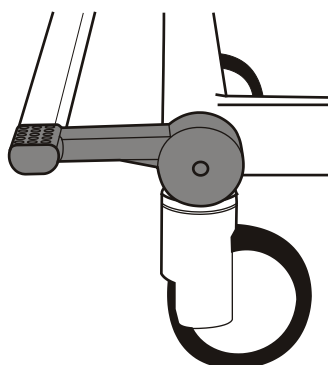

### Ελεύθερο

Και οι τέσσερις τροχοί μπορούν να περιστραφούν και να γυρίσουν ελεύθερα.

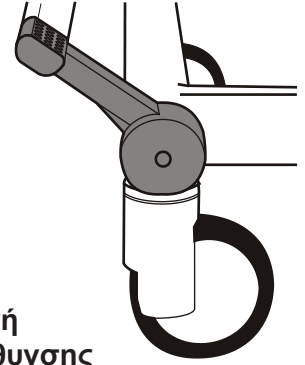


### Αλλαγή κατεύθυνσης

Και οι τέσσερις τροχοί μπορούν να περιστραφούν, αλλά οι τροχοί αλλαγής κατεύθυνσης δεν μπορούν να γυρίσουν.

Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένα όταν η κλίνη είναι ακίνητη.

## Πλευρικά κιγκλιδώματα

1

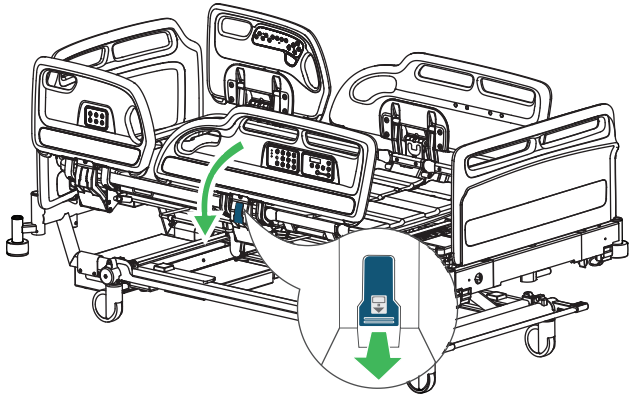


Τραβήξτε τον μπλε μοχλό απελευθέρωσης για να χαμηλώσετε το πλευρικό κιγκλιδώμα.

2




Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι ασφαλισμένα όταν βρίσκονται στην ανυψωμένη θέση.

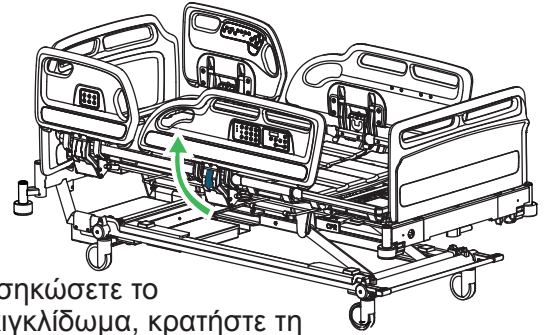

Για να ανασηκώσετε το πλευρικό κιγκλιδώμα, κρατήστε τη λαβή του πλευρικού κιγκλιδώματος και τραβήξτε το πλευρικό κιγκλιδώμα προς τα πάνω και μακριά από την κλίνη μέχρι να κλειδώσει στην ανυψωμένη θέση.


## Ρύθμιση μήκους κλίνης (δύο συγκεκριμένες θέσεις)

1

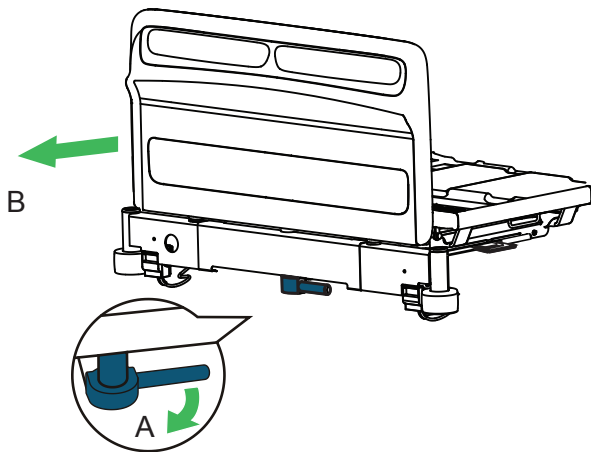


Τραβήξτε την μπλε λαβή κλειδώματος της επέκτασης (A). Τραβήξτε το πλαίσιο της κλίνης (B) στην απαιτούμενη θέση και αφήστε τη λαβή.

2

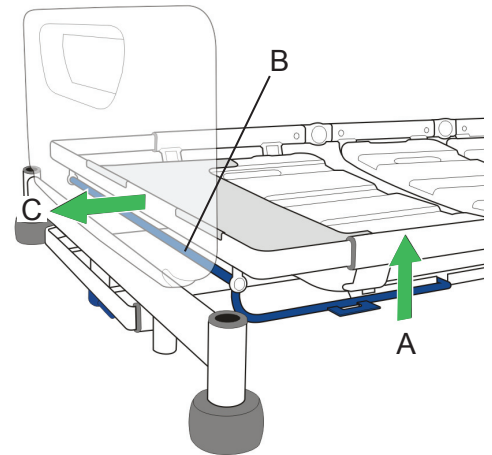

Σηκώστε τη μπλε ράβδο ασφάλισης προέκτασης (A) και κρατήστε το μέσο της ακραίας εγκάρσιας ράβδου (B), στη συνέχεια, τραβήξτε τη βάση του στρώματος στη θέση (C).

## Επέκταση μήκους στρώματος αέρος

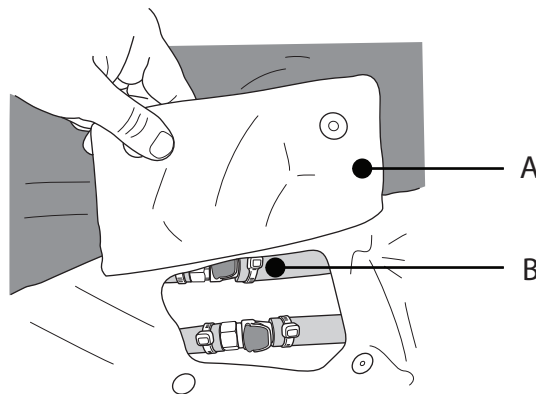

Εντοπίστε το πτερύγιο επέκτασης στα πόδια της κλίνης. Ανασηκώστε το πτερύγιο (A) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δύο σείτ συνδέσμων (B). Συνδέστε τους συνδέσμους για να πληρώσετε το μαξιλάρι επέκτασης στο τμήμα ποδιών.