


Sistema de estructura de cama y de tratamiento de pacientes Citadel

Liberación del respaldo para RCP




El respaldo puede caer de forma rápida; mantenga apartadas las manos para evitar lesiones.

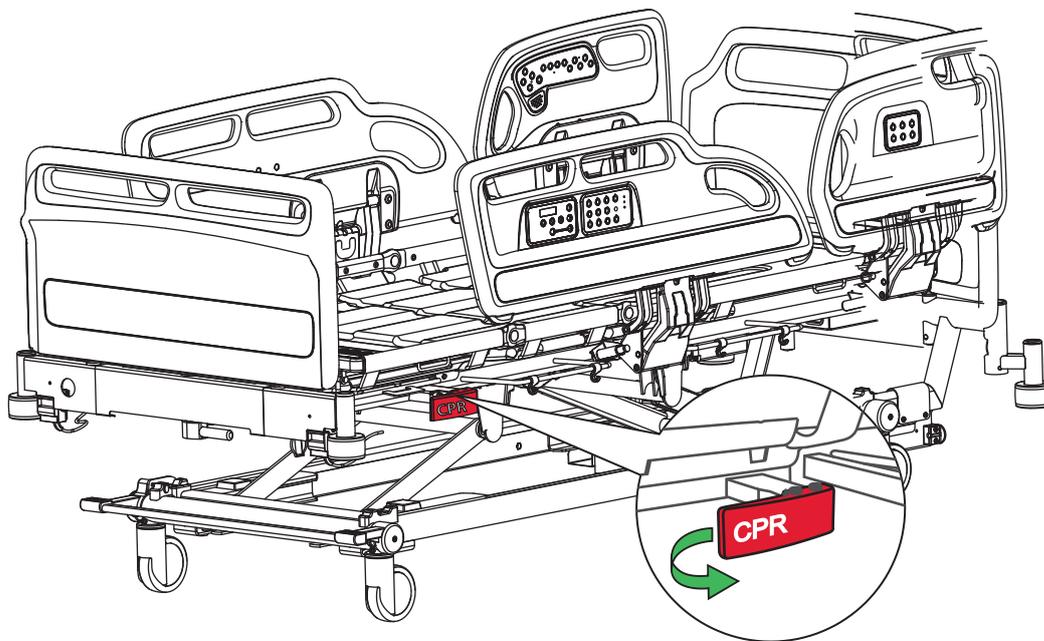


Tire de la palanca de RCP roja situada a ambos lados de la cama para bajar rápidamente el respaldo.

Frenos y dirección

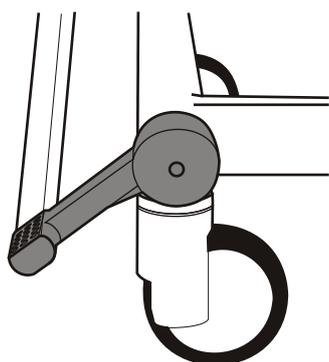


Freno

Los frenos están activados en las cuatro ruedas.

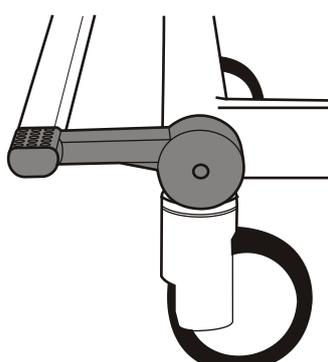

Libre

Las cuatro ruedas pueden rodar y girar libremente.

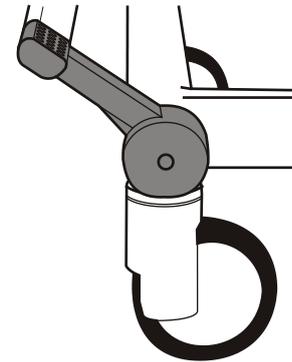


Dirección

Las cuatro ruedas pueden rodar, pero la rueda de dirección no puede girar.

Los frenos deben activarse siempre cuando la cama esté parada.

Barandillas laterales

1

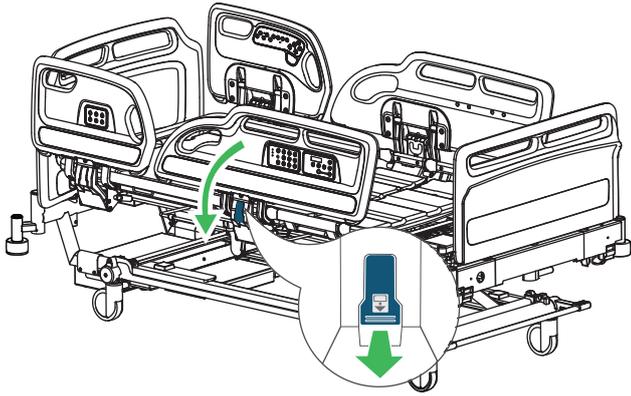


Tire de la palanca de desbloqueo azul para bajar la barandilla lateral.

2




Asegúrese de que la barandilla lateral está bien bloqueada cuando esté en posición elevada.

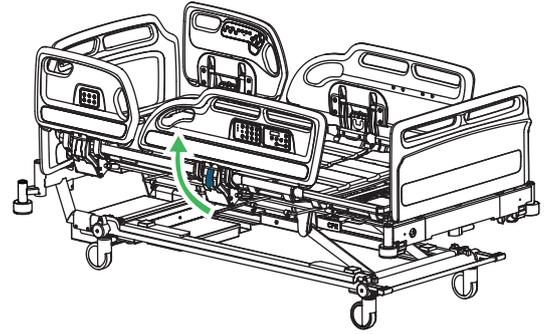

Para subir la barandilla lateral, sujete el asa y tire de la barandilla hacia arriba, separándola de la cama, hasta bloquearla en la posición levantada.


Ajuste de la longitud de la cama (dos posiciones)

1

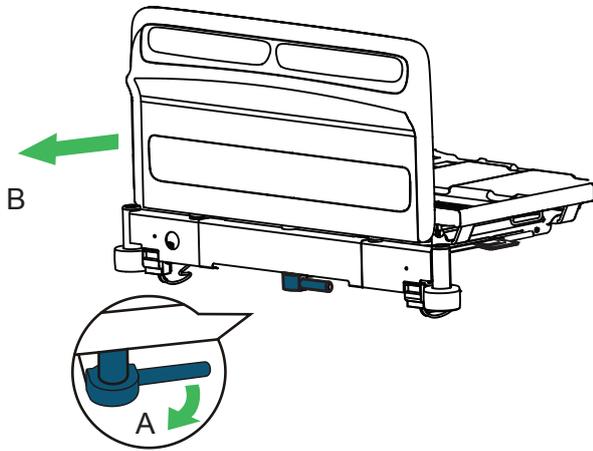


Tire de la palanca de bloqueo de extensión azul (A). Extienda la estructura de cama (B) hasta la posición requerida y suelte la palanca.

2

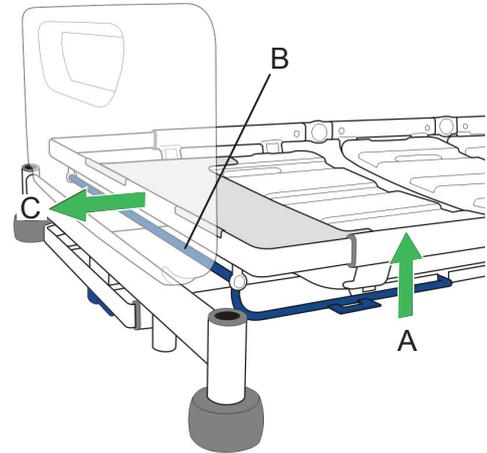

Levante la barra de enganche de extensión azul (A), sujete el centro del travesaño (B) y tire del somier hasta alcanzar la posición (C) deseada.

Extensión de la longitud del colchón de aire

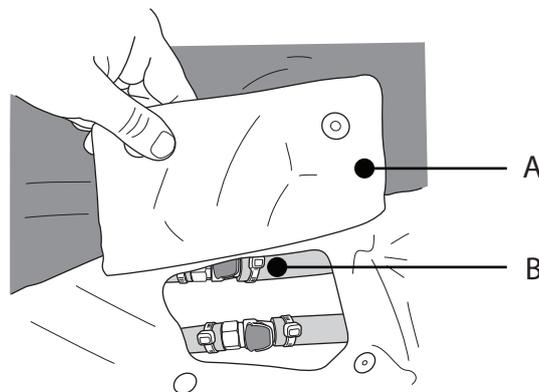

Localice la solapa de extensión situada a los pies de la cama. Levante la solapa (A) para acceder a los dos conjuntos de conectores (B). Conecte los conectores para inflar el cojín de extensión de la sección de las piernas.