


Système de sommier Citadel/ Système thérapeutique

Commande CPR du dossier




Le dossier peut se rabaisser rapidement ; éloigner les mains afin d'éviter toute blessure.

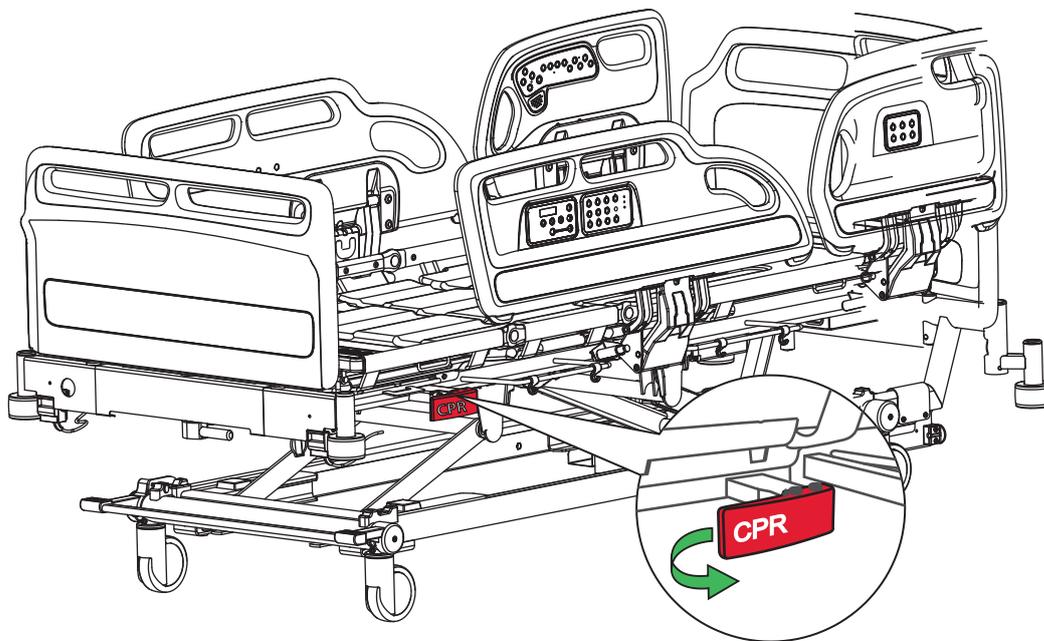


Tirer sur la poignée manuelle rouge de CPR située de chaque côté du lit pour abaisser rapidement le dossier.

Freins et roulette directionnelle

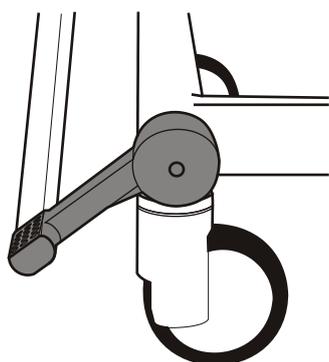


Frein

Les freins sont appliqués sur les quatre roulettes.

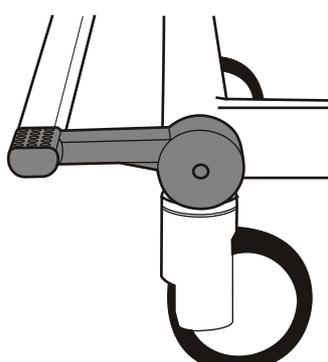

Libre

Les quatre roulettes peuvent tourner et pivoter librement.

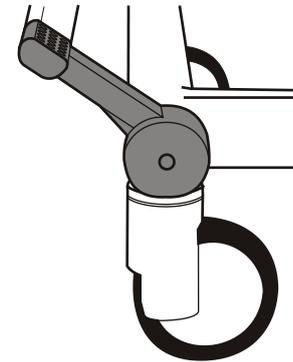


Conduite

Les quatre roulettes peuvent tourner librement, la roulette directionnelle ne peut pas pivoter.

Les freins doivent être enclenchés chaque fois que le lit est en position stationnaire.

Demi-barrières latérales

1

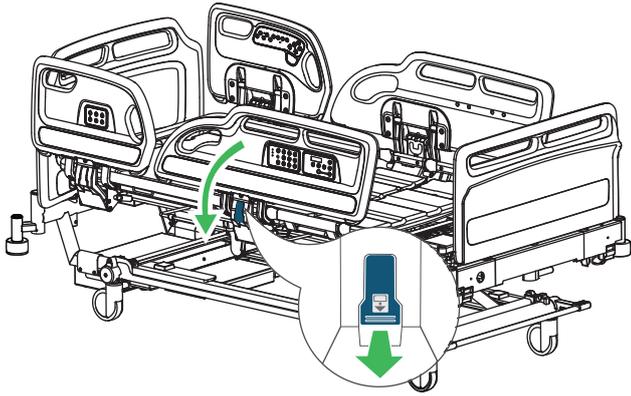


Tirer le levier de verrouillage bleu et abaisser la demi-barrière.

2




S'assurer que la demi-barrière est correctement enclenchée lorsque le lit est en position relevée.

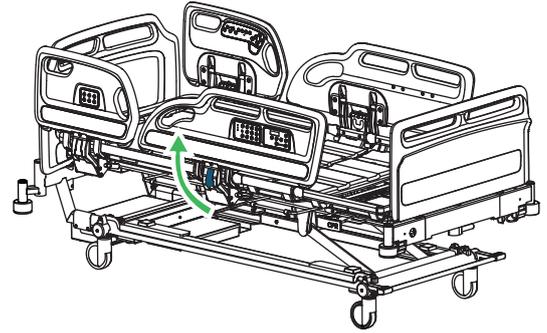

Pour la relever, tirer la demi-barrière vers le haut et la remonter en l'écartant du lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position relevée.


Réglage de la longueur du lit (deux positions possibles)

1

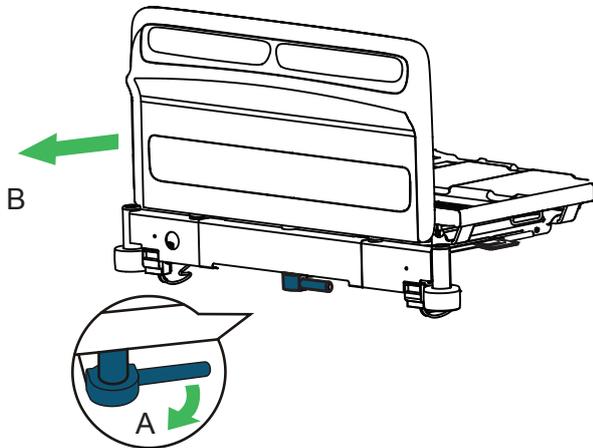


Tirer la poignée de verrouillage d'extension bleue (A). Tirer le sommier (B) jusqu'à la position requise puis relâcher la poignée.

2

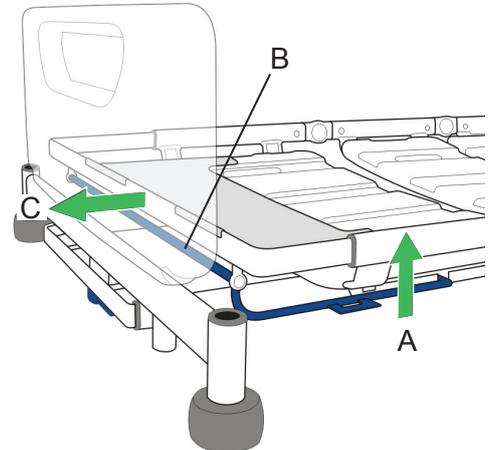

Soulever la barre d'extension bleue (A) et tenir le milieu de la barre transversale (B), puis tirer le sommier jusqu'à la position souhaitée (C).

Extension en longueur du matelas à air

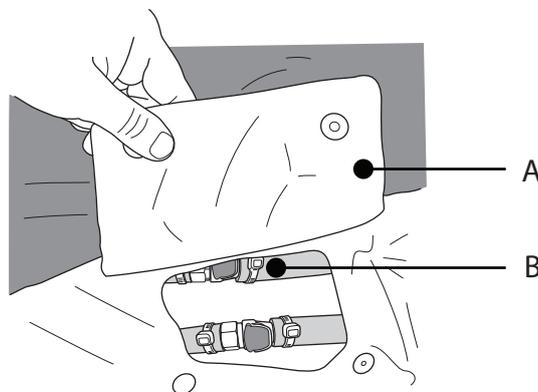

Repérer le rabat d'extension à l'extrémité des pieds. Soulever le rabat (A) pour accéder aux deux groupes de connecteurs (B). Raccorder les connecteurs pour gonfler le coussin d'extension dans la section jambes.