


# Sistema del letto/ Sistema terapeutico Citadel

## Sblocco RCP schienale




Lo schienale può abbassarsi velocemente; evitare che le mani restino schiacciate.

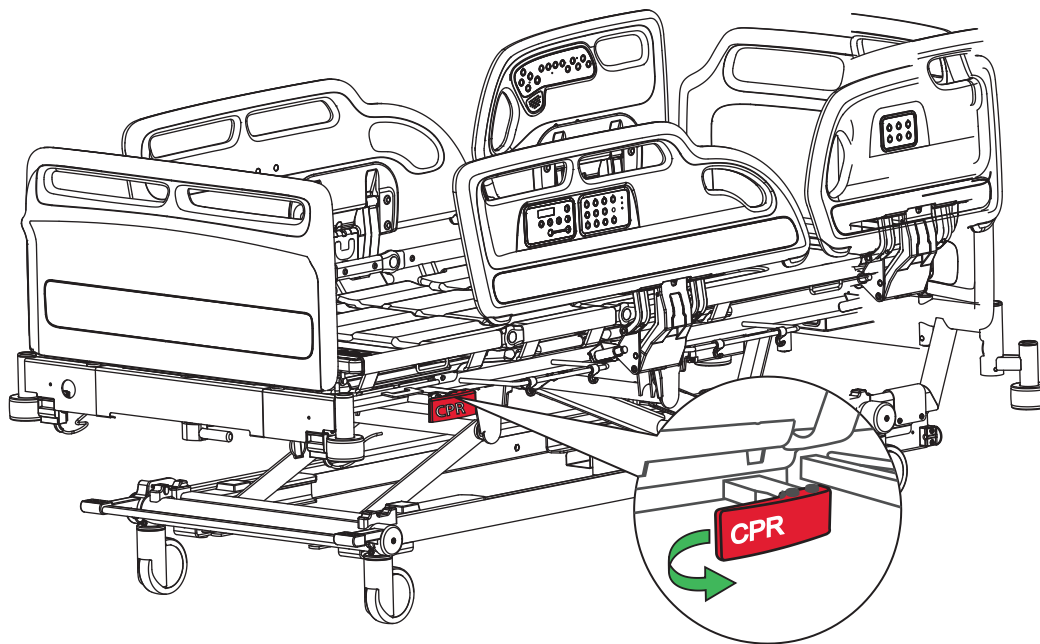


Tirare la maniglia rossa RCP su entrambi i lati del letto per abbassare velocemente lo schienale.

## Sistema frenante e di guida

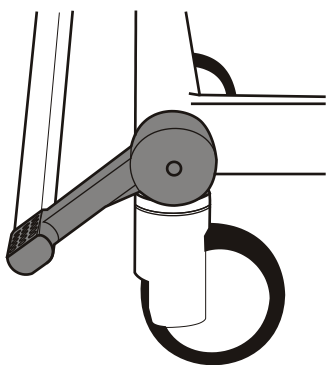


### Freni inseriti

Freni inseriti su tutte e quattro le ruote.

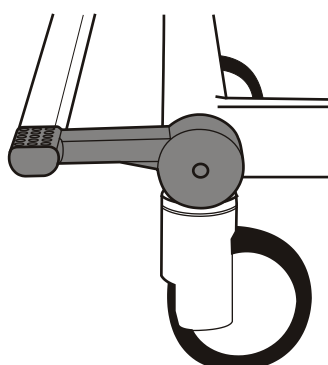

### Freni non inseriti

Tutte e quattro le ruote possono girare e ruotare liberamente.

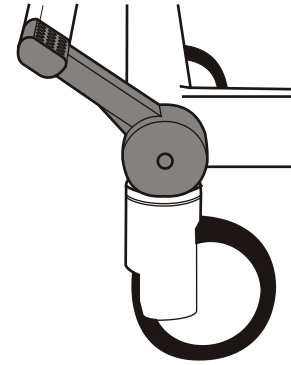


### Sistema di guida

Tutte e quattro le ruote possono girare, ma la ruota direzionale è bloccata.

I freni devono essere sempre inseriti quando il letto è fermo.

## Spondine laterali

1

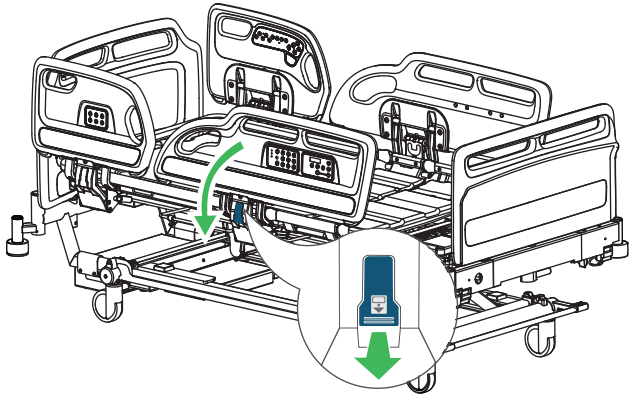


Tirare la leva blu di sgancio per abbassare la spondina laterale.

2




Accertarsi che la spondina laterale sia bloccata quando si trova in posizione alzata.

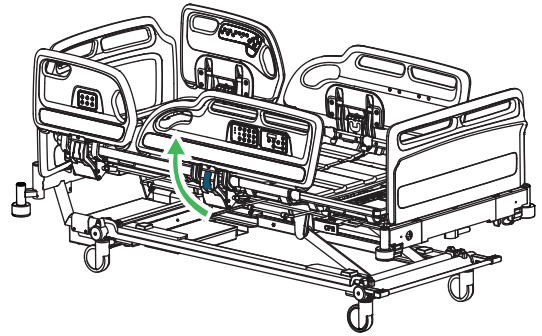

Per alzare la spondina laterale, afferrare la maniglia della spondina e tirare verso l'alto e verso l'esterno la spondina laterale, fino a bloccarla in posizione alzata.


## Regolazione della lunghezza del letto (due posizioni predefinite)

1

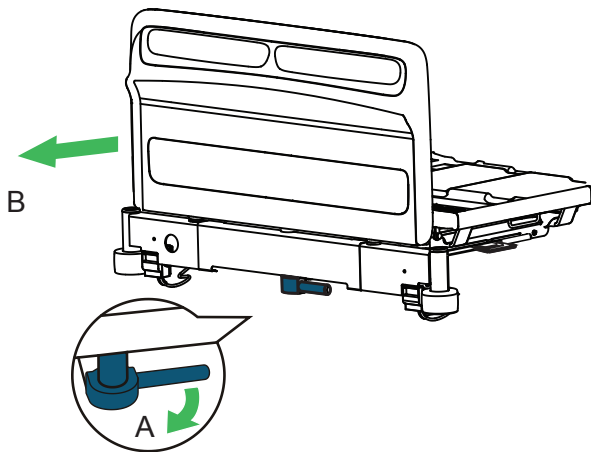


Tirare la maniglia blu di blocco estensione (A). Estrarre il telaio del letto (B) fino alla posizione desiderata e rilasciare la maniglia.

2

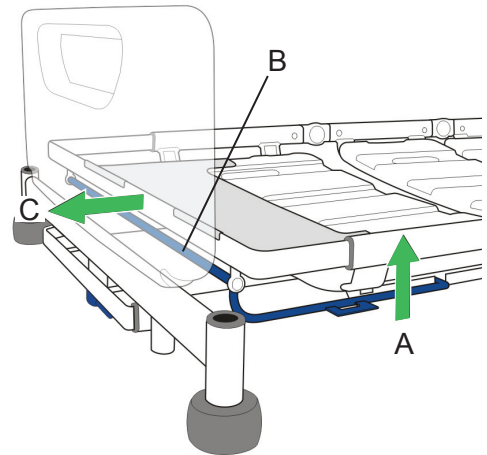

Sollevare la barra blu di supporto estensione (A) e afferrare la barra trasversale nel mezzo (B), quindi estrarre il pianale portamaterasso come desiderato (C).

## Estensione della lunghezza del materasso ad aria

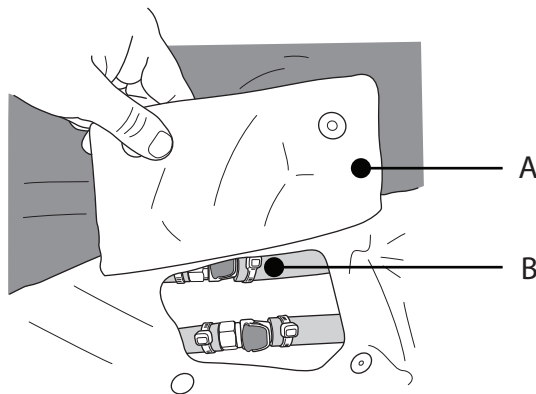

Individuare la linguetta di estensione sul lato piedi. Sollevare la linguetta (A) per accedere alle due serie di connettori (B). Collegare i connettori per gonfiare il cuscino di estensione nella sezione gambe.