


„Citadel“ lovos rėmų sistema / terapinė paciento sistema

Nugaros atlošo nuleidimas į ŠPR padėtį




Nugaros atlošas gali nukristi staiga; saugokite rankas, kad jų nesužalotų.

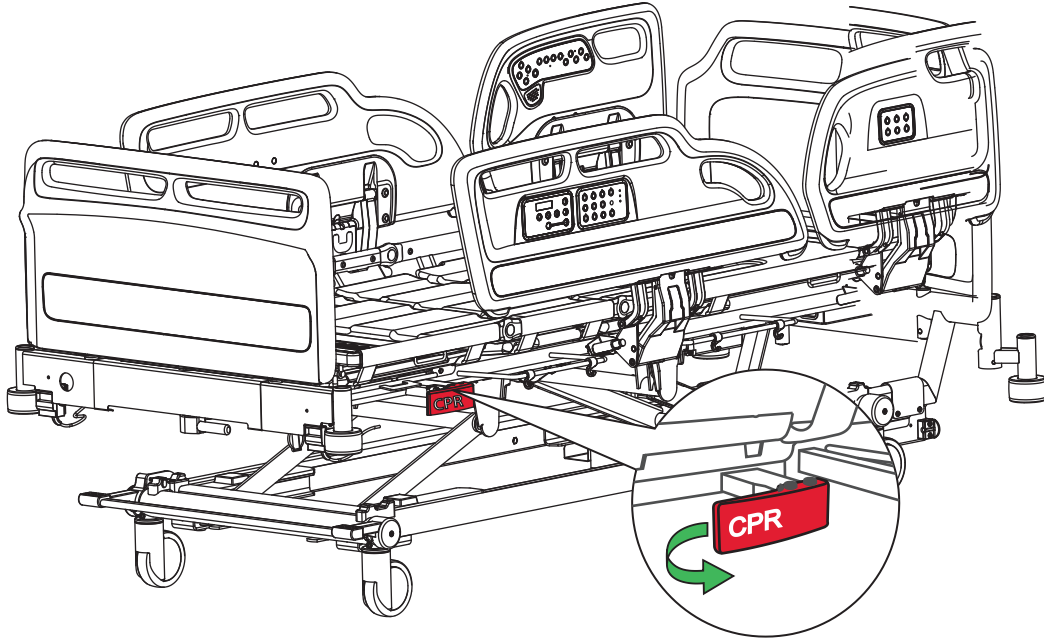


Patraukite raudoną ŠPR rankeną, kuri yra abiejose lovos pusėse, kad greitai nuleistumėte nugaros atlošą.

Stabdžiai ir valdymas

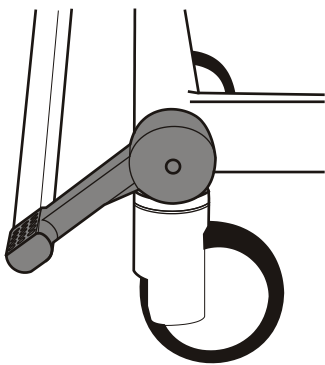


Stabdžiai

Ijungiami visų keturių ratukų stabdžiai.

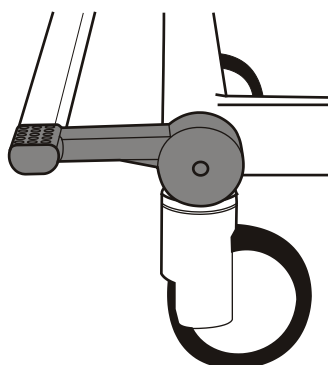

Laisvoji eiga

Visi keturi ratukai laisvai sukasi aplink savo ašis ir pasisuka į šonus.

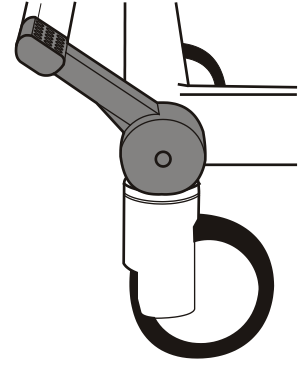


Valdymas

Visi keturi ratukai gali suktis apie savo ašis, tačiau vairavimo ratukas negali pasisukti į šoną.

Kai lova nejudinama, visada reikia įjungti stabdžius.

Šoniniai turėklai

1

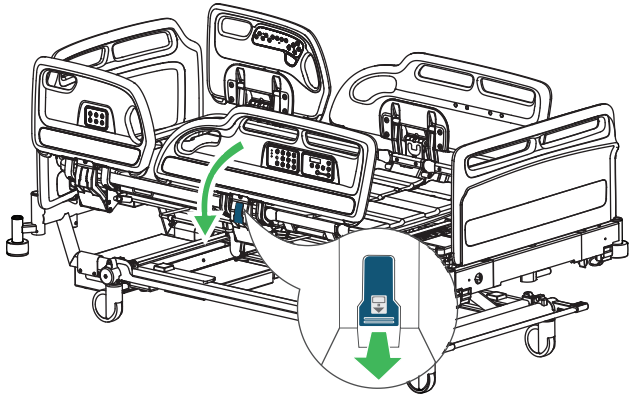


Patraukite mėlyną atjungimo svirtį, kad nuleistumėte šoninį turėklą.

2




Patikrinkite, ar šoniniai turėklai tvirtai užfiksuoti pakeltoje padėtyje.

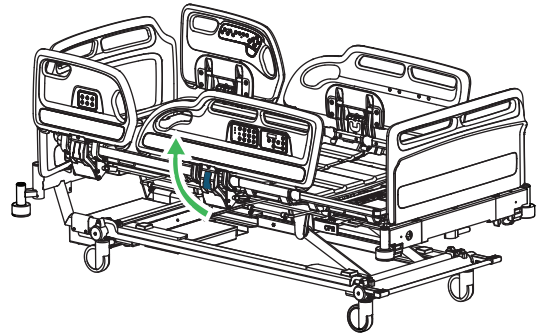

Kad pakeltumėte šoninį turėklą, laikydami jo rankeną traukite šoninį turėklą į viršų ir tolyn nuo lovos, kol jis užsifiksuoja pakeltoje padėtyje.


Lovos ilgio reguliavimas (dvi nustatomos padėties)

1

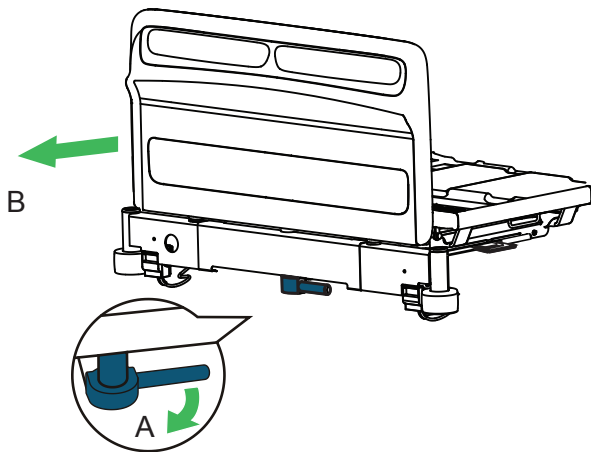


Patraukite mėlyną ilginamosios dalies fiksavimo rankeną (A). Ištraukite lovos rėmą (B) iki reikiamos padėties ir atleiskite rankeną.

2

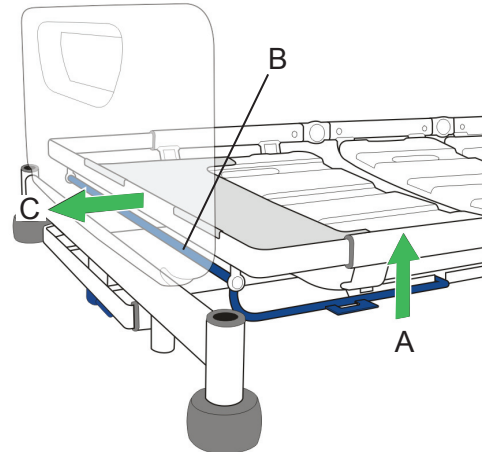

Laikydami viduriniąją galinio skersinio dalį (B) pakelkite mėlyną pailginimo sklėsčio strypą (A) ir ištraukite čiužinio platformą į reikiamą padėtį (C).

Pripučiamojo čiužinio pailginimas

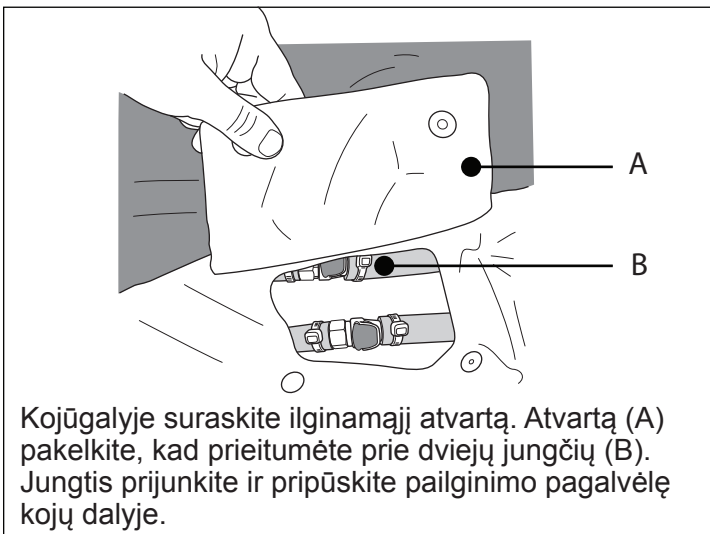

Kojūgalyje suraskite ilginamąjį atvartą. Atvartą (A) pakelkite, kad prieitumėte prie dviejų jungčių (B). Jungtis prijunkite ir pripūskite pailginimo pagalvėlę kojū dalyje.