


Система каркаса ліжка Citadel / система для лікування пацієнта

Вивільнення спинки для СЛР




Спинка може швидко опуститися; притримуйте її рукою, щоб уникнути травми.

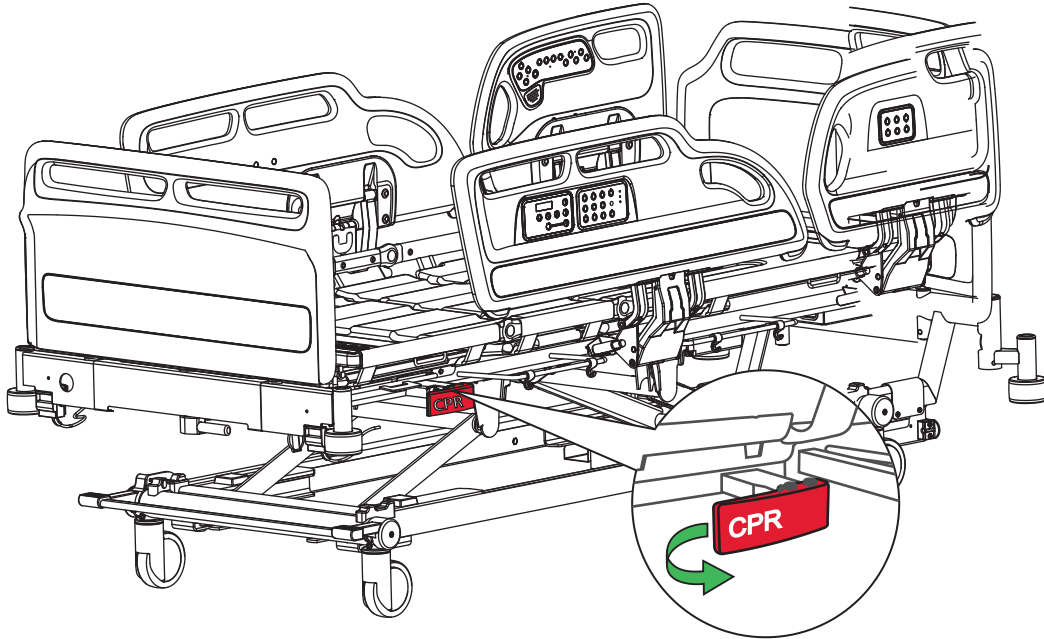


Щоб швидко опустити спинку, потягніть за одну з червоних ручок СЛР (CPR), розташованих з обох боків ліжка.

Гальма та керування

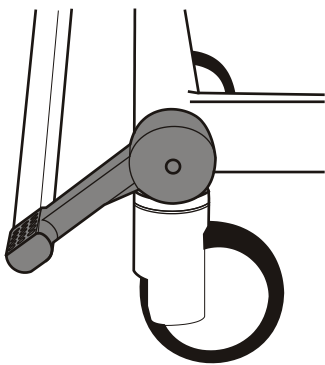


Гальма

Гальма застосовують на всіх чотирьох коліщатах.

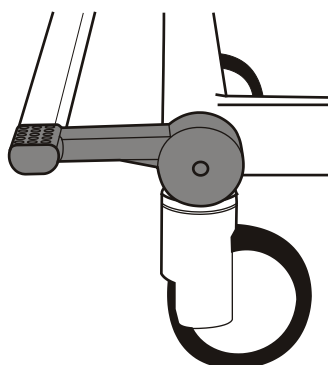

Вільний рух

Усі чотири коліщата можуть вільно обертатися та повертатися.

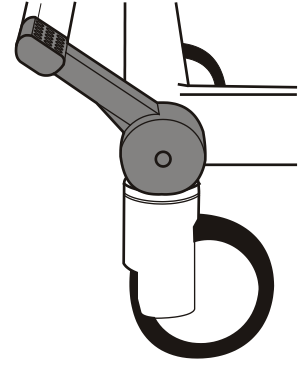


Керування

Усі чотири коліщата можуть обертатися, коліщатко керування не може повертатися.

Гальма повинні бути задіяні протягом усього часу, коли ліжко не переміщують.

Бічні поручні

1

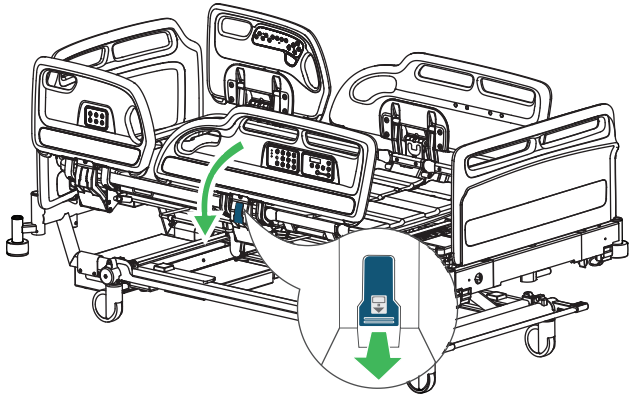


Потягніть синій важіль вивільнення, щоб опустити бічний поручень.

2




Прослідкуйте, щоб бічний поручень був надійно зафіксований у піднятому положенні.

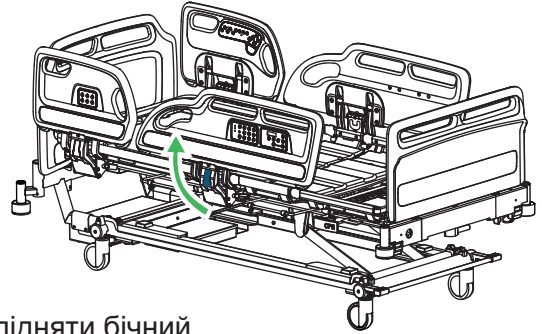

Щоб підняти бічний поручень, утримуйте ручку бічного поручня й тягніть бічний поручень угору й убік від ліжка, поки він не буде зафіксований у піднятому положенні.


Регулювання довжини ліжка (два задані положення)

1

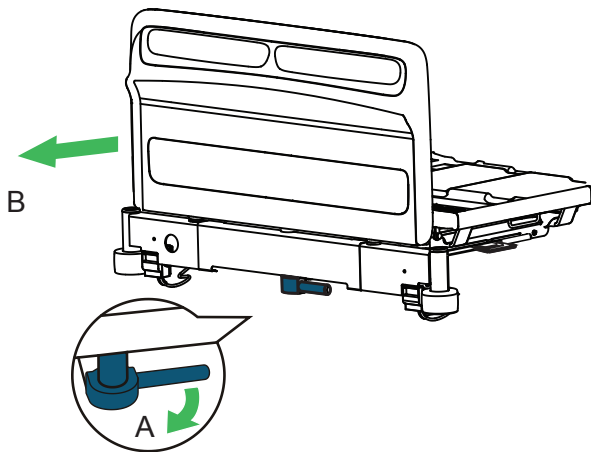


Потягніть синю ручку (A) фіксації подовжувача. Витягніть каркас (B) ліжка до потрібного положення та відпустіть ручку.

2

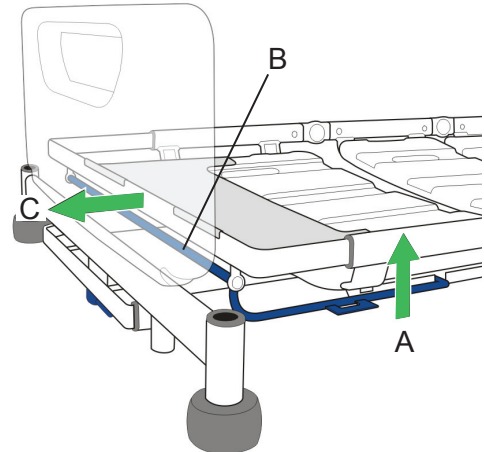

Підніміть синю фіксувальну штангу (A) подовжувача й утримуйте середину поперечини (B), потім потягніть матрацну платформу в положення (C).

Подовження повітряного матраца

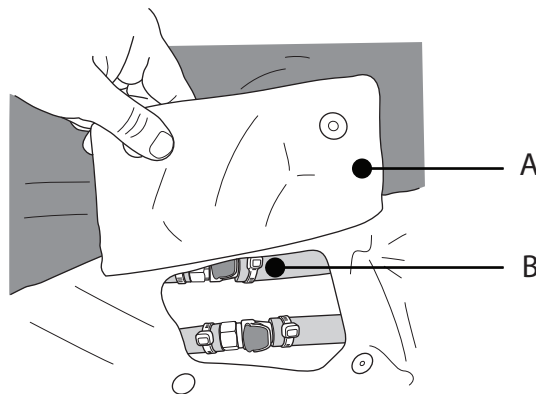

Розташуйте клапан подовжувача з боку ніг пацієнта. Підніміть клапан (A), щоб отримати доступ до двох наборів з'єднувачів (B). Приєднайте з'єднувачі, щоб надути подушку подовжувача в секції ніг.