


CPR 靠背释放




背板可能会快速落下;应将手远离以避免受伤。

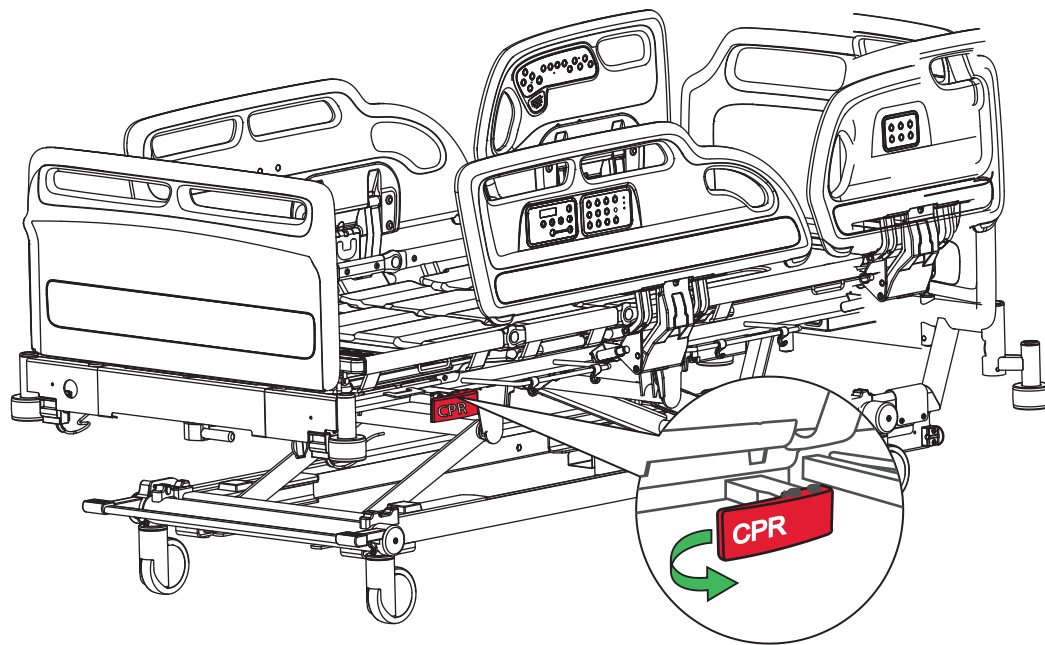


拉动位于病床任一侧的红色 CPR 手柄,以快速降低靠背。


制动和转向

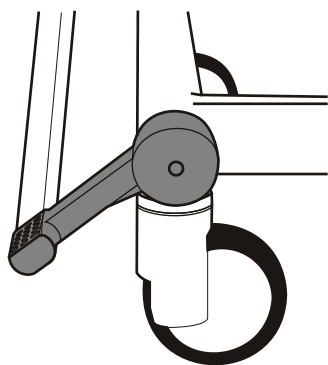

制动
四个脚轮均施加制动。

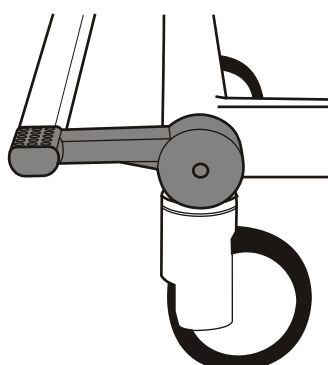

自由
四个脚轮均可自由滚动和转向。

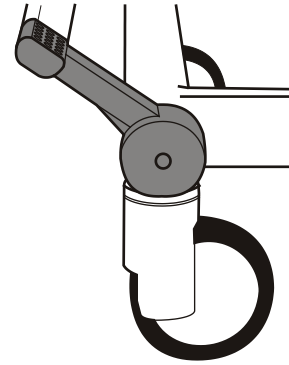


转向
四个脚轮均可滚动,但转向脚轮不能旋转。

当病床处于静止状态时,应一直使用制动装置。

护栏

1

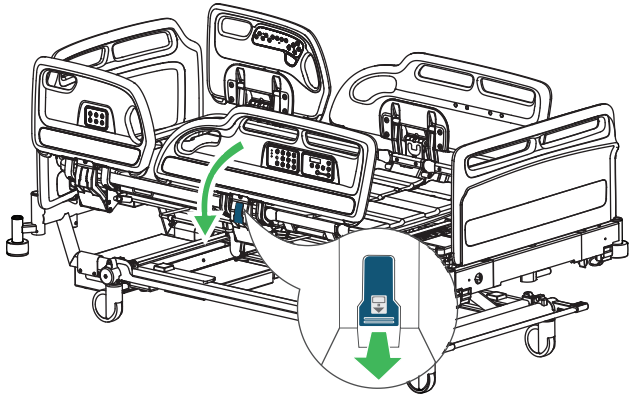


向外拉蓝色解锁手柄以调低侧护栏。

2




确保侧护栏在上升位置时被安全锁定。

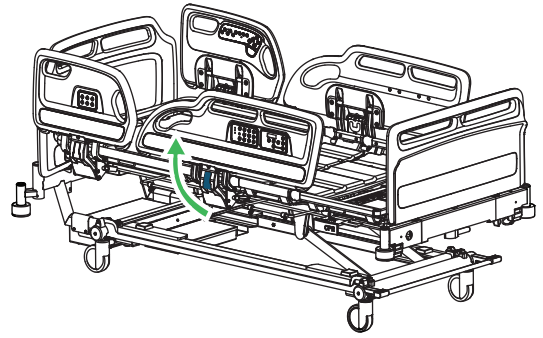

要抬起侧护栏, 请握住侧护栏把手, 向上拉动并使其远离病床, 直到其锁定在升高位置。


病床长度调整(两个给定位置)

1

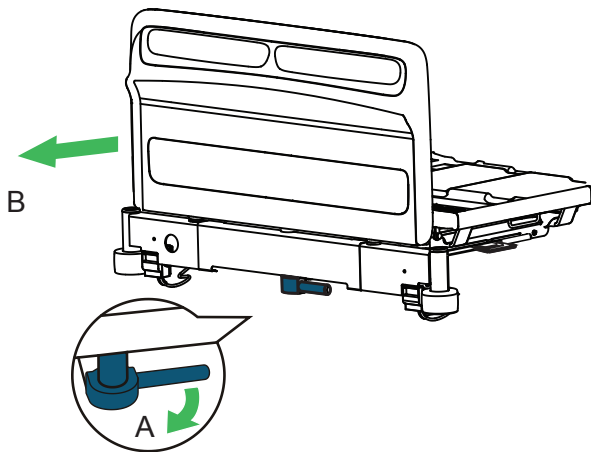


向外拉出蓝色的延长锁定手柄 (A)。将床架 (B) 拉出至所需位置并释放手柄。

2

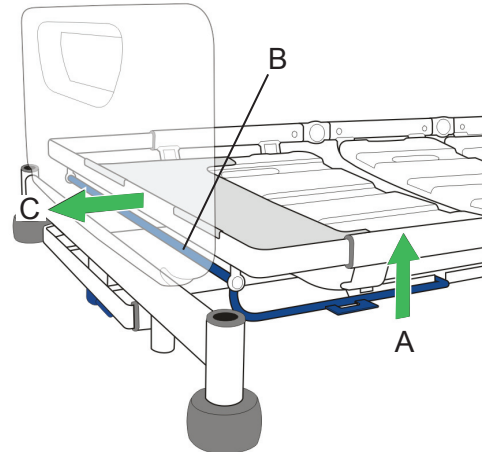

举起蓝色延长推动杆 (A), 握住末端横杆的中部 (B), 将床垫平台拉出到位置 (C)。

气垫长度延长

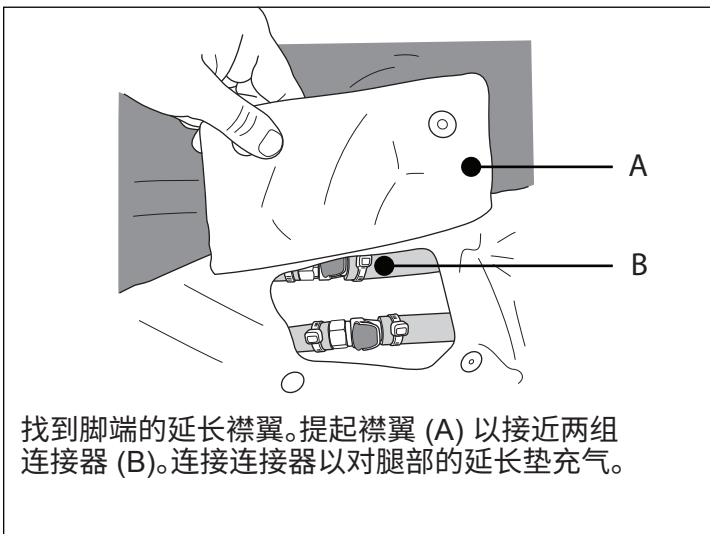

找到脚端的延长襟翼。提起襟翼 (A) 以接近两组连接器 (B)。连接连接器以对腿部的延长垫充气。