

Hlavní vypínač

Stiskněte a přidržte dvě sekundy pro zapnutí nebo vypnutí.



Tlačítko blokování

Stiskněte a přidržte dvě sekundy pro zablokování nebo odblokování všech funkcí.



Indikátor spuštěné postranice

Indikuje spuštění levé nebo pravé postranice.



Indikátor Fowlerovy polohy

Indikuje, že úhel naklonění ve Fowlerově poloze je větší než 30°.



Indikátor alarmu

Indikuje existenci alarmového stavu.



Tlačítko ztlumení / zrušení alarmu

Stiskněte pro zrušení nebo pro potvrzení alarmu.



Tlačítko vyfouknutí sedáku

Stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci vyfukování sedáku.



Tlačítko vyfouknutí hlavové části

Stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci vyfukování hlavové části.



Tlačítko zpevnění matrace

Stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci funkce zpevnění matrace.



Tlačítko přesunu pacienta/klienta

Stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci přesunu pacienta/klienta.

Natačení



Natočení pacienta/klienta doprava

(asistenční funkce)

Stiskněte pro natočení pacienta/klienta doprava v úhlu 20°.



Tlačítko natočení pacienta/klienta do středu

Stiskněte pro natočení pacienta/klienta z boku do polohy na zádech.



Natočení pacienta/klienta doleva

(asistenční funkce)

Stiskněte pro natočení pacienta/klienta doleva v úhlu 20°.



30 min



15 min



8 min



2 min



Tlačítko pozdržení trvalého otáčení pacienta/klienta (volitelná konfigurace)


Stiskněte pro aktivaci trvalého otáčení pacienta/klienta.

Ovládací prvky pro nastavení tlaku vzduchu



Přednastavená výška a hmotnost

Stiskněte tlačítko pro výběr typu postavy a hmotnosti pacienta/klienta.

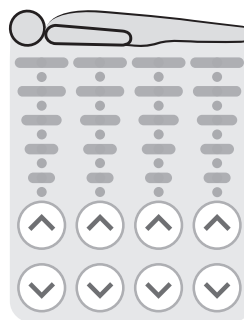


Indikátory tlakových zón

Stiskněte šipky nahoru pro zvýšení tlaku.

Stiskněte šipky dolů pro snížení tlaku.


Pulzační terapie / terapie střídavým tlakem (volitelná konfigurace)

Střídavý tlak

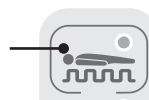

15 min

Vysoká pulzace

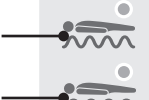

10 min

Střední pulzace



5 min

Střední pulzace

Tlačítko pulzace / terapie AP



Tlačítko délky cyklu pulzace / terapie AP



Tlačítko pulzace / terapie AP

Stiskněte pro nastavení intenzity pulzační terapie.



Tlačítko délky cyklu pulzace / terapie AP

Stiskněte pro výběr délky cyklu pulzace.

