**Gumb za uključivanje/isključivanje**

Pritisnite i držite dvije sekunde za uključivanje ili isključivanje.

**Gumb za blokiranje**

Pritisnite i držite dvije sekunde za aktivaciju ili deaktivaciju blokiranja svih funkcija.

**Indikator spuštene bočne ograde**

Označava kada je lijeva ili desna bočna ograda spuštena.

**Indikator kuta Fowlerova položaja**

Označava kada je kut Fowlerova položaja veći od 30°.

**Indikator alarma**

Označava kada postoji stanje alarma.

**Gumb za utišavanje/brisanje alarma**

Pritisnite da biste izbrisali indikator alarma ili potvrdili alarm.

**Gumb za ispuhivanje sjedišta**

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali ispuhivanje sjedišta.

**Gumb za ispuhivanje odjeljka za glavu**

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali ispuhivanje odjeljka za glavu.

**Gumb za čvrsti madrac**

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju čvrstog madraca.

**Gumb za transport pacijenta**

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali transport pacijenta.

Okretanje



Gumb za okretanje pacijenta udesno (uz pomoć bolničara)

Pritisnite da biste okrenuli pacijenta 20° na njegovu desnu stranu.



Gumb za vraćanje pacijenta u sredinu

Pritisnite da biste vratili pacijenta iz okrenutog položaja u ravni.



Gumb za okretanje pacijenta ulijevo (uz pomoć bolničara)

Pritisnite da biste okrenuli pacijenta 20° na njegovu lijevu stranu.



30 min

Stalno okretanje pacijenta Gumb za vrijeme zadržavanja (dodatna konfiguracija)

Pritisnite za pokretanje kontinuiranog okretanja pacijenta.



15 min




8 min



2 min




Komande za prilagođavanje tlaka zraka

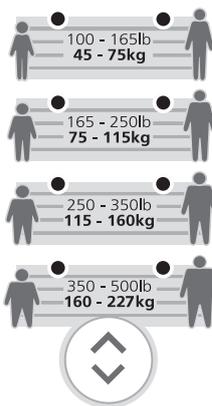

Zadane postavke visine/težine

Pritisnite gumb za odabir tjelesne građe i težine pacijenta.

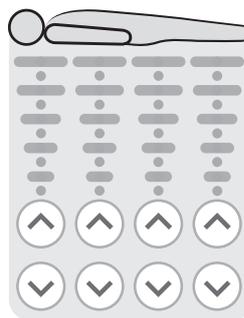


Indikatori zone tlaka

Pritisnite strelice prema gore za povećanje tlaka.

Pritisnite strelice prema dolje za smanjenje tlaka.

Terapija pulsiranja / naizmjeničnog tlaka (dodatno)

Naizmjenični tlak

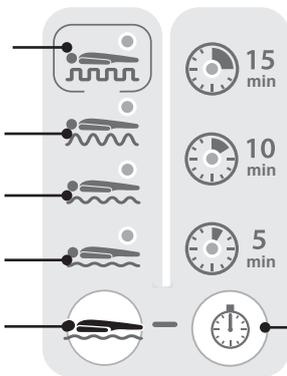

Visoko pulsiranje

Srednje pulsiranje

Srednje pulsiranje

Gumb za terapiju pulsiranja / naizmjeničnog tlaka

Gumb za trajanje ciklusa pulsiranja / naizmjeničnog tlaka



Gumb za terapiju pulsiranja / naizmjeničnog tlaka

Pritisnite za podešavanje intenziteta terapije pulsiranja.



Gumb za trajanje ciklusa pulsiranja / naizmjeničnog tlaka

Pritisnite za odabir trajanja ciklusa pulsiranja.