


# Sistema terapeutico integrato Citadel

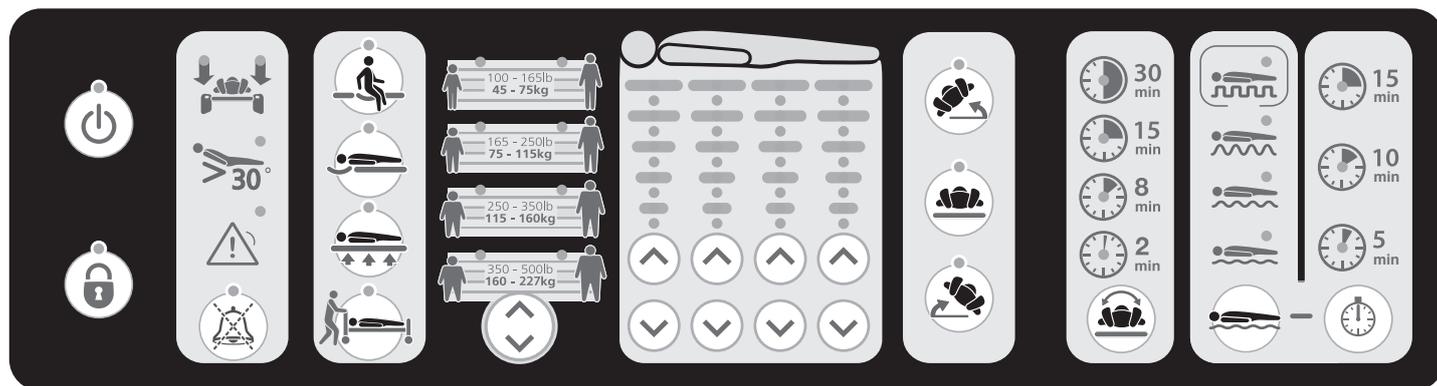

## Interruttore di accensione/spengimento

Tenere premuto per due secondi per accendere o spegnere.



## Pulsante di blocco

Tenere premuto per due secondi per attivare o disattivare il blocco di tutte le funzioni.



## Indicatore spondina laterale abbassata

Indica quando la spondina laterale sinistra o destra sono abbassate.



## Indicatore angolo Fowler

Indica quando l'angolo Fowler è maggiore di 30°.



## Indicatore di allarme

Indica una condizione di allarme.



## Pulsante di disattivazione dell'audio/cancellazione allarme

Premere per cancellare o confermare un allarme.



## Pulsante di sgonfiaggio zona sacrale

Premere per attivare o disattivare lo sgonfiaggio della zona sacrale.



## Pulsante di sgonfiaggio zona testa

Premere per attivare o disattivare lo sgonfiaggio della zona testa.



## Pulsante di rigidità materasso

Premere per attivare o disattivare la funzione di rigidità del materasso.



## Pulsante di trasporto paziente

Premere per attivare o disattivare il trasporto del paziente.

## Rotazione



**Pulsante di rotazione del paziente verso destra (assistita dall'infermiere)**  
Premere per ruotare il paziente di circa 20° verso destra.



**Pulsante di posizione centrale paziente**  
Premere per far tornare il paziente in posizione piana dopo una rotazione.



**Pulsante di rotazione del paziente verso sinistra (assistita dall'infermiere)**  
Premere per ruotare il paziente di circa 20° verso sinistra.



30 min

**Pulsante di rotazione laterale continua del paziente con tempo di mantenimento (configurazione opzionale)**



15 min

Premere per avviare una rotazione laterale continua del paziente.



8 min




2 min



## Controlli della regolazione della pressione dell'aria



**Altezza/Peso preimpostati**  
Premere il pulsante per selezionare il tipo di corporatura e il peso del paziente.

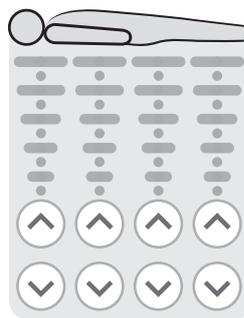


**Indicatori di pressione delle zone**

Premere le frecce in su per aumentare la pressione.

Premere le frecce in giù per diminuire la pressione.

## Pulsoterapia / terapia a pressione alternata (configurazione opzionale)

Pressione alternata

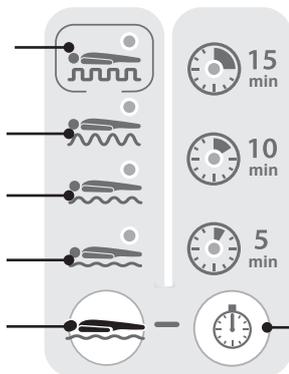

Pulsazione elevata

Pulsazione media

Pulsazione media

Pulsante per pulsazione/PA

Pulsante di durata ciclo di pulsazione/PA



**Pulsante per pulsazione/PA**  
Premere per regolare l'intensità della pulsoterapia.



**Pulsante di durata ciclo di pulsazione/PA**  
Premere per selezionare la durata del ciclo di pulsazioni.