


Citadel науқасты емдеу жүйесі

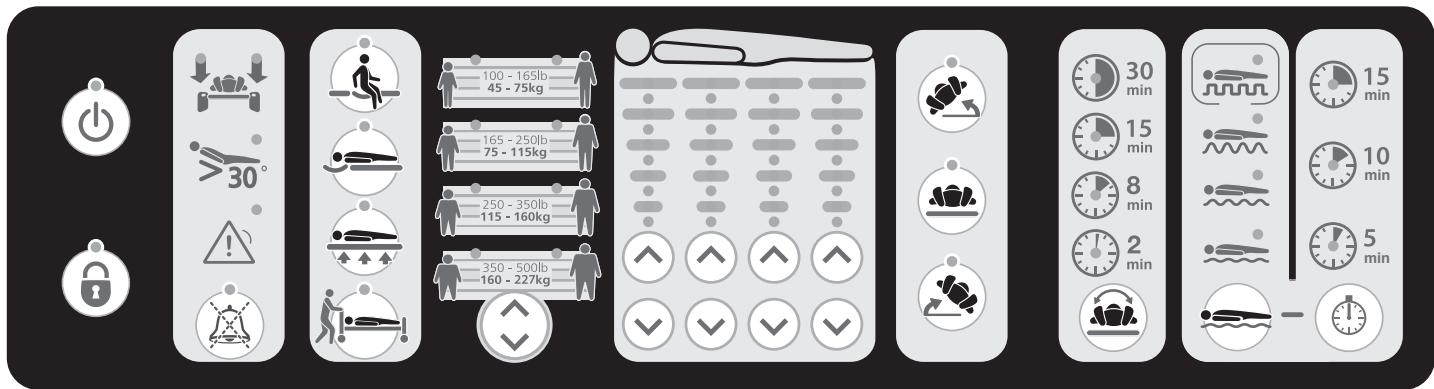

Қосу / Өшіру түймесі

Қосу не өшіру үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.



Құлыптау түймесі

Барлық функцияларды құлыптау функциясын қосу не өшіру үшін екі секунд бойы басып тұрыңыз.



Бүйірлік қоршауды төмен түсіру индикаторы

Сол не оң жақтағы бүйірлік қоршаулар төмен түскен кезде жанады.



Фаулер бұрышының индикаторы

Фаулер бұрыши 30°-тан үлкенірек болған кезде жанады.



Дабыл индикаторы

Дабыл жағдайы бар болған кезде жанады.



Дабыл дыбысын өшіру / Дабылды жою түймесі

Дабыл индикаторын жою немесе дабылды растау үшін басыңыз.



Орындықты төмен түсіру түймесі

Орындықты төмен түсіру функциясын қосу не өшіру үшін басыңыз.



Басты төмен түсіру түймесі

Басты төмен түсіру функциясын қосу не өшіру үшін басыңыз.



Қатты матрас түймесі

Қатты матрас функциясын қосу не өшіру үшін басыңыз.



Науқасты тасымалдау түймесі

Науқасты тасымалдау функциясын қосу не өшіру үшін басыңыз.

Бұру



Науқасты оңға бұру түймесі (медбике көмекшісі)

Науқасты 20°-қа оңға қарай бұру үшін басыңыз.



Науқасты центрлеу түймесі

Бұрылған қалыптан түзу қалыпқа оралу үшін басыңыз.



Науқасты солға бұру түймесі (медбике көмекшісі)

Науқасты 20°-қа солға қарай бұру үшін басыңыз.




Науқасты тоқтаусыз бұру

Ұстап тұру уақыты түймесі (қосымша конфигурация)


Науқасты тоқтаусыз бұра бастау үшін басыңыз.

Ая қысымын реттеуді басқару элементтері

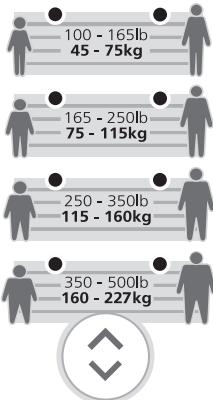

Бойға/салмаққа қатысты алдын ала реттеулер

Науқастың дене типі мен салмағын таңдау үшін түймені басыңыз.

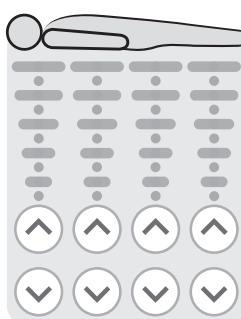


Қысым аймағының индикаторлары

Қысымды көбейту үшін жоғары қарайтын көрсеткілерді басыңыз.

Қысымды азайту үшін төмен қарайтын көрсеткілерді басыңыз.

Пульсация/Құбылмалы қысым терапиясы (қосымша)

Құбылмалы қысым

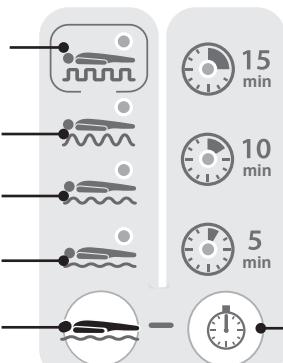

Жоғары пульсация



15 min

Орташа пульсация



10 min

Орташа пульсация



5 min

Пульсация / Құбылмалы қысым (ҚҚ) терапиясы түймесі

Пульсациялық терапияның қарқындылығын реттеу үшін басыңыз.



Пульсация / Құбылмалы қысым (ҚҚ) терапиясы түймесі

Пульсациялық терапияның қарқындылығын реттеу үшін басыңыз.



Пульсация / Құбылмалы қысым (ҚҚ) циклінің ұзақтығы түймесі

Пульсация циклінің ұзақтығын таңдау үшін басыңыз.

