

Accessoires nécessaires :

- Vêtements de protection
- Solution détergente neutre
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore disponible
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 10 000 ppm (1 %) de chlore disponible
- Eau chaude
- Chiffons jetables
- Serviettes en papier jetables

Le lit doit être nettoyé et désinfecté chaque semaine, et avant toute utilisation par un nouveau patient.

Nettoyage et désinfection entre deux patients

Nettoyage

1. Retirer le matelas et tous les accessoires du lit.
2. Retirer la tête de lit, le pied de lit et les plaques du sommier du lit.
3. Nettoyer toutes les surfaces avec un linge jetable imprégné d'eau et de solution détergente neutre.
Commencer par les sections supérieures du lit et toutes les surfaces horizontales. Poursuivre méthodiquement en direction des sections inférieures du lit et terminer par les roulettes.
4. Essuyer avec un nouveau chiffon jetable humecté d'eau et sécher au moyen de lingettes sèches jetables.
5. Veiller à bien sécher les parties nettoyées.

Désinfection

6. Après avoir nettoyé le lit, essuyez toutes les surfaces à l'aide d'une solution de dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore actif.
Des fluides corporels tels que le sang exigent une concentration plus élevée de DCCNa, de 10 000 parties par million (1 %) de chlore disponible.
7. Essuyer avec un nouveau chiffon jetable humecté d'eau propre et sécher au moyen de lingettes sèches jetables.
8. Replacer le matelas sur le lit.

Nettoyage quotidien

L'entretien et le nettoyage quotidiens consistent à essuyer toutes les surfaces et les barrières latérales.

1. Observer les consignes d'entretien et de nettoyage pour chaque surface thérapeutique spécifique utilisée.
2. Dans la mesure du possible, retirer le patient du lit avant le nettoyage.
3. Débrancher le lit de soins pour patients obèses Citadel Plus de la prise secteur.
4. Examiner le câble d'alimentation à la recherche de dommages ou de signes d'usure. Le système de soins pour patients obèses Citadel Plus ne doit en aucun cas être utilisé avec un câble d'alimentation usé ou endommagé. Si des dommages sont constatés, contacter Arjo.
5. Essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau chaude savonneuse ou d'un désinfectant hospitalier homologué.
6. Rincer avec un chiffon humidifié avec de l'eau propre.
7. Faire entièrement sécher tous les composants avant de les réutiliser.
8. Examiner toutes les pièces et vérifier l'absence de toute trace de dommages avant la remise en service du système. Si des éléments semblent nécessiter un entretien ou un remplacement, contacter Arjo.
9. Brancher le lit de soins pour patients obèses Citadel Plus à la prise secteur et régler les paramètres.

