

Необходимые принадлежности:

- Защитная одежда
- Нейтральное моющее средство
- Дихлоризоцианурат натрия (NaDCC) с концентрацией активного хлора 1000 ppm (0,1 %)
- Дихлоризоцианурат натрия (NaDCC) с концентрацией активного хлора 10 000 ppm (1 %)
- Теплая вода
- Одноразовые салфетки
- Одноразовые бумажные полотенца

Кровать следует мыть и дезинфицировать еженедельно и перед размещением каждого нового пациента.

Очистка и дезинфекция после каждого пациента

Очистка

1. Снимите с кровати матрас и все аксессуары.
2. Снимите с кровати изголовье, изножье и панели матрасной платформы.
3. Очистите все поверхности одноразовой салфеткой, смоченной водой и нейтральным моющим средством.
Начиная с верхних секций кровати, обработайте все горизонтальные поверхности. Проводите чистку методически, начиная с верхней секции и к нижней секции кровати, и чистку колес производите в последнюю очередь.
4. Протрите новой одноразовой салфеткой, смоченной в воде, и вытрите насухо одноразовыми бумажными полотенцами.
5. Дождитесь высыхания очищенных деталей.

Дезинфекция

6. После очистки кровати протрите все поверхности раствором дихлоризоцианурата натрия (NaDCC) в концентрации 1000 частей на миллион (0,1 %) активного хлора. При наличии физиологических выделений, например крови, концентрацию NaDCC необходимо увеличить до 10 000 частей на миллион (1 %) активного хлора.
7. Протрите еще раз новой одноразовой салфеткой, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо одноразовыми бумажными полотенцами.
8. Поместите матрас обратно на кровать.

Ежедневная очистка

В рамках ежедневного ухода и очистки необходимо протирать все поверхности и боковые ограждения.

1. Следуйте инструкциям по очистке и уходу для той опорной поверхности, которую использует пациент.
2. По возможности переместите пациента с кровати перед очисткой.
3. Отключите бариатрическую систему Citadel Plus от сетевой розетки.
4. Осмотрите кабель питания на предмет признаков износа или повреждений. Если шнур питания бариатрической системы Citadel Plus изношен или поврежден, эксплуатация системы недопустима. При обнаружении повреждений обратитесь в компанию Arjo.
5. Протрите поверхности салфеткой, смоченной в теплой мыльной воде или в растворе разрешенного к применению в медицинском учреждении дезинфицирующего средства.
6. Протрите салфеткой, смоченной в чистой воде.
7. Перед возобновлением эксплуатации системы дождитесь полного высыхания всех ее компонентов.
8. Перед возобновлением эксплуатации осмотрите все детали на предмет повреждений. Свяжитесь с компанией Arjo, если требуются сервисное обслуживание или замена.
9. Включите бариатрическую систему Citadel Plus в сетевую розетку и отрегулируйте настройки.

