

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น:

- ชุดป้องกัน
- น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
- โซเดียมไดคลอโรไฮไดรอกไซด์ (NaDCC) ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน 1,000 ppm (0.1%)
- โซเดียมไดคลอโรไฮไดรอกไซด์ (NaDCC) ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน 10,000 ppm (1%)
- น้ำอุ่น
- ผ้าใช้แล้วทิ้ง
- กระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง

ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเตียงทุกสัปดาห์ และก่อนที่ผู้ป่วยใหม่จะใช้เตียง

## การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเมื่อเปลี่ยนผู้ป่วย

### การทำความสะอาด

1. ถอดเบาะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากเตียง
2. ถอดแผ่นปิดหัวเตียง แผ่นปิดปลายเตียง และแผ่นรองที่นอนออกจากเตียง
3. ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งชุบน้ำสะอาดและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง เริ่มที่ส่วนบนของเตียงและเช็ดพื้นผิวทั้งหมดไปตามแนวนอน ทำงานอย่างเป็นระบบโดยทำความสะอาดต่อที่ส่วนล่างของเตียงและล้อเป็นส่วนสุดท้าย
4. เช็ดให้ทั่วด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งผืนใหม่ที่ชุบน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง
5. รอให้ชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดแล้วแห้ง

### การฆ่าเชื้อ

6. หลังจากทำความสะอาดเตียงแล้ว ให้เช็ดพื้นผิวทั้งหมดด้วยโซเดียมไดคลอโรไฮไดรอกไซด์ (NaDCC) ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน 1,000 ส่วนต่อล้าน (0.1%) ในกรณีเปื้อนของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด สารละลาย NaDCC ควรเพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 10,000 ส่วนต่อล้าน (1%)
7. เช็ดให้ทั่วด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งผืนใหม่ที่ชุบน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง
8. วางเบาะที่นอนลงบนเตียง

## การทำความสะอาดประจำวัน

การดูแลและทำความสะอาดประจำวันประกอบด้วยการเช็ดพื้นผิวทั้งหมดและราวจับด้านข้าง

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวรองรับผู้ป่วยเฉพาะที่ใช้งาน
2. นำผู้ป่วยออกจากเตียงก่อนทำความสะอาด หากเป็นไปได้
3. ถอดปลั๊ก Citadel Plus Bariatric Care System จากเต้ารับที่ผนัง
4. ตรวจสอบสายไฟเพื่อดูว่ามีการชำรุดสึกหรอหรือไม่ ไม่ควรใช้งาน Citadel Plus Bariatric Care System หากสายไฟชำรุดสึกหรอ ติดต่อ Arjo หากพบการชำรุด
5. เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นผสมสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
6. เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
7. ปลดปล่อยให้ส่วนประกอบทั้งหมดแห้งสนิทก่อนนำกลับไปใช้งาน
8. ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อหาจุดชำรุดก่อนส่งคืนกลับไปใช้งาน ติดต่อ Arjo หากจำเป็นสำหรับการบริการหรือการเปลี่ยน
9. เสียบปลั๊ก Citadel Plus Bariatric Care System เข้ากับเต้ารับที่ผนังและปรับการตั้งค่า

