


Citadel Terapijski sistem za pacijente

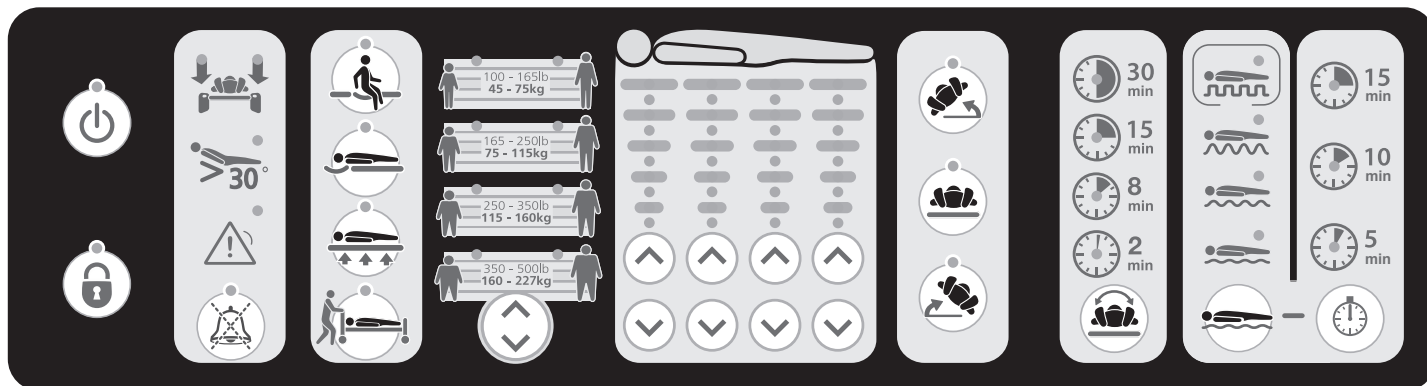

Dugme za uključivanje/isključivanje

Pritisnite i zadržite dve sekunde da biste uključili ili isključili.



Dugme za zaključavanje

Pritisnite i zadržite dve sekunde da biste aktivirali ili deaktivirali zaključavanje svih funkcija.



Indikator spuštene bočne šine

Označava da je spuštена bočna šina sa leve ili desne strane.



Indikator ugla Faulerovog položaja

Označava da je ugao Faulerovog položaja veći od 30°.



Indikator alarma

Označava da postoji uslov za oglašavanje alarma.



Dugme za utišavanje/brisanje alarma

Pritisnite da biste izbrisali indikator alarma ili da biste potvrdili alarm.



Dugme za izduvavanje sedišta

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali izduvavanje sedišta.



Dugme za izduvavanje dela za glavu

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali izduvavanje dela za glavu.



Dugme za čvrstinu dušeka

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju čvrstine dušeka.



Dugme za transport pacijenta

Pritisnite da biste aktivirali ili deaktivirali transport pacijenta.

Okretanje



Dugme za okretanje pacijenta nadesno (pomoć pri nezi)
Pritisnite da biste rotirali pacijenta 20° nadesno.



Dugme za centriranje pacijenta
Pritisnite da biste vratili pacijenta iz okrenutog u ravan položaj.



Dugme za okretanje pacijenta nalevo (pomoć pri nezi)
Pritisnite da biste rotirali pacijenta 20° nalevo.



30 min



15 min



8 min



2 min




Neprekidno okretanje pacijenta
Dugme za vreme zadržavanja (opcionalna konfiguracija)

Pritisnite da biste pokrenuli neprekidno okretanje pacijenta.

Kontrole za podešavanje vazdušnog pritiska



Unapred podešene postavke visine/težine
Pritisnite dugme da biste izabrali tip telesne građe i težinu pacijenta.

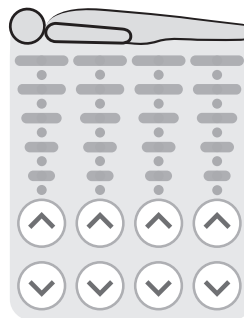

Indikatori zona pritiska

Pritisnite strelice nagore da biste povećali pritisak.

Pritisnite strelice nadole da biste smanjili pritisak.

Pulsiranje/terapija promenom pritiska (opcionalna konfiguracija)


Promena pritiska

Visoka vrednost pulsiranja

Srednja vrednost pulsiranja

Srednja vrednost pulsiranja

Dugme za pulsiranje / AP terapiju

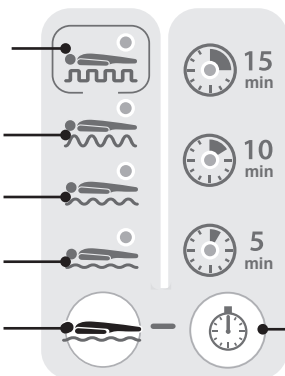

Dugme za pulsiranje / vreme AP ciklusa



Dugme za pulsiranje / AP terapiju
Pritisnite da biste podesili intezitet terapije pulsiranjem.



Dugme za pulsiranje / vreme AP ciklusa
Pritisnite da biste izabrali vreme ciklusa pulsiranja.