



# Система за рамка на леглото Citadel

## Контролен панел за придружаващия

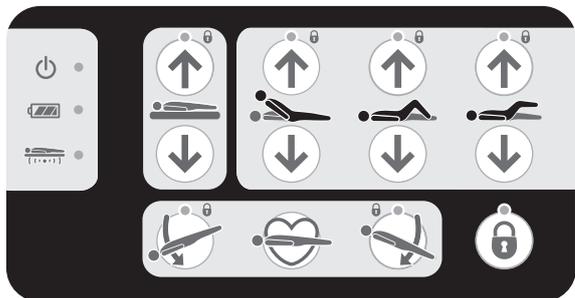


## Контролен панел за медицински сестри

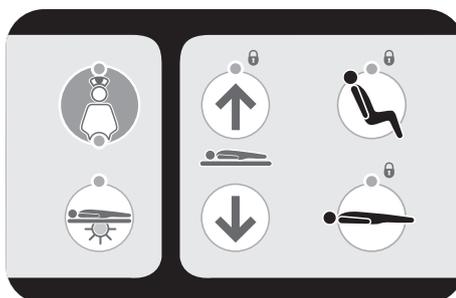

## Ръчен контролер за пациента



## Контролен панел за пациента

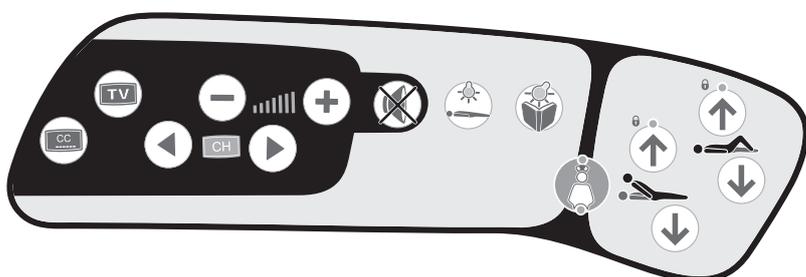

- **Индикатор за включено захранване**  
Зелена светлина, когато захранването е включено.



- **LED индикатор за състоянието на батерията**



● напълно заредено



● зарежда се



● изчерпан заряд



- **Индикатор на система против заклещване (AES)**  
Червена светлина: Системата AES е активирана и е необходимо да се премахне препятствие, преди рамката да бъде снижена.



- **Височина на платформата**  
Натиснете за повдигане и снижаване на платформата.



- **Ъгъл на опората за гърба**  
Натиснете за повдигане и снижаване на опората за гърба.



- **Секция за бедрата** - Натиснете за повдигане и снижаване на секцията за бедрата.



- **Секция за прасците**  
Натиснете за повдигане и снижаване на секцията за прасците.



- **Тренделенбург**  
Натиснете за снижаване на края за глава на платформата.



- **Обратен Тренделенбург**  
Натиснете за снижаване на края за краката на платформата.



- **Позиция на КПП**  
Натиснете за изравняване на матракната платформа.



- **Заклучване на функциите**  
Натиснете бутона, след което натиснете избрания бутон (или бутони) за контролен панел за придружаващия, за да заключите/отключите функцията. Жълта светлина = заключено





### Автоматична позиция на стол

Натиснете и задръжте за позиция на стол (само на контролния панел за медицински сестри).



### Автоматична позиция на стол – Надолу

Натиснете и задръжте за връщане в хоризонтална позиция (само за контролния панел за медицински сестри).



### Лампа под леглото

(само за контролния панел за медицински сестри).



### Извикване на медицинска сестра

Натиснете, за да поискате помощ (предлага се само за определени модели).



### Лампа за четене

Натиснете, за да включите лампата (предлага се само за определени модели).



Лампа за четене включена/изключена (предлага се при определени модели).



Звук включен/изключен (заглушаване) (предлага се при определени модели).



Намаляване на силата на звука (предлага се при определени модели).



Усилване на силата на звука (предлага се при определени модели).



Предишен канал (предлага се при определени модели).



Следващ канал (предлага се при определени модели).





Телевизия включена/изключена (предлага се при определени модели).



Субтитри включени/изключени (предлага се при определени модели).

## Контролен панел на кантара

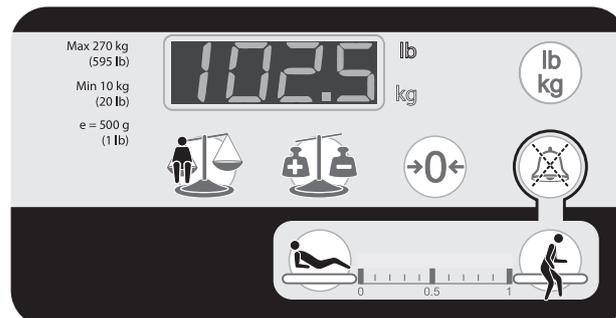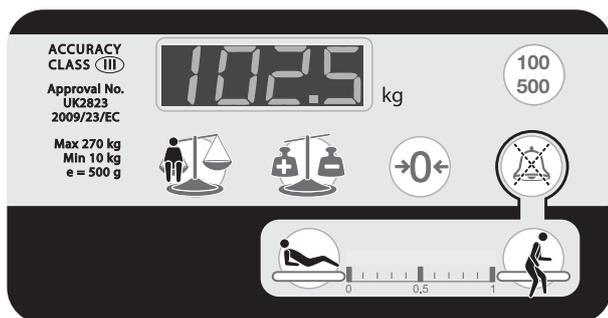

### Панели на кантара (в зависимост от държавата)



#### Нула

Натиснете за нулиране на системата за претегляне при първата настройка на леглото и преди настаняването на нов пациент в леглото.



#### Автоматична компенсация (тара)

Натиснете, когато се добавят или премахват от леглото елементи, без да се засяга указаното тегло на пациента.



#### Тегло

Натиснете, за да се изведе теглото.



#### Избор на начина, по който теглото се показва

Натиснете за закръгляване до най-близките 100 g или 500 g.




#### Избор на м.ед.

Натиснете за избор на единица за тегло.

#### Праг за откриване на движение на пациента

Индикатор показва избраната чувствителност за движение на пациента.

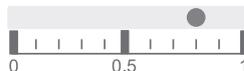

#### В леглото

Натиснете за повторно активиране/активиране на функцията за разпознаване на движението на пациента и за увеличаване на чувствителността.



#### Отсъствие

Натиснете за повторно активиране/деактивиране на функцията за разпознаване на движението на пациента и за намаляване на чувствителността.



#### Бутон за заглушаване VariZone™

Натиснете, за да заглушите алармата за излизане за три минути.