



# Systém rámu lůžka Citadel


## Ošetřovatelský ovládací panel (ACP)

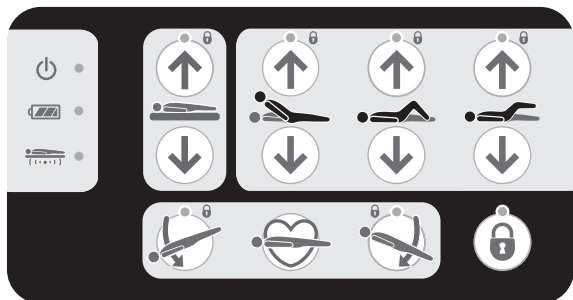


## Ovládací panel sestry

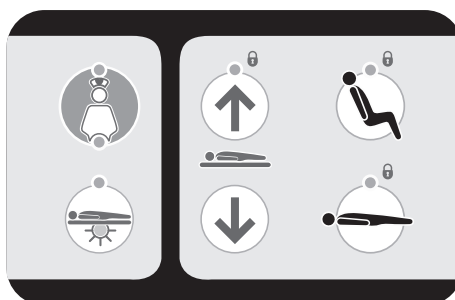

## Ruční ovladač pacienta/klienta

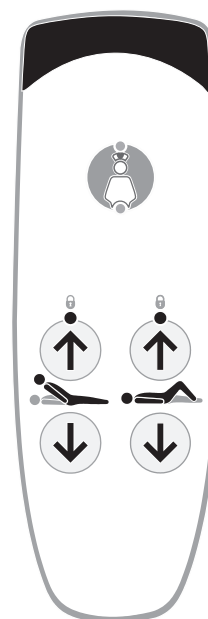

## Ovládací panel pacienta/klienta

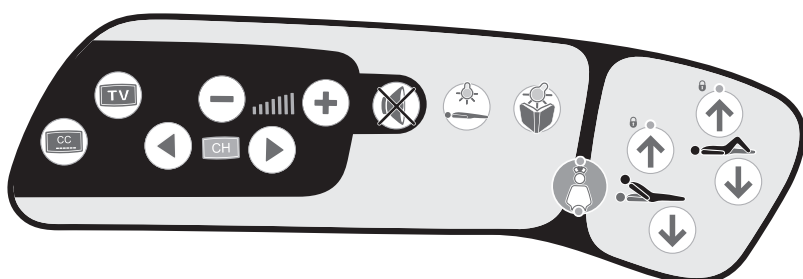

- **Indikátor napájení**  
Po zapnutí svítí zeleně.



- **LED indikátor stavu baterie**



- plně nabitá



- nabíjí se



- vybitá



- **Indikátor systému proti zachycení (AES)**  
Svítí červeně: Systém AES byl aktivován a před spuštěním rámu je nutné nejprve odstranit překážku.



- Výška ložné plochy**  
Stiskněte pro snížení nebo zvýšení ložní části.



- Stehenní část** – stiskněte pro snížení nebo zvýšení stehenní části.



- Lýtková část**  
Stiskněte pro snížení nebo zvýšení lýtkové části.

- Poloha Trendelenburg**  
Stiskněte pro snížení hlavové části ložné plochy.

- Reverzní Trendelenburg**  
Stiskněte pro snížení nožní části ložné plochy.

- Pozice pro CPR**  
Stiskněte pro vyrovnání platformy matrace.



- Zablokování funkce**  
Stiskněte tlačítko, poté stiskněte tlačítko(a) na ošetřovatelském ovládacím panelu (ACP) pro zablokování/odblokování funkce.  
Žluté světlo = zablokováno



- Úhel opěrky zad**  
Stiskněte pro snížení nebo zvýšení opěrky zad.



### Automatické nastavení polohy pro sezení

Stiskněte a přidržte pro nastavení polohy pro sezení (pouze na ovládacím panelu sestry).



### Tlačítko „dolů“ automatického nastavení polohy pro sezení

Stiskněte a přidržte pro vrácení lůžka do rovné a vodorovné pozice (pouze na ovládacím panelu sestry).



### Osvětlení pod lůžkem

(pouze na ovládacím panelu sestry).



### Systém pro přivolání sestry

Stiskněte pro přivolání pomoci (dostupný na vybraných modelech).



### Čtecí lampička

Stiskněte pro zapnutí lampičky (dostupná na vybraných modelech).



### Zapnutí/vypnutí čtecí lampičky

(dostupné na vybraných modelech).



**Vypnutí/zapnutí zvuku (ztlumení)**  
(dostupné na vybraných modelech).



**Snížení hlasitosti**  
(dostupné na vybraných modelech).



**Zvýšení hlasitosti**  
(dostupné na vybraných modelech).



**TV kanál nahoru**  
(dostupné na vybraných modelech).



**TV kanál dolů**  
(dostupné na vybraných modelech).





**Zapnutí/vypnutí televize**  
(dostupné na vybraných modelech).



**Zapnutí/vypnutí titulků**  
(dostupné na vybraných modelech).

## Ovládací panel váhy

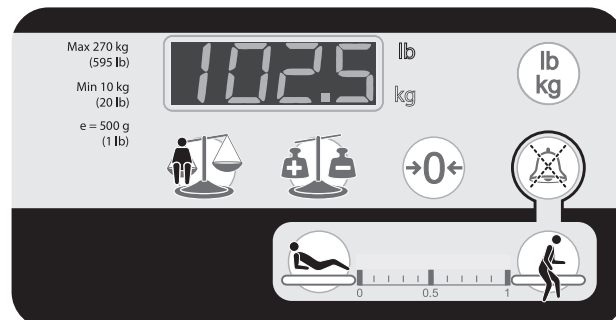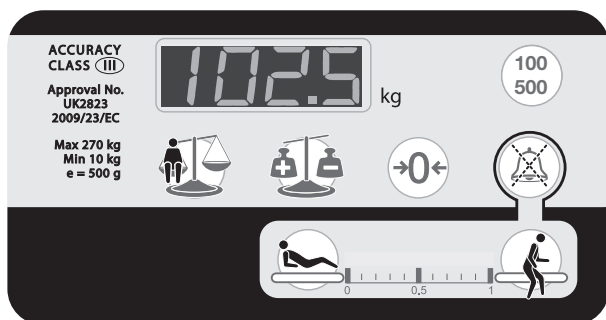

### Panely vážicího zařízení (v závislosti na zemi)



### Vynulování

Stiskněte pro vynulování vážicího zařízení při prvním zprovoznění lůžka a před jeho použitím u nového pacienta/klienta.



### Automatická kompenzace (tárování)

Stiskněte, když chcete přidat nebo odebrat příslušenství, aniž by tím byla ovlivněna hmotnost pacienta/klienta.



### Váha

Stiskněte pro zobrazení hmotnosti.



### Volba zobrazení hmotnosti

Stiskněte pro zaokrouhlení na nejbližších 100 g nebo 500 g.



### Výběr jednotek

Stiskněte pro výběr jednotky hmotnosti.



### Limitní hodnota detekce pohybu pacienta/klienta

Indikátor zobrazuje zvolenou citlivost detekce pohybu pacienta/klienta.



### Na lůžku

Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci detekce pohybu pacienta/klienta a zvýšení citlivosti.



### Opuštění lůžka

Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci detekce pohybu pacienta/klienta a snížení citlivosti.



### Tlačítko pro ztlumení systému VariZone™

Stiskněte pro ztlumení alarmu na dobu tří minut.