



Lit avec commandes intégrées Citadel

Panneau de commande soignant

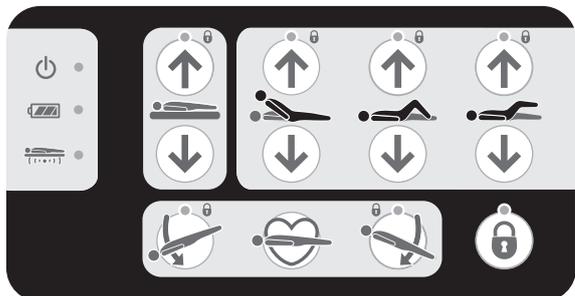


Panneau de commande personnel infirmier

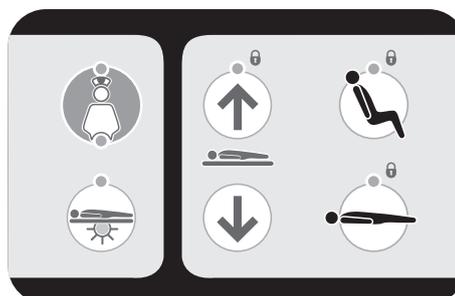

Télécommande patient



Panneau de commande patient

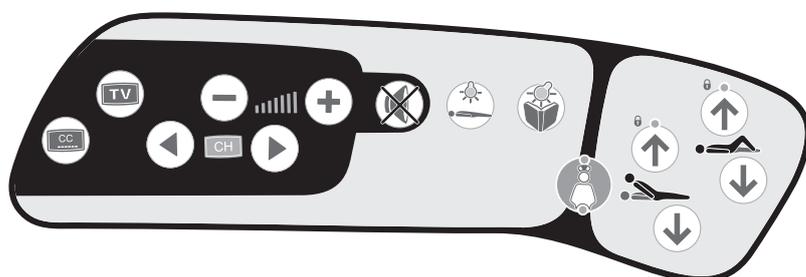

- **Indicateur lumineux de mise sous tension**
Voyant vert allumé lors de la mise sous tension.



- **Indicateur LED de l'état de la batterie**

- pleine charge
- en charge
- déchargé



- **Indicateur lumineux de système anti-piégeage (AES)**
Voyant rouge allumé : le système AES a été activé et l'obstruction doit être supprimée avant que le cadre ne s'abaisse.



- **Hauteur de sommier**
Appuyer sur ce bouton pour relever et abaisser le sommier.



- **Angle du dossier**
Appuyer sur ce bouton pour relever et abaisser le dossier.



Section cuisse - Appuyer sur ce bouton pour relever et abaisser la section cuisses.

Section jambes
Appuyer sur ce bouton pour relever et abaisser la section jambes.

Position décline
Appuyer sur ce bouton pour abaisser le côté tête du sommier.

Position proclive
Appuyer sur ce bouton pour abaisser le côté pieds du sommier.

Position CPR
Appuyer sur ce bouton pour mettre la plateforme du matelas en position horizontale.

Verrouillage des fonctions
Appuyer sur le bouton, puis sur le(s) bouton(s) du panneau de commande soignant correspondant(s) pour verrouiller/déverrouiller la fonction.
Voyant de couleur jaune = verrouillé



Auto-Chair

Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour sélectionner la position du fauteuil (panneau de commande personnel infirmier uniquement).



Abaissement Auto-Chair

Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour revenir à la position horizontale (panneau de commande personnel infirmier uniquement).



Veilleuse sous le lit

(panneau de commande personnel infirmier uniquement).



APPEL INFIRMIER

Appuyer sur ce bouton pour demander de l'aide (disponible sur certains modèles).



Veilleuse

Appuyer sur ce bouton pour allumer la veilleuse (disponible sur certains modèles).



Veilleuse allumée/éteinte

(disponible sur certains modèles).



Son marche/arrêt (silencieux)
(disponible sur certains modèles).



Volume -
(disponible sur certains modèles).



Volume +
(disponible sur certains modèles).



Chaîne précédente
(disponible sur certains modèles).



Chaîne suivante
(disponible sur certains modèles).





Télévision marche/arrêt
(disponible sur certains modèles).



Marche/arrêt sous-titrage
(disponible sur certains modèles).

Panneau de commande du système de pesée

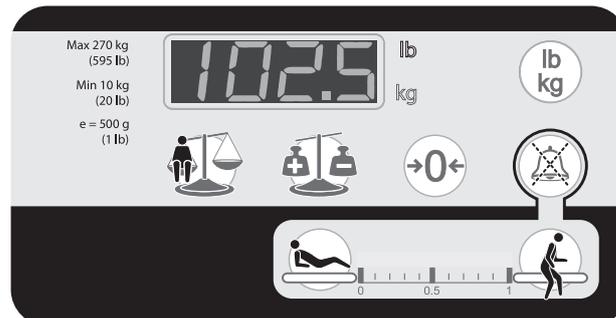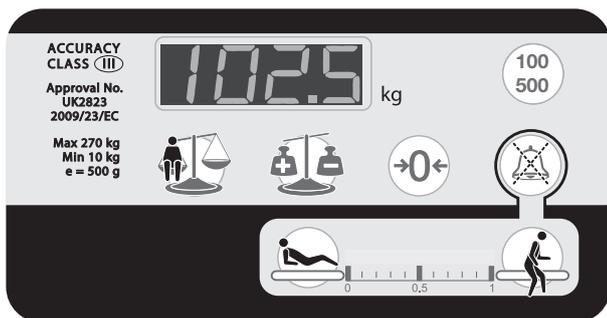

Panneaux de la pesée (variables selon les pays)



Remise à zéro

Appuyer sur ce bouton pour remettre à zéro le système de pesée lors de la première installation du lit ou avant qu'un nouveau patient n'y prenne place.



Auto Compensation (tare)

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou retirer des articles du lit sans affecter le poids du patient indiqué.



Pesée

Appuyer sur ce bouton pour afficher le poids.



Sélection de l'affichage du poids

Appuyer sur ce bouton pour arrondir au 100 g ou 500 g le plus proche.



Sélection des unités

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner l'unité de pesée.

Seuil de détection des mouvements du patient

Un témoin indique la sensibilité sélectionnée pour les mouvements du patient.



Lit

Appuyer sur ce bouton pour réactiver/désactiver le système de détection des mouvements du patient et augmenter la sensibilité du système.



Sortie de lit

Appuyer sur ce bouton pour réactiver/désactiver le système de détection des mouvements du patient et abaisser la sensibilité du système.



Bouton Silence VariZone™

Appuyer sur ce bouton pour désactiver l'alarme de sortie pendant trois minutes.