



Sistema del letto Citadel

Pannello Controllo Operatore

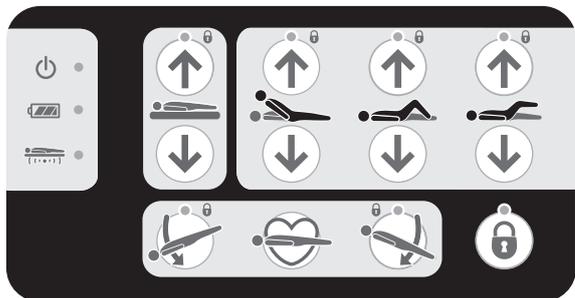


Pannello di controllo dell'infermiere

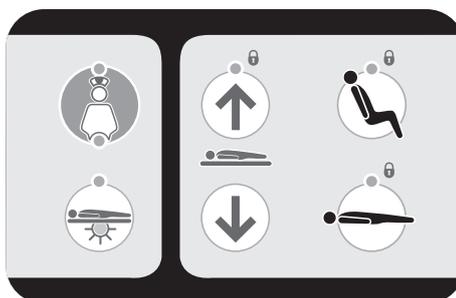

Pulsantiera paziente



Pannello di controllo del paziente

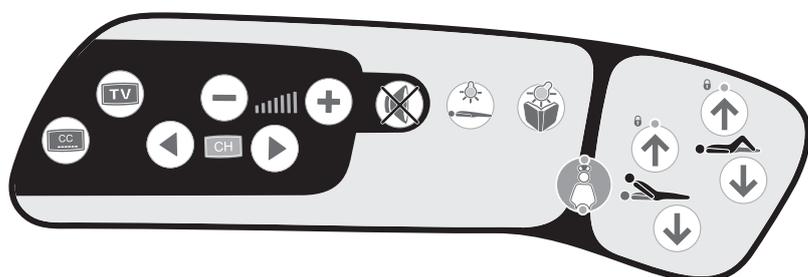

- 

Indicatore accensione
Si illumina di verde quando è acceso.
- 


Indicatore LED di stato della batteria

 -  ● completamente carica
 -  ● in carica
 -  ● scarica
- 

Indicatore sistema anti-intrappolamento (AES)
Illuminato di rosso: il sistema AES si è attivato indicando che occorre rimuovere un ostacolo prima che il telaio si abbassi.
- 

Altezza pianale
Premere per alzare e abbassare il pianale.
- 

Angolazione schienale
Premere per alzare e abbassare lo schienale.
- 

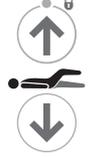Sezione coscia - Premere per alzare e abbassare la sezione coscia.
- 

Sezione polpaccio
Premere per alzare e abbassare la sezione polpaccio.
- 

Trendelenburg
Premere per abbassare la sezione testa del pianale.
- 

Anti-Trendelenburg
Premere per abbassare la sezione piedi del pianale.
- 

Posizione RCP
Premere per portare il pianale portamaterasso in posizione piana.
- 

Blocco funzioni
Premere il pulsante, quindi premere il pulsante o i pulsanti selezionati del Pannello Controllo Operatore per bloccare/sbloccare la funzione. Spia gialla = bloccato



Auto-Chair

Tenere premuto per la posizione seduta (solo su pannello di controllo dell'infermiere)



Auto-Chair giù

Tenere premuto per tornare in posizione orizzontale (solo su pannello di controllo dell'infermiere).



Luci di cortesia

(solo su pannello di controllo dell'infermiere).



Chiamata infermiere

Premere per richiedere assistenza (disponibile su certi modelli).



Luce di lettura

Premere per accendere la luce (disponibile su certi modelli).



Luce di lettura accesa/spenta
(disponibile su certi modelli).



Suono attivato/disattivato (muto)
(disponibile su certi modelli).



Volume giù
(disponibile su certi modelli).



Volume su
(disponibile su certi modelli).



Canale precedente
(disponibile su certi modelli).



Canale successivo
(disponibile su certi modelli).





Televisione accesa/spenta
(disponibile su certi modelli).



Sottotitoli per non udenti attivati/disattivati
(disponibile su certi modelli).

Pannello di controllo della bilancia di pesatura

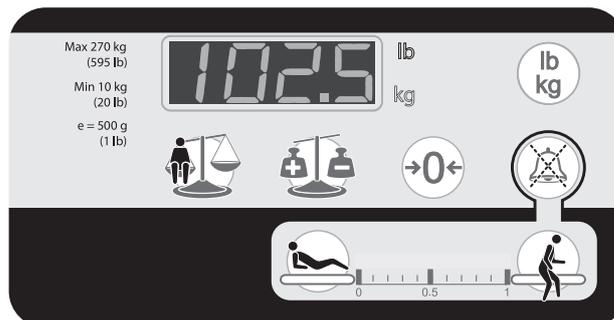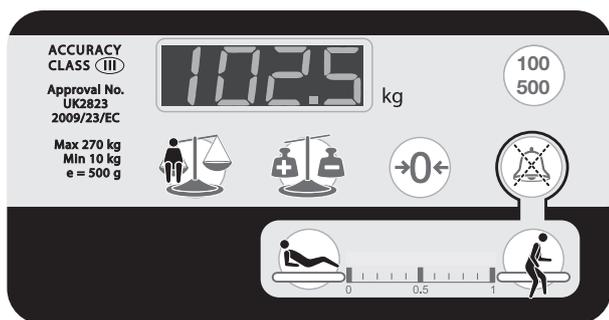

Pannelli della bilancia di pesatura (a seconda del Paese)



Zero

Premere per ripristinare il sistema di pesatura quando viene allestito il letto per la prima volta e prima che un nuovo paziente utilizzi il letto.



Autocompensazione (tara)

Premere quando si aggiungono o rimuovono elementi dal letto per non influire sul peso del paziente indicato.



Peso

Premere per visualizzare il peso.



Selezione display peso

Premere per arrotondare di 100 g o 500 g.



Selezione unità

Premere per selezionare l'unità di pesatura.

Soglia di rilevamento dei movimenti del paziente

Un indicatore mostra la sensibilità selezionata dei movimenti del paziente.



A letto

Premere per riattivare/disattivare il rilevamento dei movimenti del paziente e aumentare la sensibilità.



Uscita dal letto

Premere per riattivare/disattivare il rilevamento dei movimenti del paziente e diminuire la sensibilità.



Pulsante di silenziamento VariZone™

Premere per disattivare l'allarme per tre minuti.