



Sistema de estrutura da cama Citadel


Painel de controlo do operador

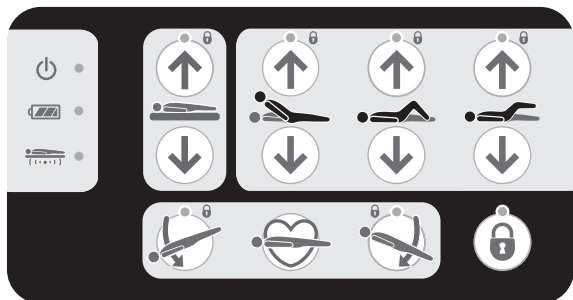


Painel de controlo do enfermeiro

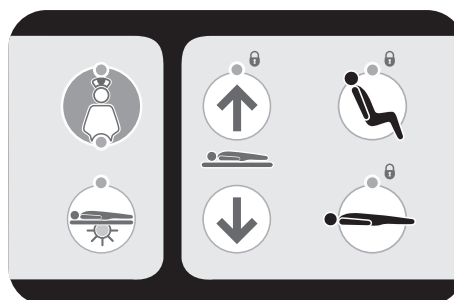



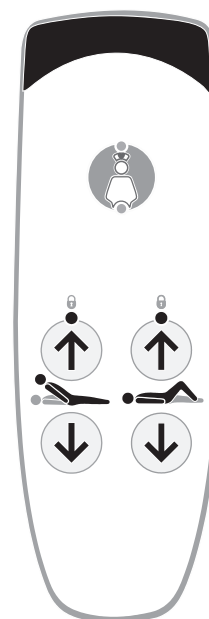



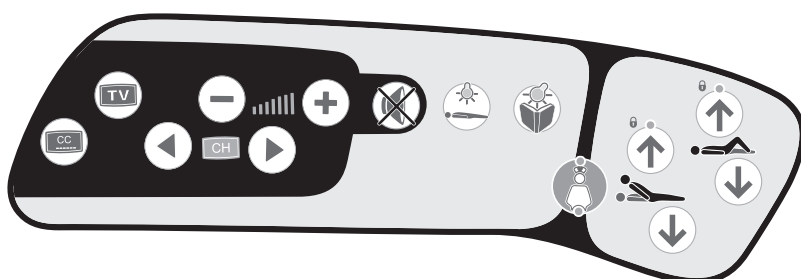







Comando do paciente



Painel de controlo do paciente



- 
Indicador de ativação
Luz verde quando ligado.
- 
Indicador LED do estado da bateria
 -  totalmente carregada
 -  a carregar...
 -  descarregada
- 
Indicador do sistema de deteção de prisão de membros (AES)
Luz vermelha: O sistema AES foi ativado e a obstrução precisa de ser removida antes que a estrutura baixe.
- 
Altura da plataforma
Prima para elevar e baixar a plataforma.
- 
Ângulo do apoio das costas
Prima para elevar e baixar o apoio das costas.
- 
Secção da coxa - Prima para elevar e baixar a secção da coxa.
- 
Secção dos gémeos
Prima para elevar e baixar a secção dos gémeos.
- 
Trendelenburg
Prima para baixar a cabeceira da plataforma.
- 
Trendelenburg invertido(a)
Prima para baixar o lado dos pés da plataforma.
- 
Posição para RCP
Prima para endireitar a plataforma do colchão.
- 
Bloqueio de funções
Prima o botão e depois prima o(s) botão(ões) do Painel de controlo do operador selecionado(s) para bloquear/desbloquear a função.
Luz amarela = bloqueado



Cadeira automática

Prima e mantenha premido para obter a posição de cadeira (apenas no painel de controlo do enfermeiro).



Descer a cadeira automática

Prima e mantenha premido para voltar à posição plana (apenas no painel de controlo do enfermeiro).



Luz sob a cama

(apenas no painel de controlo do enfermeiro).



Chamada do enfermeiro

Prima para pedir ajuda (disponível em alguns modelos).



Luz de leitura

Prima para acender a luz (disponível em alguns modelos).



Luz de leitura acesa/apagada
(disponível em alguns modelos).



Som ligado/desligado (silêncio)
(disponível em alguns modelos).



Baixar o volume
(disponível em alguns modelos).



Aumentar o volume
(disponível em alguns modelos).



Canal para baixo
(disponível em alguns modelos).



Canal para cima
(disponível em alguns modelos).





Televisão ligada/desligada
(disponível em alguns modelos).



Legendas ligadas/desligadas
(disponível em alguns modelos).

Painel de controlo da balança

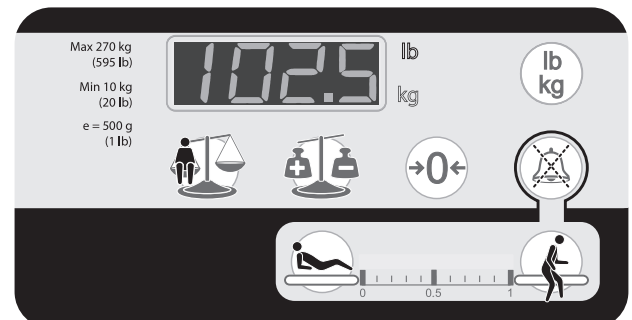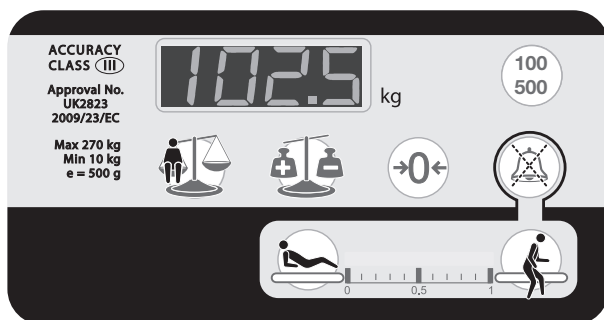

Painéis da balança (dependendo do país)



Zero

Prima para reiniciar o sistema de pesagem quando a cama é configurada pela primeira vez e antes de ser utilizada por um novo paciente.



Autocompensação (tara)

Prima quando adicionar ou retirar itens da cama para não afetar o peso indicado do paciente.



Pesar

Prima para exibir o peso.



Selecionar apresentação do peso

Prima para arredondar o peso para os 100 g ou 500 g mais próximos.



Selecionar unidades

Prima para selecionar a unidade de peso.

Limiar de deteção de movimento do paciente

Um indicador mostra a sensibilidade selecionada para a deteção de movimentos do paciente.



Na cama

Prima para ativar/desativar a deteção de movimentos do paciente e aumentar a sensibilidade.



Egressão

Prima para reativar/desativar a deteção de movimentos do paciente e diminuir a sensibilidade.



Botão Mudo do VariZone™

Prima para silenciar o alarme de saída durante três minutos.