



Systém rámu lôžka Citadel

Obslužný ovládací panel

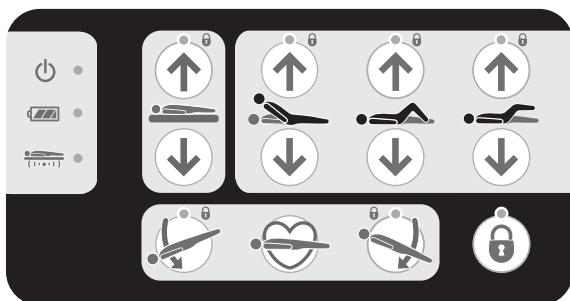


Ovládací panel pre zdravotnú sestru

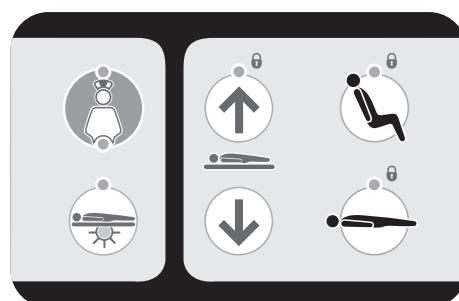

Ručný ovládač pre pacienta



Ovládací panel pre pacienta

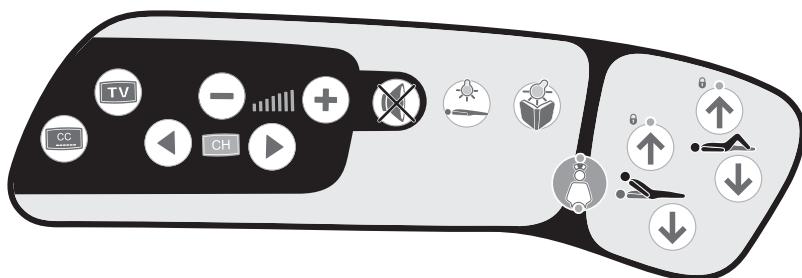

Indikátor zapnutia

Pri zapnutí svieti nazeleno.



LED indikátor stavu batérie

- plne nabitá
- nabíja sa
- vybitá



Indikátor systému na ochranu pred uviaznutím (Anti-Entrapment System, AES)

Sveti načerveno: Systém AES sa aktivoval a pred spustením rámu je potrebné odstrániť prekážku.



Výška ložnej plochy

Stlačením sa zdvívha a spúšta ložná plocha.



Uhol chrbtovej opierky

Stlačením sa zdvívha a spúšta chrbtová opierka.



Stehenná časť – stlačením sa zdvívha a spúšta stehenná časť.



Lýtková časť

Stlačením sa zdvívha a spúšta lýtková časť.



Trendelenburgova poloha

Stlačením sa spúšta hlavový koniec ložnej plochy.



Obrátená Trendelenburgova poloha

Stlačením sa spúšta nožný koniec ložnej plochy.



Poloha CPR

Stlačením sa vyravná ložná plocha matraca.



Uzamknutie funkcie

Stlačte toto tlačidlo a potom na uzamknutie/odomknutie funkcie stlačte vybrané tlačidlo(á) obslužného ovládacieho panela (ACP). Žlté svetlo = uzamknuté

**Automatická stolička**

Stlačte a podržte na nastavenie polohy stoličky (len ovládací panel pre zdravotnú sestru).

**Automatické spustenie stoličky**

Stlačte a podržte na návrat do vodorovnej polohy (len ovládací panel pre zdravotnú sestru).

**Podsvietenie lôžka**

(len ovládací panel pre zdravotnú sestru).

**Privolanie zdravotnej sestry**

Stlačením privolajte pomoc
(k dispozícii u vybraných modelov).

**Lampa na čítanie**

Stlačením zapnite svetlo
(k dispozícii u vybraných modelov).

**Zapnúť/vypnúť lampu na čítanie**

(k dispozícii u vybraných modelov).



Zapnúť/vypnúť zvuk (stlmenie)
(k dispozícii u vybraných modelov).



Zniženie hlasitosti
(k dispozícii u vybraných modelov).



Zvýšenie hlasitosti
(k dispozícii u vybraných modelov).



Predchádzajúci kanál
(k dispozícii u vybraných modelov).



Nadchádzajúci kanál
(k dispozícii u vybraných modelov).





Zapnúť/vypnúť televízor
(k dispozícii u vybraných modelov).



Zapnúť/vypnúť uzavreté titulky
(k dispozícii u vybraných modelov).

Ovládací panel váhy

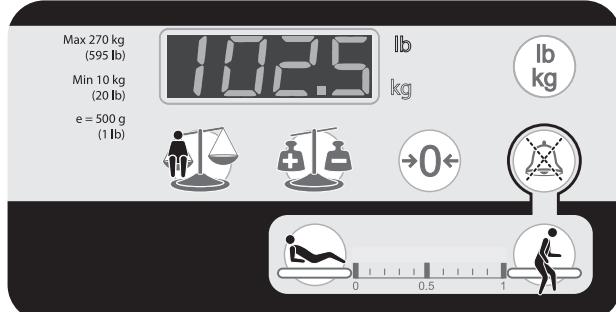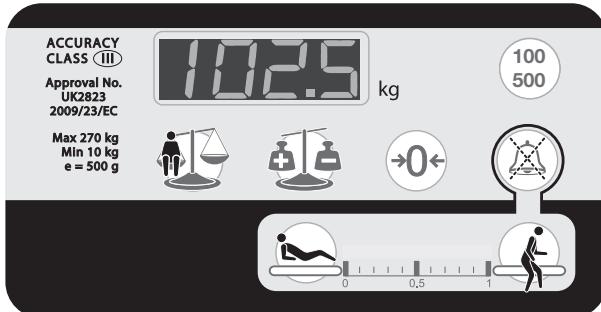

Panely váhy (závisí od krajiny)

**Vynulovať**

Stlačením sa vynuluje systém na váženie, keď sa lôžko prvýkrát nastavuje, a predtým, než sa naň umiestní nový pacient.

**Automatická kompenzácia (tara)**

Stlačte, keď sa pridávajú alebo odstraňujú položky z lôžka bez vplyvu na uvádzanú hmotnosť pacienta.

**Hmotnosť**

Stlačte na zobrazenie hmotnosti.

**Zobrazenie vybranej hmotnosti**


Stlačte na zaokrúhlenie na najbližších 100 g alebo 500 g.

**Vybrať jednotky**

Stlačením vyberiete hmotnostnú jednotku.

Prah detekcie pohybu pacienta

Indikátor znázorňuje zvolenú citlosť pre pohyby pacienta.

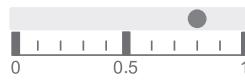**Na lôžku**

Stlačte na aktiváciu/deaktiváciu detekcie pohybu pacienta a zvýšenie citlosťi.

**Odchod**

Stlačte na aktiváciu/deaktiváciu detekcie pohybu pacienta a zníženie citlosťi.

**Tlačidlo stlmenia VariZone™**

Stlačením stlmíte alarm opustenia lôžka na tri minúty.

