

„Citadel“ pacientų terapijos sistema


Pasiruošimas paciento guldymui ir perkėlimui

1




Nuspauskite lovos rėmo ratukų stabdžius.

2

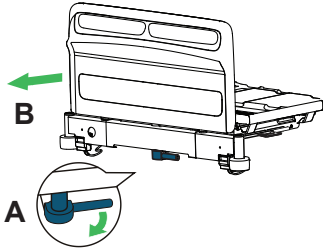


Jeigu reikia, pailginkite rėmą ir čiužinį.

3




Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką valdymo skydelyje, kad įsijungtų oro padavimas.

4

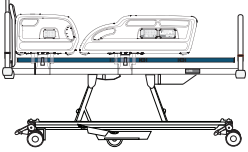


Nustatykite paciento atraminį paviršių į horizontalią padėtį.

5



Paspauskite kieto čiužinio mygtuką, kad pripūstumėte čiužinį.

6

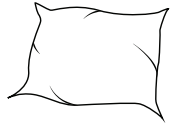


Pridėkite pagalves, antklodes ir kitą įrangą.

7



Nustatykite pradinį oro slėgį: paspauskite išankstines ūgio / svorio nuostatas, kad pasirinktumėte paciento profilį.


Paciento guldymas Paciento perkėlimas nuo „Citadel“ paciento terapijos sistemos



Paspauskite slėgio zonų reguliavimo mygtukus, kad sureguliuotumėte čiužinio slėgį.


Rodyklėmis aukštyn slėgis didinamas, o rodyklėmis žemyn – mažinamas.

1

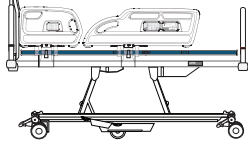


Nustatykite paciento atraminį paviršių į horizontalią padėtį.

2

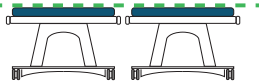


Paciento atraminio paviršiaus aukštį nustatykite į tokį patį, kaip ir paciento perkėlimo paviršiaus.

3

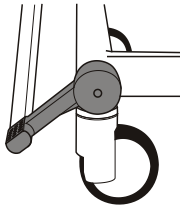

Nuspauskite abiejų įtaisų stabdžius.

4

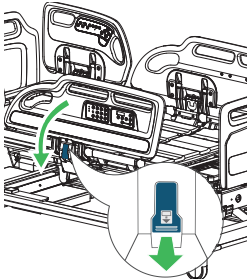


Nuleiskite šoninius turėklus.

5

Perkelkite pacientą (laikydami visų galiojančių saugos taisyklių ir įstaigos protokolų).

6



Jeigu pacientas nesugrįš, paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte.


Paciento pervežimas

1




Paspauskite paciento pervežimo mygtuką, kad pripūstumėte pripučiamąjį čiužinį šiek tiek daugiau nei nustatytas slėgis.

2

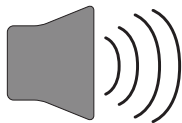


Pasigirdus garsiniam signalui ir pervežimo mygtuko indikatoriumi pradėjus šviesti žaliai, atjunkite maitinimo laidą, suvyniokite jį ant galvūgalyje esančio kablo.

3

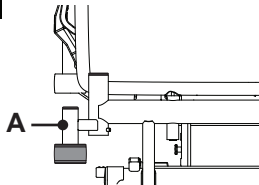


Perkelkite paciento IV terapijos įrangą ant IV įtaisų, kuriuos galima įstatyti į lizdus (A) visuose lovos kampuose.

4

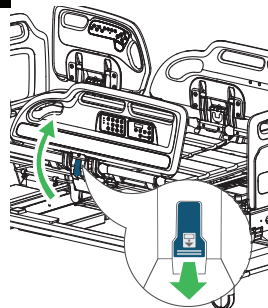


Pakelkite šoninius turėklus.

5

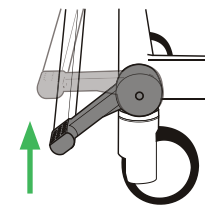

Atleiskite stabdžius.

6

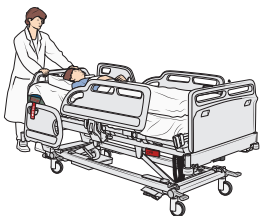

Pervežkite pacientą, laikydamiesi visų galiojančių saugos taisyklių ir įstaigos protokolų.

7

Po paciento pervežimo nuspauskite lovos rėmo ratukų stabdžius ir nedelsdami prijunkite maitinimo laidą prie sieninio lizdo.

8



Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę čiužinio valdymo bloko įjungimo / išjungimo mygtuką, kad valdymo blokas įsijungtų.

