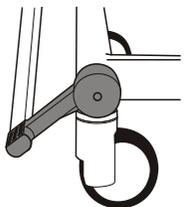
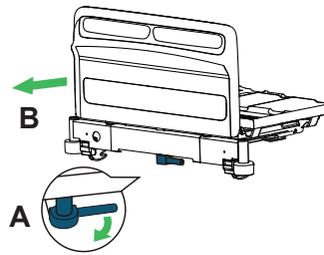
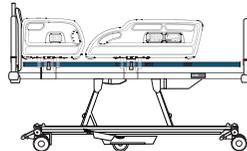
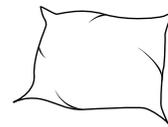
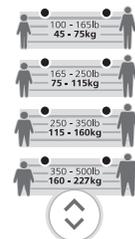





Terapeutický systém Citadel Patient Therapy System

Príprava na umiestnenie/presun pacienta

<p>1</p>  <p>Zaistíte brzdy koliesok na ráme lôžka.</p>	<p>2</p>  <p>V prípade potreby predĺžte rám a matrac.</p>	<p>3</p>  <p>Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a podržte ho dve sekundy na ovládacom paneli, aby sa aktivoval prívod vzduchu do jednotky.</p>	<p>4</p>  <p>Vyrovajte podklad pod pacientom.</p>	<p>5</p>  <p>Na nafúknutie matraca stlačte tlačidlo pevného matraca.</p>	<p>6</p>  <p>Pridajte vankúše, prikrývky a ďalšie vybavenie.</p>	<p>7</p>  <p>Nastavte východiskový tlak vzduchu: Na výber profilu pacienta stlačte predvoľby výšky/hmotnosti.</p>
---	---	--	---	--	--	---

Umiestnenie pacienta

Presun pacienta z terapeutického systému pre pacienta Citadel

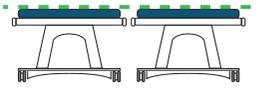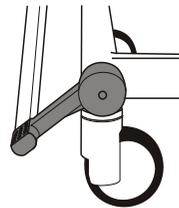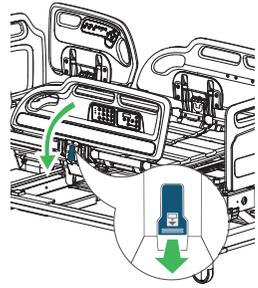 <p>Stláčaním tlačidiel nastavení tlakových zón nastavte tlak matraca. Šípkami nahor zvyšujete a šípkami nadol znižujete tlak.</p>	<p>1</p>  <p>Vyrovajte podklad pod pacientom.</p>	<p>2</p>  <p>Ložnú plochu pre pacienta nastavte do rovnakej výšky, ako je povrch, z ktorého sa pacient presúva.</p>	<p>3</p>  <p>Na oboch zariadeniach zaistíte brzdy.</p>	<p>4</p>  <p>Spustite postrannice.</p>	<p>5</p> <p>Presuňte pacienta (podľa všetkých platných bezpečnostných predpisov a protokolov inštitúcie).</p>	<p>6</p>  <p>Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na dve sekundy vypnete zariadenie, ak sa pacient nebude otáčať.</p>
--	--	---	---	---	--	--


Prevoz pacienta

1




Stlačením tlačidla prevozu pacienta nafúknite vzduchový matrac mierne nad úroveň nastaveného tlaku.

2

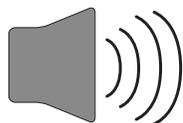


Po zaznení zvukového tónu a rozsvietení indikátora tlačidla prevozu nazeleno odpojte napájací kábel a oviňte ho na hák na hlavovom konci.

3

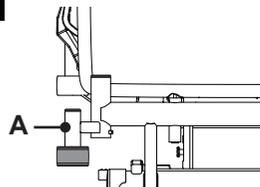


Pacientove infúzie zaveste na infúzne stojany a potom do držiakov (A), ktoré sa nachádzajú vo všetkých rohoch lôžka.

4

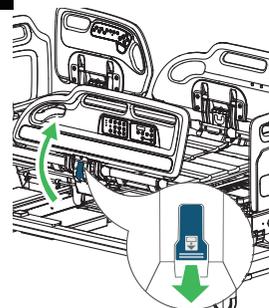


Zdvihnite postrannice.

5

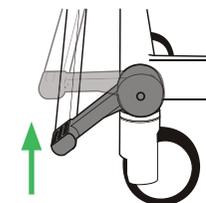

Odistite brzdy.

6

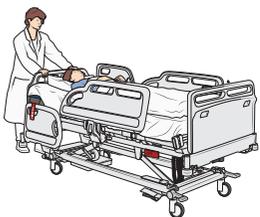

Pacienta transportujte podľa príslušných zásad bezpečnosti a protokolov inštitúcie.

7

Po prevoze pacienta zaistíte brzdy koliesok na ráme lôžka a napájací kábel okamžite zapojte do elektrickej zásuvky.

8



Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na riadiacej jednotke matraca a jeho podržaním na dve sekundy vypnete riadiacu jednotku.

